

## マツヨシ 米式手洗台B 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。製品を末永くご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、お読みいただいた後はお手元に保管してください。

### 【各部の名称】



品番	MY-2056	MY-2057
規格	1個用	2個用
サイズ	W355×D355×H800mm	W680×D355×H800mm
丸枠寸法	約Φ300mm	
材質	ステンレス	
キャスター	Φ50mm	

### ▲安全上のご注意

- 本製品は、本来の目的以外に使用しないでください。また、加工や改造など行わないでください。
- ご使用前に破損や変形などの異常が無いか必ず点検してください。異常が見られる場合はただちに使用を中止してください。
- 本製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないでください。転倒や破損の原因になります。
- 物を載せすぎたり、偏った積載はしないでください。転倒や積載物落下による事故の原因になります。
- 規格に合った鉢(Φ320mm)を使用してください。思わぬ事故につながる恐れがあります。
- 屋外、傾斜や不安定な場所でのご使用はお控えください。転倒や破損の原因になります。
- キャスターや可動部などに異常音が発生した場合は直ちに使用を中止し、ご購入された販売店にご相談ください。

### お手入れ・保管方法

- 汚れが付いてしまった場合、アルコールを含んだやわらかい布等で汚れを落としてください。その後、水拭きをし、アルコールを拭き取り、乾いた布で水気を取ってください。
- 風通しのいい直射日光が当たらない場所で保管してください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

### 【発売元】

 松吉医科器械株式会社  
<https://www.matsuyoshi.co.jp>