

Knee splint

ニースプリント 伸展タイプ/屈曲タイプ

〈膝関節固定帯〉

——使用説明書——

このたびは本品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。
また、本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

用 途

- 靭帯損傷・膝関節炎など膝部疾患時の膝関節の固定
- 膝関節手術後の膝関節の固定
- リハビリテーション時の膝関節の固定

はじめにお読みください

- 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 本品は使用状況により、必ずしも固定できない場合があります。
- 本使用説明書は、ニースプリント伸展タイプおよびニースプリント屈曲タイプに共通です。
- 本品は左右兼用です。
- 使用前にサイズが合っているか再度確認してください。サイズ表は本使用説明書のP.8にあります。

ご使用にあたって

- 本品は滅菌できません。
- 膝裏および側面のメッシュ生地に面ファスナーおよび固定ストラップをつけないでください。メッシュ生地をいためる原因となります。
- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- 保管の際は、面ファスナーや起毛部分に過度の重みがかからないようにしてください。面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。

使用上の注意—必ずお読みください—

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。



警告……誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容



注意……誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容



警告


本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。


異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は医師に相談してください。

- アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
- 装着部に傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。



次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。

- 膝関節以外の部位に使用しないでください。
- サイズの合った製品を使用してください(サイズ表は本使用説明書のP.8にあります)。
- 就寝時の使用については、必ず医師の指示に従ってください。
- 上下、表裏、前後を正しく使用してください。
- 装着手順に従って正しく使用してください。
- サポーター本体や各種ストラップをきつく締めすぎないでください。
- 使用中にゆるんだりずれたりしたときは、必ず手順の始めから正しく装着し直してください。

 警告	<ul style="list-style-type: none"> ●本品に摩耗、損傷のある場合や面ファスナー、固定ストラップのつきが悪くなった場合は使用しないでください。 ●ステーカーの上端のステア面ファスナーは、中のステアが飛び出さないようにしっかりととめてください。 ●本品の加工、改造、修理を行わないでください。 ●本品は個人用の製品です。処方された方以外は使用しないでください。
	<p>本品のステアは金属製です。負傷事故を防ぐため、次の場合は使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本品との接触により、他人を傷つけることが予想される場合。
	<p>本品の使用中に次の異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●つけごちが悪いなど違和感がある場合。 ●装着部に怪我、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。

 注意	<p>面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。</p>
	<p>本品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に色移りする場合があります。</p>
	<p>面ファスナーや固定ストラップが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。</p>

お手入れ方法

 警告	<p>洗濯の際に抜いたステアを、再度、入れ直すときは、ステアの種類、各ステアの上下、表裏を間違えないでください(詳細はP.7を参照してください)。製品が正しく機能しない場合があります。</p>
	<p>色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地に色移りする場合があります。</p>
 注意	<p>他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、洗濯ネットを使用してください。面ファスナーや固定ストラップが他の衣類などにつくとほつれや伝線の原因となります。</p>

- 洗濯の際はステアを抜いてください。
- 本品は洗濯機で洗濯できます。洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。
- 洗濯の際は、面ファスナーは本体にとめ、固定ストラップは折り返しとめてください。とめずに洗濯すると、面ファスナーや固定ストラップのつきが悪くなるおそれがあります。
- アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- 乾燥機は使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。


各部の名称

※本品は左右兼用です。図は右脚に装着しています。

※コカン、ステアー面ファスナーおよび仮どめ面ファスナーは、ニースプリント伸展タイプは白色、ニースプリント屈曲タイプは黒色です。


ニースプリント伸展タイプ

ニースプリント屈曲タイプ

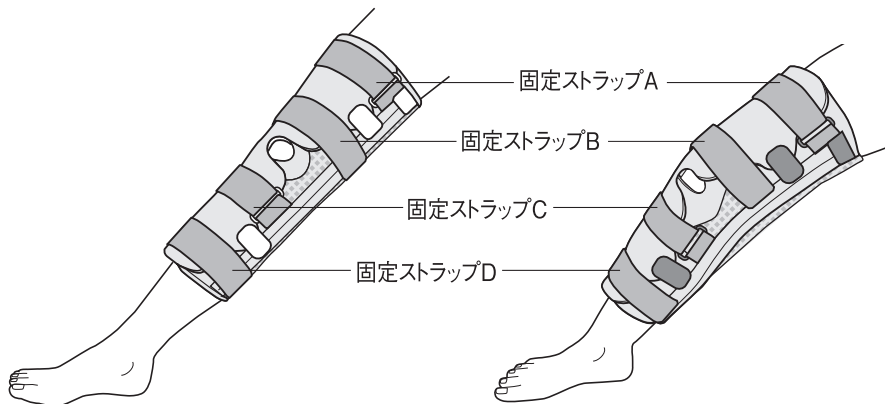

ニースプリント伸展タイプ


【製品の表側】

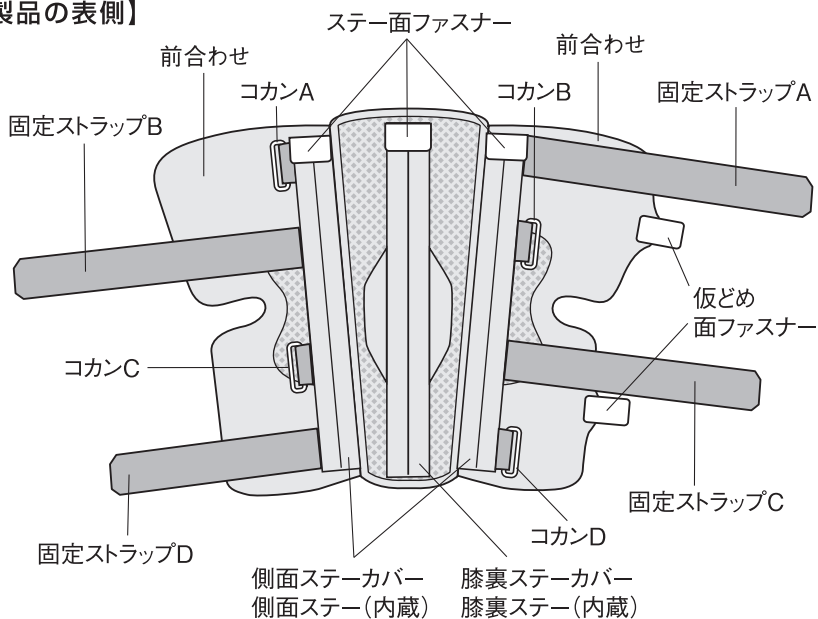


装着手順

- 装着前に本使用説明書P.2～3の【使用上の注意—必ずお読みください—】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。
- 以下の装着手順は右脚の場合です。左脚に装着する場合も同じように装着してください。
- 装着手順ではニースプリント伸展タイプを示していますが、ニースプリント屈曲タイプも同じように装着してください。


- 1** サポーター本体の面ファスナー、固定ストラップをすべて取り外します。
本品はタグのある方が上で体に当たる側になります。タグの矢印の向きで上下を確認してください。

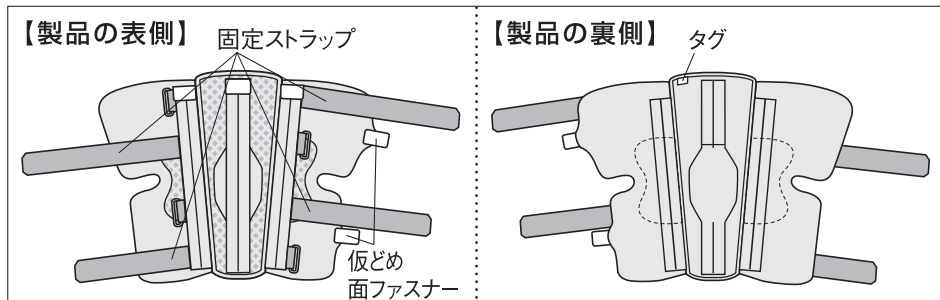


- 2** 本体を膝の裏側から当て、膝裏の凹部分とパッド部分の位置を合わせます。このとき、脚の中心に膝裏ステーの中心が合っていることを確かめてください。

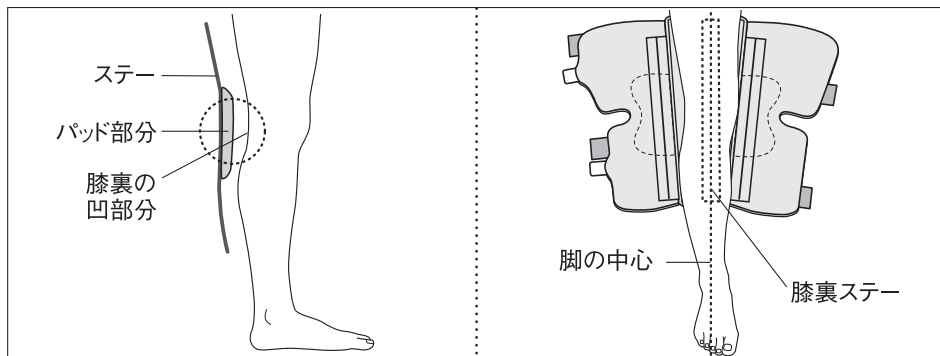


- 3** 前合わせを膝の前面で重ね、仮どめ面ファスナーをとめます。

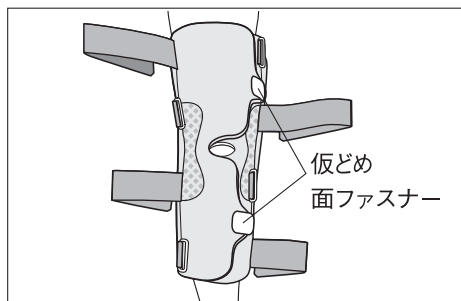


- 4** 固定ストラップCをコカンCに通し、折り返してとめます。

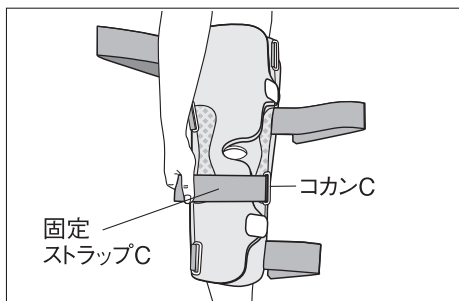


5 固定ストラップBをコカンBに通し、折り返してとめます。

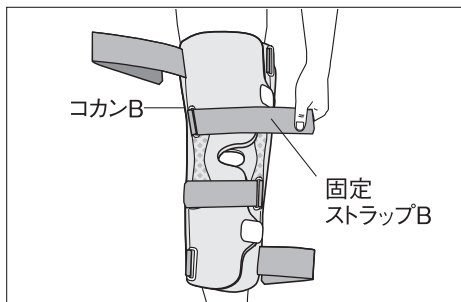

6 固定ストラップAをコカンAに通し、折り返してとめます。

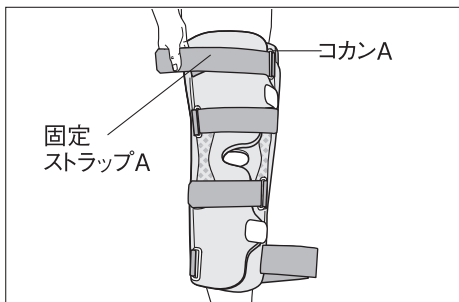

7 固定ストラップDをコカンDに通し、折り返してとめます。

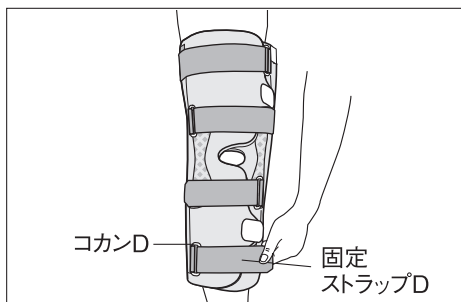


8 本体のゆるみやズレがないか確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。固定ストラップが長い場合は、カットしてください。


装着完了時 (右脚の場合)

ニースプリント伸展タイプ

【前から見た図】

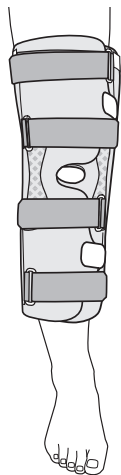


【後ろから見た図】

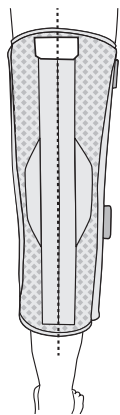


脚の中心と、膝裏ステーの中心が合っている。

【横から見た図】

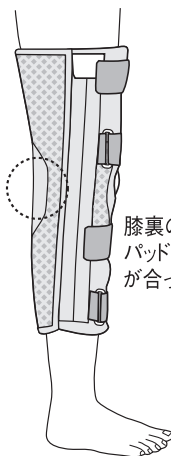

ニースプリント屈曲タイプ

【横から見た図】

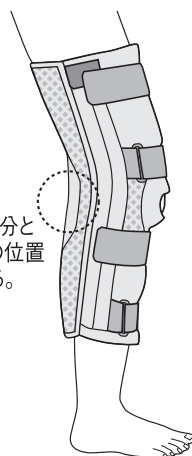


膝裏の凹部分とパッド部分の位置が合っている。

ステーの取り外しについて



警告


洗濯の際に抜いたステーを再度入れ直すときは、ステーの種類、各ステーの上下、表裏を間違えないでください。製品が正しく機能しない場合があります。

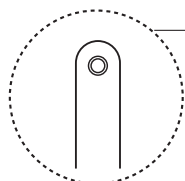

<膝裏ステー>


○印のあるほうが上で表側になります。

ニースプリント 伸展タイプ

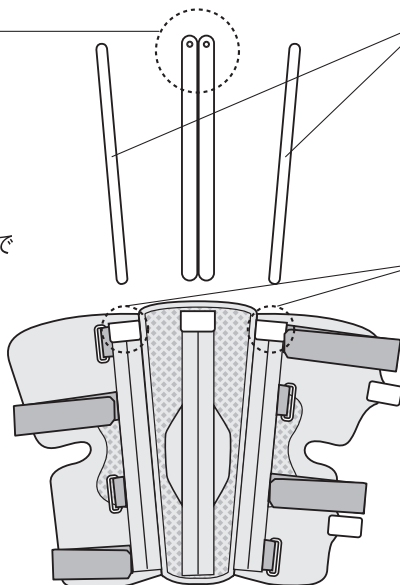


<側面ステー>

上下はありません。側面ステーカバーの形状に沿って差し込んでください。

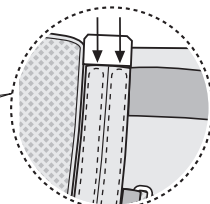

側面ステーカバーのステー差し込み口は2箇所あります。使用状況に合わせてステーの差し込み口を選んでください。(屈曲タイプも同様です。)


<膝裏ステー>

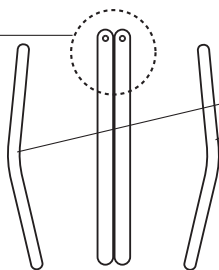

<側面ステー>

上下はありません。本体のカーブに合うように本体に差し込んでください。

ニースプリント 屈曲タイプ

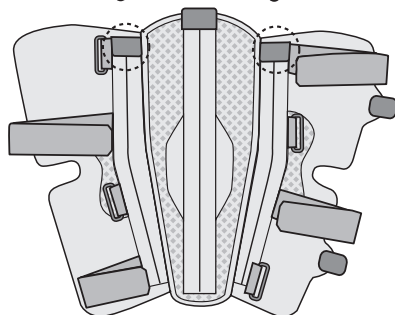

素材

<ニースプリント伸展タイプ/屈曲タイプ>

素材	
繊維	ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
繊維以外	ポリウレタン、ポリアセタール、アルミニウム

※お願い…本品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。


サイズ表

<ニースプリント伸展タイプ>

サイズ	製品丈	適用範囲(大腿周囲)	適用参考値(大腿長)	1箱入数
ショートS	41.5cm	33cm～41cm	19cm以上	1コ
ショートM・L	41.5cm	41cm～53cm	19cm以上	1コ
S	48.5cm	33cm～41cm	26cm以上	1コ
M・L	48.5cm	41cm～53cm	26cm以上	1コ
ロングM・L	52.0cm	41cm～53cm	29cm以上	1コ
ロングLL	52.0cm	53cm～65cm	29cm以上	1コ

<ニースプリント屈曲タイプ>

サイズ	製品丈	適用範囲(大腿周囲)	適用参考値(大腿長)	1箱入数
S	48.5cm	33cm～41cm	26cm以上	1コ
M・L	48.5cm	41cm～53cm	26cm以上	1コ
ロングM・L	52.0cm	41cm～53cm	29cm以上	1コ
ロングLL	52.0cm	53cm～65cm	29cm以上	1コ

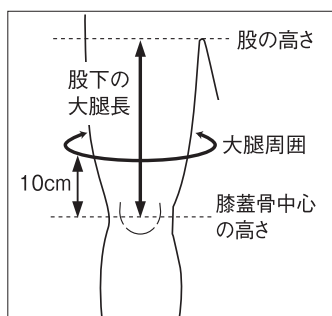

●サイズの選び方

大腿周囲に合わせて選んでください。大腿周囲は膝蓋骨中心から10cm上を計測してください。

製品丈は、股下の大腿長を参考に使用状況に合わせて選んでください。股下の大腿長は膝蓋骨中心から股の高さまでの長さを計測してください。

計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

日本シグマックス株式会社

〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1

お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)

受付時間：9時～17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く

2016.08(改版)
168620