

アクションパッド 取扱説明書

必ずお読みください!!

この度は、アクションパッドをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。皆様に快適にご使用いただき、ご満足いただけますことを、心より願っております。

★お客様登録のお願い★

ご購入の製品を 1～2 週間お使いの上で、この表紙裏にございますアンケートにご回答いただきますと、下記のサービスをお受けできるよう、お客様登録をさせていただきます。

ご購入日から 2 か月を過ぎてもご回答がない場合は、ご登録ができませんのでご注意ください。

アクションパッドの表面のフィルムが破損した場合に
(1) 補修用フィルムを無償で提供いたします
(2) 特別価格にて補修いたします
お電話やホームページなどからお問い合わせください。

生命を包む世界品質

ACTION
JAPAN

アクションパッドアンケート

1週間以上お使いの上でアンケートにご記入ください。

(記入必須項目です)

お名前 (ご記入者名)		ご購入日	年	月	日
ご使用場所	自宅・その他(病院名等) ()	ご記入者の 職種・所属	一般の方・看護師・ヘルパー 訪問看護師・その他()		
ご記入者 ご住所	〒□□□□-□□□□				
お電話番号 () - ()	ご購入 販売店	販売店名:	電話番号:		
		都道府県:	市町村名:		

- (1) ご使用いただいた方は
 20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代
 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上
- (2) 性別は
 男性 女性
- (3) ご使用いただいた期間は 約 ヶ月 日 時間
- (4) ご使用前に床ずれは
 発生していない 発赤があり 軽度の発生 重度の発生
- (5) ご購入いただいた商品は 商品番号# 商品タイプ:
- (6) ご使用目的は
 頭部用 肩～腰用 全身用
 車椅子用 ひじ・かかと用 体位固定用
 トイレ用 その他()
- (7) ご購入のきっかけは
 販売店の勧めで 展示会等で見て 人から勧められて
 インターネットで見ても その他 _____
- (8) 今まで他の床ずれ防止用具をご使用されていませんか?
 使用していた 使用していなかった
- (9) 『使用していた』『併用した』場合のみお答えください。
 使用していた、併用した床ずれ防止用具は
 エアマット ウレタンマット ゲルタイプ
 メーカー名 _____ その他()
- (10) 『使用していた』商品は、どのような問題点がありましたか。
-
- (11) アクションパッドについてお聞きます。
 (他の床ずれ防止用具をご使用になっていた場合はその商品と比較してご記入ください。)
- 圧力分散効果は 大変良い 良い 同じ 悪い 大変悪い
- 蒸れ防止効果は 大変良い 良い 同じ 悪い 大変悪い
- 安定感 大変良い 良い 同じ 悪い 大変悪い
- お手入れのしやすさは 大変良い 良い 同じ 悪い 大変悪い
- 全般的に圧迫障害は 軽減した 現状維持 悪化した
- アクションパッドは 大変満足 満足 普通 悪い 大変悪い
- (12) このアンケートを資料に 掲載してもよい 匿名であれば掲載してもよい

その他アクションパッドについて、ご意見・ご感想がございましたら、どんなことでもお聞かせください。

ご協力ありがとうございました。

★ アクションパッド取扱説明書 ★

必ずお読みの上、大切に保管してください

注意



- 燃やしたり、火を近づけたりしないでください。
- この商品は食べることができませんので、口に入れないようご注意ください。
- 熱湯や消毒液をお使いの際は、使用者と患者様の安全に十分にご注意ください。
- 本品は、介護環境や患者様の身体状態など、すべてのケースで床ずれ防止を保証するものではありません。万一、本品使用中に床ずれが発生・進行したときは、すぐに医師にご相談ください。
- 本書に記載されていないことでご不明な点やご質問等ございましたら、販売店または、アクションジャパン株式会社へお問い合わせください。
- 色や手触りだけを似せた商品が出回っており、多数の苦情が弊社まで寄せられておりますが、これらの商品と弊社とは一切関係がございませんのでご注意ください。

★ 全てのアクションパッドに共通の注意点

1. 直射日光を当てないでください。

直射日光（紫外線）の当たる場所でご使用の際は、必ず専用のカバーかそれに代わるカバーをかけてください。長時間紫外線が当たると、変質を起こすことがあります。

2. 持ち運びにご注意ください。

- ・ 表面フィルム破損の原因となりますので、商品の端を持ったり、つまんで持ち上げたり、引っ張ったりしないでください。(図1)
- ・ 本品を運ぶ際は、下側に手を入れて持ち上げてください。
- ・ シート状の商品は、丸めて持ち上げることができます。(図2)
車いす用などカバー付きの商品は、カバーに入れてお持ちください。



図1



図2

3. 表面フィルムが破れたときは、なるべく早く補修する必要があります。

万一、本品表面フィルムが破れたり穴があいた場合は、汚れが付着したり、破損が広がる原因になります。補修フィルムの送付依頼や補修の方法については販売店または、アクションジャパン株式会社へお問い合わせください。

4. お手入れと消毒について。

本品は、石鹼・洗剤・液状漂白剤などでお手入れができます。

ただし、研磨剤やたわしなど、表面フィルムを傷つけるおそれのあるものを使用しないでください。また、消毒液等に浸け置きすることは避けてください。表面フィルムが変質する可能性があります。

耐熱性は100℃までとなっております。それを超える温度の高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）などは使用しないでください。

5. その他、以下のようなことも破損の原因となりますので、お気をつけください。

- ・折り曲げた状態で圧力をかけたり、保管しないでください。
- ・火や鋭利なものなどを近づけないでください。
- ・後傾（お尻が前にずれた）姿勢など、斜め横の荷重が長時間かかると、表面フィルムの破損につながりますので、やむを得ない場合は、背抜き（一度体を持ち上げて、パッドが変形しないようにお乗りいただく）をしてください。

★ ベッド用アクションパッドの注意点

1. ベッドシーツ（敷き布団カバー）の上に本品を置いてください。

2. クッション性の良すぎるマットレス等と併用される場合は、沈み込むことによってご使用者の動きを制限するだけでなく、体の両サイド等に圧力やずれ力が集中する場合がありますので、ご注意ください。

エアマットとの併用については、さらに注意が必要ですので、販売店または、アクションジャパン株式会社へお問い合わせください。

3. 冬季に冷たいとお感じの場合は、次のような方法で暖めることができます。

- (1) 電気毛布や電気アンカを併用する。（低温火傷にご注意ください）
- (2) 専用カバーの中にタオル等（縦か横に伸縮する素材が望ましい）を入れる。
（過度に厚いものを入れると、本品の圧力分散効果が低下しますので、使用開始初期の冷感を遮断できる必要最小限の厚みに留めてください）

★車いす用アクションパッドの注意点

1. 滑り止めの付いた方が下側になるように置いてください。

(ザラザラした固い面が裏側です。)

警告：滑り止めのある面に座ると、体を動かした時に皮膚が引っ張られる可能性がありますので、決してそのような使い方をしないようにしてください。

注意：椅子などの表面素材によっては、滑り止めが色移りする可能性がありますのでご注意ください。

2. 車いすの高さをしっかりと調整ください。

車いすに座っているときは、体重の多くを臀部で受けることとなりますので、床ずれの危険性が高くなる場合があります。肘や足にも体重が分散されるように、アームサポート（肘置き台）やフットサポート（足乗せ台）の高さを専門家と相談して適切に調整してください。

3. 「冷たさ」や「熱さ」を感じられるときは、下記のとおりご対応ください。

- (1) カバーを外し、断熱シートの有無をご確認ください。(図3～5)
- (2) 断熱材がついていない場合、ゲルクッションの上に#7000断熱シート(別売あり)や薄手のタオル等を入れてください。(図6)

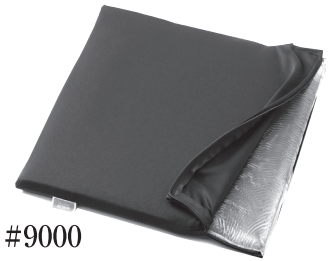


図3 #9000

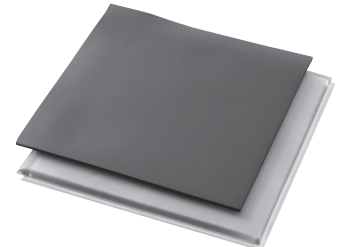


図4 #7000(断熱シート付)

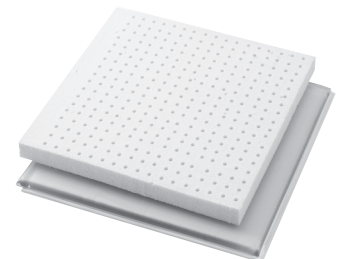


図5 #7500(断熱シート付)



図6

★その他のアクションパッドの注意点

1. 適切なカバーをご用意ください。

アクションパッドは、ベッド用や車いす用商品などを除いて様々な形状がありますが、これらは使用目的が異なるなどの理由から標準カバーをご用意していません。

表面フィルムと皮膚が直接密着すると、汗や薬液による粘着作用で、表皮剥離の危険性があります。本品が皮膚と直接密着しないよう適切なカバーをお使いください。

カバー生地によっては圧力やずれ力の分散能力が低下しますので、下記の条件に当てはまるカバーをお勧めいたします。

- (1) 縦か横の両方、またはいずれかに伸びる生地
- (2) 手の甲を滑らせてザラザラ感がない生地
- (3) ムレ防止のため、通気性のある生地

※余った生地をパッドの下側などに巻き込むと、生地が張ってしまい圧力やずれ力の分散能力が落ちますので、上に被せる程度にしてください。

2. 本品の頭部用やかかと用は、患者に合った大きさのものを、正しい位置に置くようにご注意ください。特に顔面にお使いの場合は、目や鼻などにパッドがかからないようにしてください。

また、馬蹄型やドーナツ型を頭部に使用する場合は、耳介にかからないようにご注意ください。馬蹄型やドーナツ型は、平状のタイプと比べて接触面積が小さくなるために、部分的に圧力が高くなることや、空洞部分に向かって皮膚が引っ張られることがありますので特にご注意ください。

3. 体位保持をする際、下記のような場合には皮膚に多大のずれ力が生じることがあります。ずれ力が加わった（皮膚が引っ張られた）状態では、通常よりも小さな圧力、短い時間で床ずれの発生リスクが増しますのでご注意ください。

- (1) 側臥位（横向き）のように左右に傾斜がかかった体位
- (2) 頭部や脚部など体の一部を持ち上げた体位
- (3) 患者を一度寝かせてから、下方向などにずらした場合
- (4) 基本体位をとってから、他の体位保持具などを差し込んだ場合

これらは一例ですが、本品を使用していない部位も含めて、皮膚が引っ張られていないかご確認ください。体位を保持した後は、定期的に頭部、上肢、体幹、下肢など部位ごとに背抜きと同様の作業を行うことをお勧めします。

4. 電気毛布をご使用の際は、下記の点にご確認ください。

- (1) 電気毛布の上に本品を敷いてください。
- (2) 本品上部の温度は、電気毛布の設定温度よりもやや低くなります。
- (3) 本品と体が直接接触していると、条件によっては本品の一部分に熱がこもるホットポイント現象が発生し、低温火傷の原因となることがありますので、必ずカバーをお使いください。
- (4) 本品の表面温度をご希望の温度になるまで時間がかかることがあります。

5. 汚れた場合は、丸洗いをするか消毒液などで清拭をしてください。化学的殺菌・紫外線殺菌等は変質することがありますのでお避けください。

表面フィルムが破損した場合は、破れた内側まで消毒を行い乾燥させた後で、補修フィルムで補修してください。

補修フィルムについては、販売店またはアクションジャパン株式会社にお問い合わせください。

その他、使用方法や床ずれ・介護についてご質問等がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。

輸入総代理店／発売元

アクションジャパン株式会社

〒658-0046 神戸市東灘区御影本町2丁目9-16

アクションジャパンビル

TEL.078-843-5417 FAX.078-843-6817

アクションジャパン

検索



商品に関するお問い合わせは、弊社ホームページまで→

ActionPad 用断熱シート

ト ッ プ
7000TOP

品名 : 7000^{トップ}TOP

品番 : #7000TOP

JANコード : 4560184161042

素材 : 特殊ポリウレタンフォーム(イノアックコーポレーション社製 SlimFlex)

サイズ : 38cm × 38cm × 0.4cm 重量 : 約120g

【ご使用方法】

・アクションパッド#7000の付属品断熱シートとしてご使用ください。

(アクションパッド#9000 #903838 にもご使用いただけます。)

・当製品には「表」「裏」があります。 摩擦に強く、防水性に優れた面をカバー側に、追従性に優れた面をゲル側にしてカバーへ挿入してください。

「製品貼り付けのシールでご確認ください」

・汚れた際は、水・中性洗剤による清拭又は手洗いをお勧めします。

・殺菌消毒は、エタノール又は弊社高性能除菌剤「クラスゼロ・アルティ」(水成二酸化塩素水)をご使用ください。 *UV 殺菌・オートクレーブ処理はできません。
次亜塩素酸 Na の使用は変色が危惧されますので、お勧めいたしません。

・日陰干し後、水気を完全に飛ばした後にご使用ください。

発売元

アクション ジャパン 株式会社

〒658-0046 神戸市東灘区御影本町2丁目9-16

アクションジャパンビル

TEL.078-843-5417 FAX.078-843-6817

アクションジャパン

検索



ActionPad 用断熱シート

ト ッ プ
7500TOP

品名 : 7500^{トップ}TOP

品番 : #7500TOP

JANコード : 4560184161059

素材 : 天然ラテックスフォーム100%

サイズ : 40cm × 40cm × 2.6cm 重量 : 約380g

【ご使用方法】

- ・アクションパッド#7500 の付属品断熱シートとしてご使用ください。
- ・必ずカバーに入れてご使用下さい。
- ・水洗いできません。(洗濯機の使用不可) 汚染除去の為、どうしても洗浄が必要となった場合、極力優しく押し洗いしてください。
- ・濡れた際は、絞ったりせず、厚手のタオル等を押し当てて水分を吸い取り、風通しの良い*日陰で乾燥させてください。 *紫外線に弱い素材です
- ・天然ゴムの特徴である抗菌作用が低下しますので、次亜塩素酸ナトリウムやエタノールでの殺菌はおやめください。
- ・白い粉末状のものが多く見られたり、割れたりした場合は交換時期です。

発売元

アクション ジャパン 株式会社

〒658-0046 神戸市東灘区御影本町2丁目9-16

アクションジャパンビル

TEL.078-843-5417 FAX.078-843-6817

アクションジャパン

検索

