

ビーアイシー使い捨て駆血帯 (KIDS用)

取扱説明書




ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。



使用説明




①

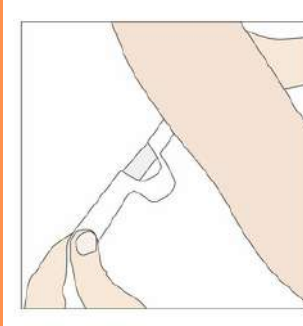

ストラップの印刷されていない面を患者の腕に当てます。

②

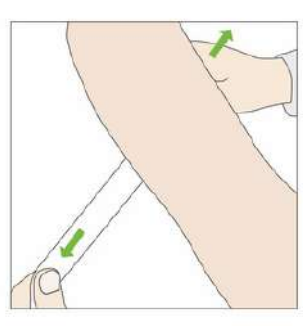

駆血力を強めるため完全に伸ばしてください。

③



しっかりと腕に巻いてマジックテープ面で固定します。
(60秒以内に解除してください)

④




ストラップを引っ張って解除してください。

欠陥や故障がある場合は製品の使用を中止し、製造販売元に連絡してください。



構造

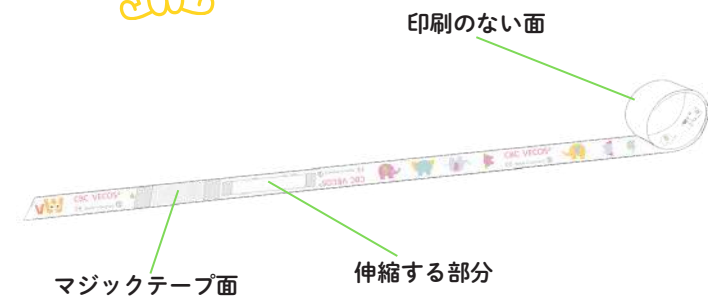

院内感染を防ぐために、使用後は廃棄規定に従って廃棄してください。
製品についてお気づきの点やご質問がございましたら、弊社までお問い合わせください。

製品情報



- 製品コード : BIC-521003013
- JANコード:4582645180317
- 製品名:ビーアイシー使い捨て駆血帯 (KIDS用)
- サイズ : 幅 3cm×長さ 50cm
- 入数 : 1箱 (125個入り)



brighten your care
colorful medical supplies for happier hospital!



Contact Us

【販売元・問い合わせ先】

ビーアイシーグループ株式会社

ビーアイシーメディカル事業部

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル

TEL : 03-6269-9120 FAX : 03-6269-9118

E: contact@bicmedical.com HP: bicmedical.com

BIC MEDICAL

使い捨て駆血帯 子供用

院内感染のリスクを軽減、柔らかい素材で安心



鮮やかな彩りで医療を明るく
安全でやさしい駆血帯

ビーアイシー 使い捨て駆血帯 が選ばれる理由



☆衛生的

- ・ 単回使用で細菌の伝播を防ぎ、院内感染のリスクを軽減
- ・ 単回使用なので消毒の手間が不要

☆やさしい

- ・ 皮膚の巻き込みや強い圧迫感がない
- ・ 患者にとって心地よい感触

☆簡単

- ・ マジックテープ仕様のため、簡単に圧迫・取り外しが可能
- ・ 伸縮性があるため、簡単に圧の調整が可能

☆安全

- ・ ラテックスフリー、シリコンフリー、DEHP(フタル酸エステル)フリー
- ・ 熱と湿気への高い耐久性

