



# ソルボ スーパーシート 衝撃吸収アンダーインソール

**ソルボセインが衝撃を吸収、  
足のトラブルをやわらげます。**

お手持ちのシューズについている  
インソールの下に入れるだけ

靴のサイズ調節にも。  
足のフィット性アップ!



**フル  
インソール  
タイプ**

からだを守る人工筋肉「ソルボセイン」

●当社実験・TVCFより ●絶対にマネしないで下さい。



## ソルボスーパーシート 衝撃吸収アンダーインソール

お手持ちのシューズに手軽に敷ける  
**わずか2mmの厚みで、衝撃を吸収!!**

- 足のトラブルを軽減
- ヒールストライクを緩和
- せん断やネジレの力を吸収
- スパイクの突き上げ緩和
- 靴のフィット性アップ

### ソルボスーパーシートの使い方

- 靴にあったサイズを選んで下さい。
  - 使用する靴のインソールを取り外す。
  - ソルボスーパーシートのフィルム面を上にして、左右を確認する。
  - 取り出したインソールの大きさに合わせて、ソルボスーパーシートをハサミでカットする。又は、中台紙のサイズラインに沿ってカットする。
  - PUフィルム面の剥離紙(黄色)をはがし、ソルボスーパーシートのかかとを、靴のヒール部にキッチリ合わせて敷く。
  - 靴のインソールをその上に敷く。
- ※靴にインソールが接着されている場合は他のソルボインソールをご使用下さい。



**使用上の注意** ●痛み・かぶれ・違和感を感じた場合はご使用をおやめ下さい。

**取扱い方法** ●汚れなどにより、はずれやすくなった場合は、石けん水で軽く洗って陰干しして下さい。もみ洗いはしないで下さい。  
●折り曲げたりねじったりしないで下さい。破損の原因となります。  
●ソルボセインは粘弾性化合物ですので多少のベタつきがあります。

### SORBOTHANE からだを守る人工筋肉「ソルボセイン」

人間の筋肉は衝撃に対してすばやく変形し、ゆっくり復元して衝撃を吸収し、圧力を分散します。「ソルボセイン」はその筋肉の特性をもった特殊な衝撃吸収素材です。\*人間の筋肉そのものを代替するものではありません。



**ソルボセイン** 圧力を均一に分散、あたりが非常にソフトで、下からの衝撃も感じません。  
**スポンジ** フワフワしているだけで、圧力は分散されずにつぶれてしまい、あたりを感じます。

**抗菌衛生** ソルボセインは抗菌性に優れ、バクテリア等の菌の増殖を抑える衛生的な素材です。(財団法人日本化学繊維検査協会調べ 抗菌性試験JIS 22801に基づく)

**衝撃吸収** **圧力分散** **SIAA** 防カビ加工 JP0512263A0001V

品質表示 本体：ポリウレタン樹脂 (ソルボセイン) MADE IN JAPAN 日本製 袋：PP 中台紙

製造元：三進興産株式会社 東京/東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー TEL03(5338)8590 FAX03(5338)8599 F169-0074  
http://www.sorbo-japan.com/ 大阪/大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー-23F TEL06(4707)2371 FAX06(4707)2399 F530-0005  
ソルボ® ソルボセイン®は三進興産(株)の登録商標です。