



マイスコファンシースクリーン (メディカルクロススクリーン) 組立説明書 独立型 (単体) ・ 増結型 (増連)

このたびは、当社製品をお買い求めいただきまして、ありがとうございます。
ご使用前に説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。また、説明書は大切に保管して下さい。

■型番

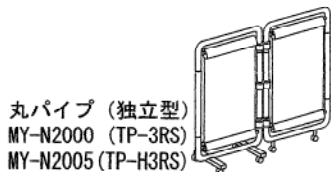

丸パイプ (増結型)
MY-N2001 (TP-3R)
MY-N2006 (TP-H3R)

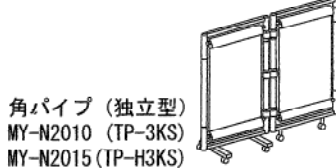

角パイプ (増結型)
MY-N2011 (TP-3K)
MY-N2016 (TP-H3K)

■梱包内容

	丸パイプ (独立型)	丸パイプ (増結型)	角パイプ (独立型)	角パイプ (増連型)
A 上フレーム	(1組)	(1組)	(1組)	(1組)
B 下フレーム	(1組)	(1組)	(1組)	(1組)
C サイドフレーム	(2本)	(2本)	(2本)	(2本)
D クロス	(1枚)	(1枚)	(1枚)	(1枚)
E 脚	(2個)		(2個)	
F ボルト	(2組)		(2組)	
G レンチ	(1個)		(1個)	
H ジョイナー		(3個)		(3個)

■組立手順 (説明図は、丸パイプタイプですが、角パイプタイプも同様に組立てて下さい。)

①

- この作業は独立型のみ行います。
- 増連型を組立てる場合は事前に独立型を1台組立てて下さい。
- 保護用のポリ袋に入っている場合は、それらを全部取り除いて下さい。
- [独立型のみ]…下フレームに脚をボルトで取り付けて自立させて下さい。(ボルトは付属のレンチでしっかり締め付けて下さい。(2組))
- なお、脚は、完成後、使用中でも点検して、取り付けがゆるんでいる場合は付属のレンチで締め付けて下さい。

下フレーム
脚
ボルト
レンチ

②

- この作業は独立型も増連型も同様に行います。(説明図は、独立型ですが、増結型も同様に組み立てて下さい。)
- 下フレームにサイドフレームを差込んで下さい。(2本)
- サイドフレームに上フレームを差込んで下さい。

上フレーム
サイドフレーム
下フレーム

③

- この作業は増結型のみ行います。(なお、事前に独立型を1台組立てて下さい。)
- [増結型]…図の様にキャスターのせまい側が独立型側に寄る様、方向に注意してジョイナーで独立型と連結して下さい。(3個)
- 逆方向に連結すると折りたたみが出来ません。
- ジョイナーは図の位置に取付けて下さい。

独立型
増結型
ジョイナー
せまい
キャスター
ひろい

④

- この作業は独立型も増連型も同様に行います。(説明図は、独立型ですが増結型も同様に組み立てて下さい。)
- 上下のフレームからカーテン棒を外して下さい。(2本)(カーテン棒はバナ式で、「長い内パイプ」側にスライドさせると取外せます。)
- 上部のカーテン棒をクロスの縫製部を通して、再び上フレームに取付けて下さい。(クロスには上下はありません。)(カーテン棒は「長い内パイプ」の方から先にフレームの穴に取付けて下さい。)
- 同様に下部のカーテン棒にクロスを通して、再び下フレームに取付けて下さい。

カーテン棒
長い内パイプ