

バストバンド・エース

Bustband-Ace

胸部固定帯
Rib Fixer Band

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常にこの取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。


警告

- 本品は化学繊維の素材を使用しています。ご使用によりカブレ、発赤等、何らかの不具合が発生した場合には直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

注意


- 装着に際しては必ず医師の指導に従ってください。
- 面ファスナーを着衣に引っ掛けられないようご注意ください。

各部の名称

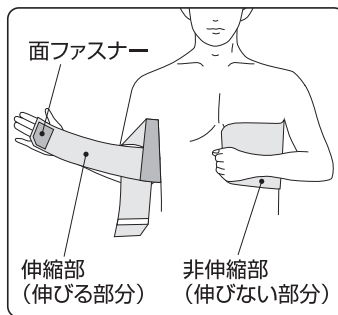

使用方法

- 本体の伸縮しない部分を患部にあて、息を吐いた状態で伸縮する部分を適度な強さで引っ張り固定してください。
- 伸縮する部分は2分割されていますが、最初に下側の方を止め、次に上側を止めてください。

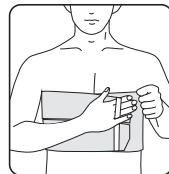

洗濯方法

- 30℃以下の水で中性洗剤を使用し、手洗いしてください。
- 漂白剤、アイロン、乾燥機の使用やドライクリーニングは避けてください。
- 洗濯後の乾燥は、陰干しにしてください。

お客様相談室 ☎ 0120-770175
www.alcare.co.jp