

バストバンド・レディ

Bustband-Lady

胸部固定帯
Rib Fixer Band

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常にこの取扱説明書をお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175
www.alcare.co.jp

使用上のご注意

*【使用上のご注意】では、その危険度に応じて次の区分をしております。

△ 警告……人身事故につながるおそれのある注意事項
注 意……物損事故につながるおそれのある注意事項

警告

- 本品は化学繊維の素材を使用しています。
- ご使用によりカブレ、発赤等、何らかの不具合が発生した場合には直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

注意



- 装着に際しては必ず医師の指導に従ってください。
- 面ファスナーを着衣に引っ掛けないようにご注意ください。

洗濯方法

- 30°C以下の水で中性洗剤を使用し、手洗いしてください。
- 漂白剤、アイロン、乾燥機の使用やドライクリーニングは避けてください。
- 洗濯後の乾燥は陰干しにしてください。

使用方法

- 製品の上下を確かめてください。(面ファスナーとサイズ札が右側に来るようにします)
- 伸縮部を背中にあて、息を吐いた状態で、両端を適度な強さで引っ張り固定してください。

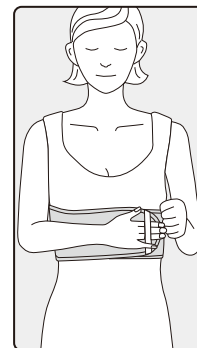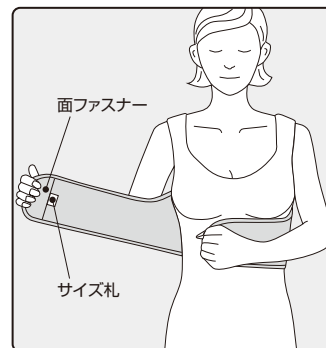

種類と規格

種類	商品コードNo.	規格		1箱入数
		アンダーバスト	長さ×幅(背部)×幅(前部)	
L	16841	86~101cm	110cm×18cm×10cm	1コ
M	16842	73~88cm	95cm×18cm×10cm	1コ
S	16843	60~75cm	87cm×18cm×10cm	1コ

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp