


排尿方法

排尿口のレバーを下まで下げると排尿できます。排尿後はレバーを上まで戻してください。

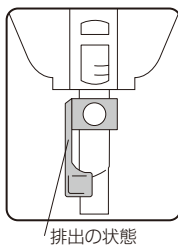

洗浄方法

毎日水洗いし、直射日光や強い熱を避け、陰干しにて乾燥してください。

規格

種類	商品コードNo.	規格 (容量)	1函入数
—	15371	500mL	5枚

for Best Care **ALCARE**

ユーケア[®]レッグバッグ Youcare Legbag

ウリナリーパウチ用レッグバッグ
Legbag for Urinary Pouch

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175
(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30)
www.alcare.co.jp

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸 1-2-1 アルカセントラル 19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800 (代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

はじめに

《ユーケアレッグバッグ》は、ウリナリーパウチ用のレッグバッグです。安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせずこの取扱説明書に従いご使用ください。

使用上のご注意

- 付属のベルトには天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 《ユーケアレッグバッグ》には容量の目盛りが表示されていますが、あくまでも目安です。正確な量を測定する際には、《ユーケアレッグバッグ》の目盛りは使用せず、別途計量器を使用してください。
- ご使用の際は、下部の排尿口が閉じていることを確認してください。排尿口が閉じていないと尿モレが起こります。
- ベルトはきつく締めすぎないでください(うっ血を起こさない程度)。
- コネクターチューブの長さを調整する場合は座った状態で行ってください。立った状態で長さを調整すると座った際に短くなり、チューブ外れなどによる尿モレの原因となります。
- 付属のコネクターチューブは当社のウリナリーパウチ専用です。当社以外のウリナリーパウチには接続できません。無理に接続した場合、尿モレの原因となります。
- ウリナリーパウチの接続は、パウチ内の尿がモレないようあらかじめ排尿し、空にしておくか排尿口を上に向け行ってください。

保管上のご注意


- 室温で保管し、高温多湿や直射日光があたる場所は避けてください。品質劣化の原因となります。

廃棄上のご注意



《ユーケアレッグバッグ》は通常「燃えないゴミ」の扱いですが、地域により異なる場合もありますので、詳しくは各自治体へご確認ください。

装着方法

- ① ベルトの緑色の面が表になるようにレッグバッグに通します。
(ベルトの裏地がゴム状で、ずり落ちを防止します。レッグバッグ上下の管が押さえられ、密着されます。)

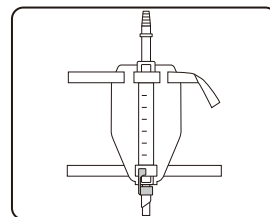


- ② 下部の排尿口が閉じていることを確認し、レッグバッグの不織布面と肌が接するように、ベルトの面ファスナーで装着します。

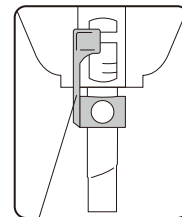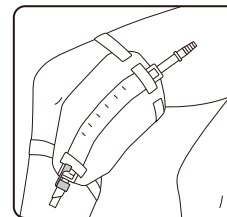


閉じている状態

- ③ 座った状態で、ウリナリーパウチと接続するコネクターチューブの長さをハサミを用いて調整します。

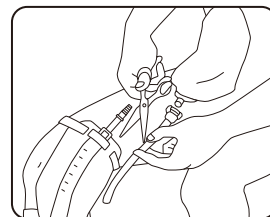

- ④ レッグバッグの上部にコネクターチューブを接続します。
なるべく奥まで差し込んでください。

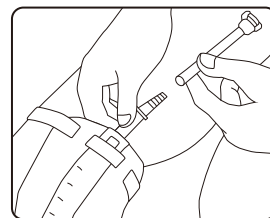

- ⑤ ウリナリーパウチの排尿口を上に向けた状態で、コネクターチューブのコネクター部を排尿口へ「カチッ」と音がするまで強く押し込みます。

