

## 保管上のご注意

- 直射日光および高温多湿を避けて、室温保管してください。
- 使用後はよく乾かし、箱・内袋に入れて風通しの良い場所に保管してください。
- 本体および箱の上に重いものを載せないでください。(変形・破損の原因となります)

## 取扱上のご注意

### 洗濯方法

- カバーおよび本体が汚れた場合は、下記の方法で洗濯することができます。(本体のサポートフレームは水洗いできません。汚れた場合はぬらした布などで拭き、陰干してください)
- 30°C以下の水で中性洗剤を使用し、手洗いしてください。
- 熱湯・静電気防止剤・塩素系漂白剤の使用およびドライクリーニングは絶対に避けてください。(色の異なるものとは分けて洗濯してください)
- 洗濯後は形が崩れないように、平らで風通しの良い場所で陰干してください。
- 乾燥させるときは、直射日光やストーブの近くは避け、アイロンや乾燥機は絶対に使用しないでください。(直射日光での天日干しは、本体のウレタンフォームの劣化となるため避けてください)
- 長期間の使用や汚れ、洗濯の繰り返しにより、カバー表面の撥水性が低下することがあります。

### 廃棄方法

- 本製品の各パーツは素材が異なります。(素材名は中面「本品の構造」に記載)廃棄する場合は各自治体の分別方法に従ってください。

### 修理について

- 本品の構造上、修理はできませんので予めご了承ください。(カバーは別売もご用意しております)

## 種類と規格

### リフレア

| 種類          | 商品コードNo. | 規格                      |       | 1函入数 |
|-------------|----------|-------------------------|-------|------|
|             |          | 厚さ×縦×横                  | 重量    |      |
| スカイブルー標準サイズ | 17631    | 7.5cm(後側10cm)×39cm×39cm | 0.5kg | 1枚   |

### 【別売部品】高通气カバー

| 種類           | 商品コードNo. | 規格                      |  | 1函入数 |
|--------------|----------|-------------------------|--|------|
|              |          | 厚さ×縦×横                  |  |      |
| スカイブルー標準サイズ用 | 17641    | 7.5cm(後側10cm)×39cm×39cm |  | 1枚   |

**ALCARE**

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825  
[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

1602-2

for Best Care **ALCARE**

# リフレア® Refrair

高通气性車いすクッション  
Highly Ventilated Wheelchair-Cushion

スカイ  
ブルー

## 取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175  
[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)


## はじめに

《リフレア》は、車いすに座る際の体圧の分散とムレを低減することを目的とした車いすクッションです。安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従ってご使用ください。

## 本品の構造

弾性の異なる3種類の素材の組み合わせにより、的確に体圧を分散します。

### 本体:立体トリプル構造

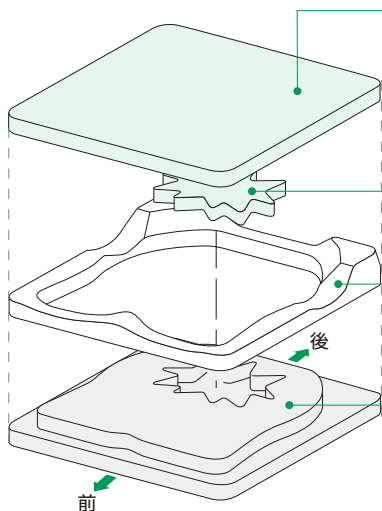


トップパッド  
高通気・低反発ウレタンフォーム  
ムレを防ぎ、臀部にびったりフィットしてやさしく支えます。

メイプルパッド  
高通気・低反発ウレタンフォーム  
かえで型のパッドと、弾性の違うベースパッドの組み合わせで、局所にかかる圧力をなめらかに分散します。

サポートフレーム  
ビーズ発泡ポリエチレン  
骨盤や臀部を安定させて正しい姿勢を保ち、前方へのすり落ちを防ぎます。

ベースパッド  
高通気・高弾性ウレタンフォーム  
ムレを防ぎ、高いクッション性で座面全体をしっかり支えます。

### カバー

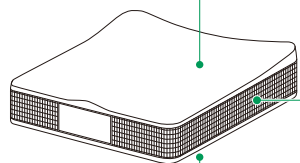

トップカバー  
高通気・撥水抗菌加工ポリエステルニット  
ムレを防ぎ、快適な座り心地を保ちます。

サイドメッシュ  
軟質ポリプロピレン樹脂  
クッション内部の空気を外に逃がし、ムレを防ぎます。

ベースカバー  
ウレタン樹脂コーティングポリエステル布  
すべりにくい素材で、クッション自体のすり落ちを防ぎます。

## 使用上のご注意

\*【使用上のご注意】では、その危険度に応じて次の区分をしております。

△警告……人身事故につながるおそれのある注意事項

注 意……物損事故につながるおそれのある注意事項

### 警告

- 使用中に痛みやしびれが出た場合は使用を中止してください。
- カバーの着座部分は、化繊を使用しておりますので本品の使用によりかぶれなど何らかの異常が発生した場合には使用を中止してください。

### 注意

- ファスナーを着衣に引っかけないようご注意ください。
- 商品を袋から出すときや使用するときは、爪等の硬いもので座面を引っかけないように注意してください。指先の肌荒れや伸びた爪等で伝線する場合がありますので、必要に応じて手袋を着用していただくなど、お取り扱いには十分ご注意ください。

## 使用方法

- 前後に注意し、座席に置いてご使用ください。(カバーにある「前」表記が車いす座面の前面となるように置いてください)

- 本品の上には何もかけないでください。(体圧の分散の効果が発揮しにくくなります。また、ズレの原因にもなります)

- 本品は、体圧の分散・ムレを低減することを目的としていますが、使用者の活動性・身長・体重等により、その効果およびその耐用年数が異なります。

