

ご使用前に

- 本品の適応範囲は、表の通りとなっています。装着するサイズを確認のうえご使用ください。甲周囲は、図のように足首のつけね（足関節）から足先方向に約5cmの所の周径を測ってください。

ご使用中に


- 長期の使用により本体および各部品の破損、または保管使用状況により劣化が早まる場合があります。破損および劣化した場合は使用を中止してください。そのまま使用すると確実な支持性が得られない可能性があります。
- 使用中にズレ、ゆるみが発生したら正しく装着し直してください。ズレ、ゆるみがあると確実な支持性が得られません。

種類と規格

種類	適応範囲	
	甲周囲	足長
LL	27.5~29.5cm	28.5~30.5cm
L	25.0~27.5cm	26.5~28.5cm
M	22.5~25.0cm	24.5~26.5cm
S	20.0~22.5cm	22.5~24.5cm

※甲周囲を基準としてサイズをお選びください。足長は目安としてください。
※適応範囲が、両方のサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

*甲周囲の測定部位

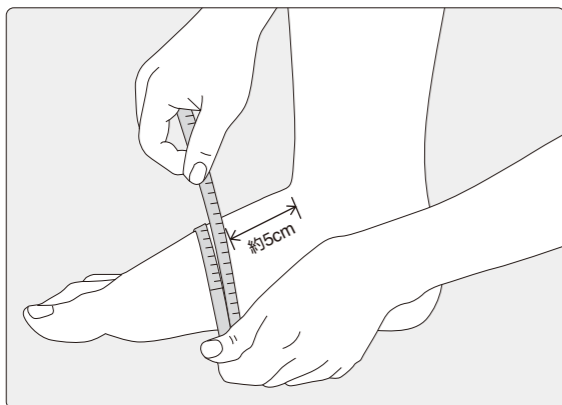

洗濯方法

- 洗濯は水温を30°C以下とし、中性洗剤を使用し軽く押し洗いしてください。
- 乾燥は陰干し、直射日光に当たらないようにしてください。

組成・成分

- ナイロン
- ポリエステル
- ポリウレタン
- ポリエステル(ステー)

廃棄方法

- 上記組成・成分に関する各自治体の判別方法に従ってください。

for Best Care **ALCARE**

アングルソフト Anklesoft

足関節動揺制限付サポーター
Ankle Supporter for Ligament

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175
(土・日・祝日を除く 午前9:00~午後5:30)
www.alcare.co.jp

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

はじめに

《アンクルソフト》は、テーピング理論を取り入れ、足関節の不安定性を低減することを目的に開発されたサポーターです。

安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせずこの取扱説明書に従いご使用ください。ご使用に際しては必ず医師の指導に従ってください。

使用上のご注意

*[使用上のご注意]では、その危険度に応じて次の区分をしております。

警告… 人身事故につながるおそれのある注意事項

注意… 物損事故につながるおそれのある注意事項


警告

- 本品の使用に際しては、必ず医師の指導を受けてください。また、本品の使用により痛み等の異常が感じられた場合には、使用を中止し医師にご相談ください。
- 本品は、化繊の素材を使用しています。使用により肌に異常が現れたときは、使用を中止し医師にご相談ください。
- 本体生地、クロスベルトの締め付けすぎにご注意ください。血行の阻害やしびれの原因となります。
- 本品のステータにはプラスチックを使用しています。露出したり、破損した場合は、直ちに使用を中止してください。破損状態によっては破片によりケガをする可能性がありますので、取扱いには十分にご注意ください。
- 本品の過度な使用は性能低下の原因となります。1名の患者に使用を終えた本品は他の患者への使用を含めて再使用しないでください。繰り返し使用する事で面ファスナーの留めが弱まり外れる等事故の原因となる可能性があります。

注意


- ストッキングや靴下を履いたうえで本品を装着する場合は、面ファスナーでストッキング等を引っかけないよう、ご注意ください。
- 洗濯での漂白剤、乾燥機の使用、アイロン、ドライクリーニングは避けてください。本体生地やクロスベルトおよびステータの劣化の原因となります。
- 保管に際しては水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて、室温保管してください。

各部の名称

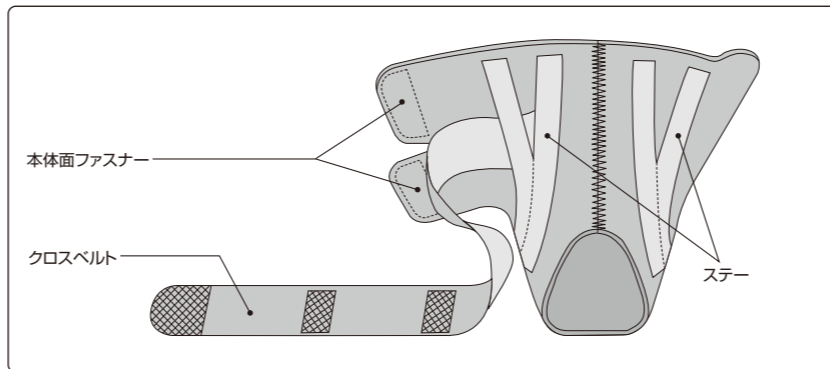


使用手順


1 装着に際して本体面ファスナー、クロスベルトの面ファスナーをはずしておきます。

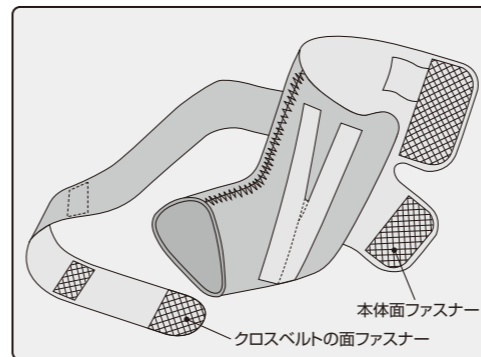


2 取扱表示のついている方を肌側にし、本体に足を入れステータの中心が足のほぼ真横にくるようにします。

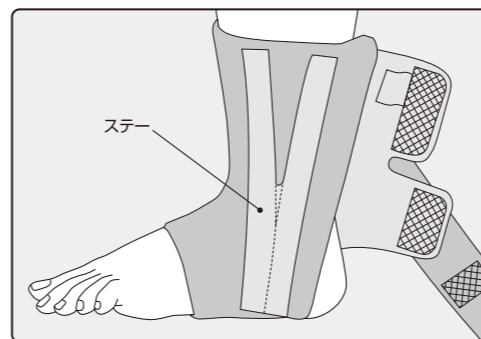

3 本体面ファスナーの2ヶ所を止めます。
(本体上部のタブを持つとシワがよらず装着できます。)

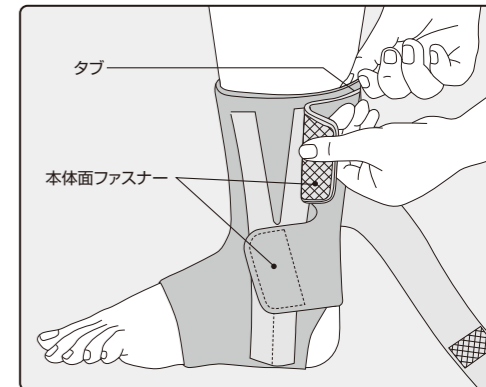

4 クロスベルトを図のように足背部で交叉するよう8の字に止めます。
(クロスベルトの面ファスナーを本体にしっかりと止めてください。)

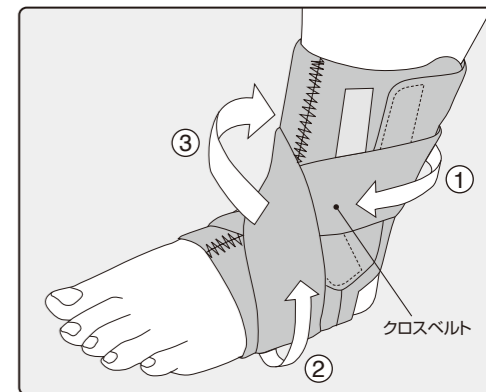

警告

- 本体生地、クロスベルトの締め付けすぎにご注意ください。血行の阻害やしびれの原因となります。