


取扱上のご注意

- ご使用前に
- 本品の適応範囲は、下記の表の通りとなっています。装着される方のサイズを確認のうえ、ご使用ください。桁(隆椎から尺骨頭)を基準に選定し、身長はあくまでも目安としてください。

適応範囲	
桁(隆椎～尺骨頭)	身長
65～90cm	145～185cm

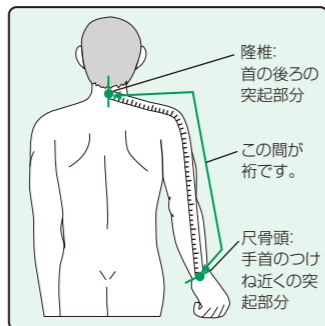

- ご使用中に
- 何らかの原因で、本体および各部品が破損した場合は直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると肩関節の確実な保持性が得られず、症状を悪化させる危険がありますので十分ご注意ください。
 - 使用中にズレ、ゆるみが発生したら直ちに正しく装着し直してください。ズレやゆるみがあると、確実な保持性が得られず、症状を悪化させる危険がありますので十分ご注意ください。

洗濯方法

- 30℃以下の水で中性洗剤を使用し、手洗いしてください。
- 漂白剤、乾燥機の使用、アイロン、ドライクリーニングは避けてください。

ÄLCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

for Best Care ÄLCARE

ニューアームサスペンダー New Arm Suspender

腕つり

Arm sling

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175

www.alcare.co.jp

はじめに

《ニューアームサスペンダー》は、骨折、片麻痺等での腕つりを用途、目的として開発されています。安全にご使用いただくため、用途以外の使用はせずこの取扱説明書に従ってご使用ください。

使用上のご注意

※[使用上のご注意]では、その危険度に応じて次の区分をしております。

- △ 警告…人身事故につながるおそれのある注意事項
- 注 意…物損事故につながるおそれのある注意事項


警告

- 本品の使用に際しては、必ず医師の指導に基づいてご使用ください。
また本品の使用により、しびれ、痛み等の異常が感じられた場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談し、その指示に従ってください。
- 面ファスナーのA面とB面をしっかりと密着してください。密着が悪いと、使用中にベルトから本体の袋部分がはずれるおそれがあります。
- 連結部のプラスチックバックル(「各部の名称」をご参照ください)は、しっかりと差し込んでおいてください。はめ込みが悪いと、使用中に本体の袋部分が落下するおそれがあります。
- 各ベルトは必ず適切な長さで使用してください。ゆるみがあると、確実な保持性が得られず、症状を悪化させる危険がありますので十分ご注意ください。
- 本品には化学繊維を使用していますので、アレルギー症等の方は使用に先立ち医師とご相談ください。また、使用により肌に異常が現れたときは、直ちに使用を中止し、医師に相談し、その指示に従ってください。
- 使用時はプラスチックバックルに、絶対に触れないでください。
フックがはずれるおそれがあります。

注意


- ベルト部の面ファスナーを着衣に引っかかないよう、ご注意ください。

各部の名称

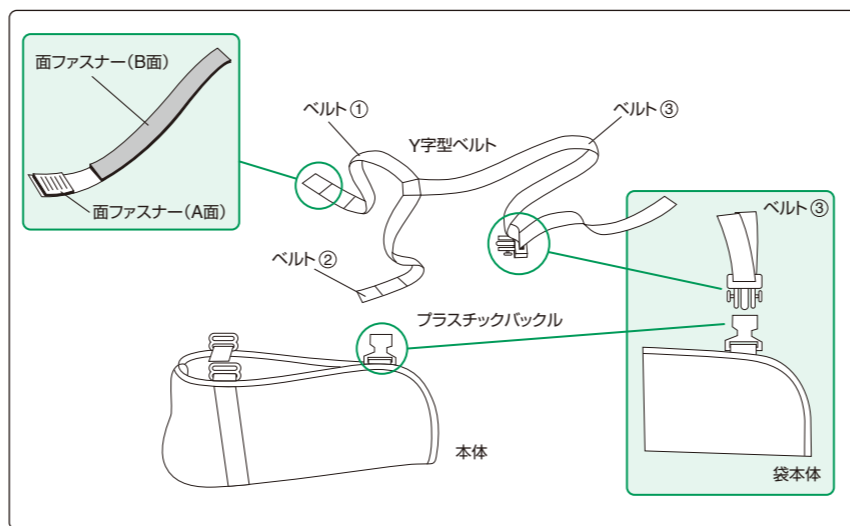

使用方法

- ① Y字型ベルト(ベルト①および②)の面ファスナー2ヶ所を内側(腕側)から外側に向かって、それぞれ本体についているリングに通します。

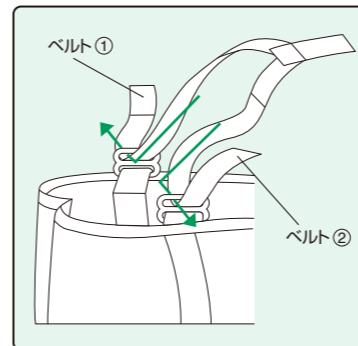


- ② ベルト①および②の面ファスナーのA面とB面をしっかりと貼り合わせます。


※装着したときに、面ファスナーが直接肌に触れていたら、ベルトがねじれています。ねじれを直してベルトを袋の内側から外側に向かって入れ直してください。

- ③ 2ヶ所の面ファスナーを確実に貼り合わせた後、患側の腕をベルト①とベルト②の間に、肩に掛けてください。


※◇の部分に肘を合わせます。

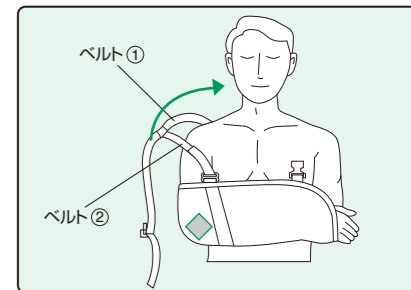

- ④ 他方の手でベルト③を矢印の向きにそって、患側の肩から首の後ろへまわします。

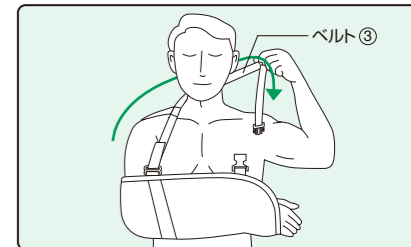

- ⑤ ベルト③のプラスチックバックルを、本体側のプラスチックバックルへカチッと音がするまで差し込み、しっかりと差し込んであるか確認してください。

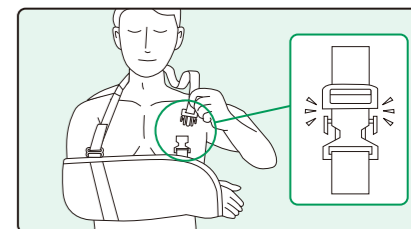

- ⑥ 各ベルトの調整をしてください。(各ベルトは、きちんと貼った状態で使用してください)

- 患側の肘を上下させたい場合…面ファスナーを再度貼り付け直してください。
- 患側の手首を上げたい場合…ベルト③の先端を引き上げてください。
- 患側の手首を下げたい場合…プラスチックバックルのベルト通し部分をゆるめ、長さを調節してください。