

プロケア®パウダー Procure Powder

カラヤ・柑橘ペクチン系パウダー状皮膚保護剤
Powder Type of Skin Barrier (Karaya Gum+Citrus Pectin)

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ **0120-770-175**
(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30)

www.alcaren.co.jp

はじめに



《プロケアパウダー》はカラヤガム／柑橘ペクチンからなるパウダーです。ストーマ周囲に使用することで、ストーマからの滲出液や排泄物を吸収し皮膚のカブレを予防します。ストーマ装具とストーマのすき間を埋めることでストーマの管理も容易になります。

使用上のご注意

- 万一肌に合わない場合は使用を中止してください。
- 使用後はフタをよく締めて、室温で保管してください。
- 高温、多湿の所や、冷凍室で保管しないでください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。
- プロケアパウダーが皮膚に残るようでしたらぬるま湯でガーゼなどの柔らかいもので拭き取ってください。

使用方法

- ①プロケアパウダーを使用する部位を、ぬるま湯などで清潔にしてください。
- ②プロケアパウダーを使用部位にふりかけてください。
- ③各種ストーマ装具を貼付してください。
- ④ストーマ袋や面板と、ストーマの間にすき間がある場合は、パウダーで埋めてください。

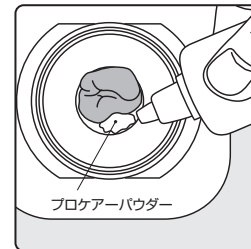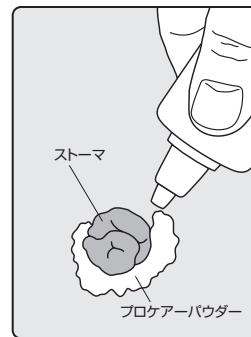

ÄLCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825