

## はじめに

《ポリネックソフト・P》は、頸部の固定・支持の目的に開発された商品です。安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。商品についてご不明な点は当社お客様相談室までご連絡ください。

## 使用上のご注意

\*【使用上のご注意】では、その危険度に応じて次の区分をしております。



### 警告 人身事故につながるおそれのある注意事項

- この製品のオーバーカバーには天然ゴムを使用しています。
- 天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 本品の使用に際しては、取扱説明書をよくお読みになったうえ、必ず医師などの医療従事者は使用される方へ適正使用のための説明、指導をしてください。また使用される方は、医療従事者の指示、指導に従って本品を使用してください。
- 本品を使用中に、痛み、しびれ、皮膚障害などの異常が生じた場合、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 本品は1症例1使用となります。本人以外の方へ使用することはおやめください。
- 使用者に適したサイズを選定し、使用者の体型に合わせた調整を行ってください。適したサイズを選定しない場合は、適切な支持が得られないおそれがあります。
- 本品が正しく装着されているか十分確認してください。本品使用中に、過度な締めつけや、ズレやゆるみが生じた場合は、正しく装着しなおしてください。装着状態の調節を行っても、状態の改善がみられない場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 面ファスナーが肌にあると、皮膚を傷つけるおそれがありますのでご注意ください。

### 注意 物損事故につながるおそれのある注意事項


- 本品を修正・加工して使用しないでください。
- 本品に変形などの不具合がある場合は使用しないでください。
- 面ファスナーが衣服にあると、衣服を傷つけるおそれがありますのでご注意ください。

## 種類と規格

種類	商品コードNo.	規格		1函入数
		頸囲	高さ	
LL	18881	40~46cm	9.0cm	1コ
L	18882	35~41cm	9.5cm	1コ
M	18883	30~36cm	9.5cm	1コ
S	18884	26~31cm	8.5cm	1コ

### 採寸方法

頸囲を測ってください。  
頸囲や高さを参考に適切な  
サイズをお選びください。

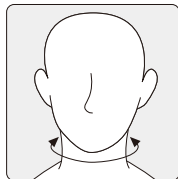

# ALCARE

## アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825  
www.alcare.co.jp

1802-1

for Best Care **ALCARE**

# ポリネックソフト・P

## Polyneck Soft-P


頸椎固定用シーネ  
Cervical Collar

## 取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。



お客様相談室 ☎ 0120-770-175  
(土・日・祝日を除く 午前9:00~午後5:30)  
www.alcare.co.jp

## 構造および各部の名称

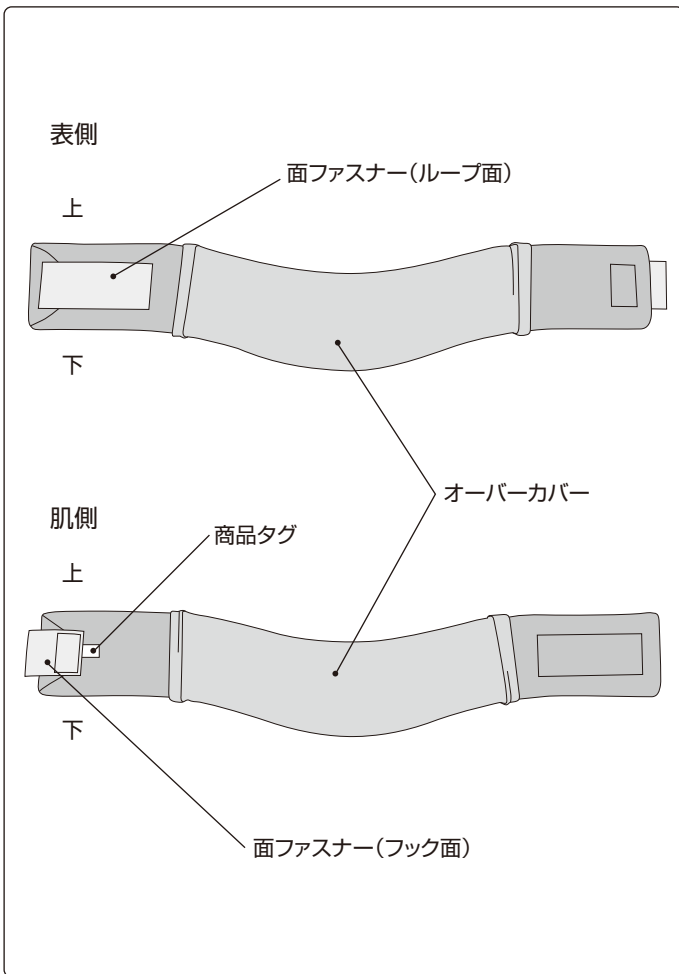


## 使用方法

- ①商品タグの付いている位置から、本品の上下、表側・肌側を確認します。
- ②商品タグが肌側の左後方にくるようにし、あごの位置を本品中央の凹みに合わせます。

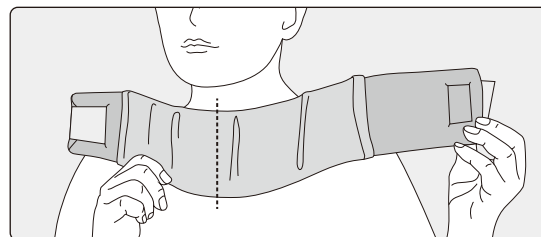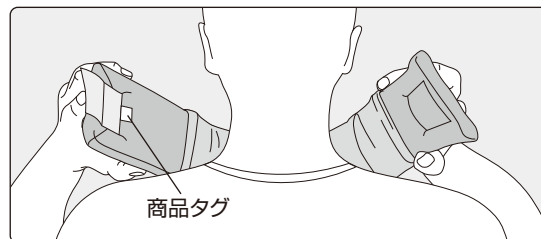


- ③頸部に巻くようにして、頸部の後面で面ファスナーのフック面とループ面をとめます。

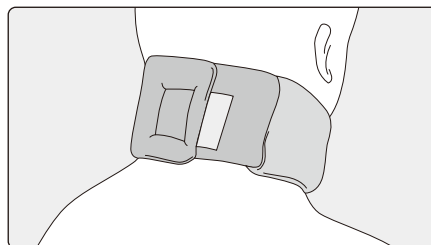


注意：頸部への圧迫や締めつけ過ぎなどに注意し、ズレやゆるみがない程度に調整します。

## 装着図

正面

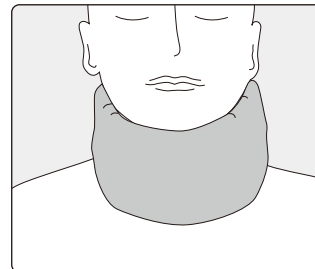

背面

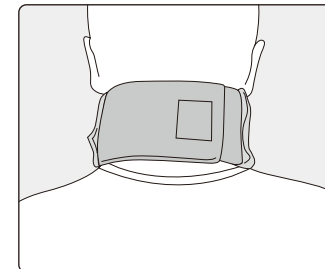

## 取扱上のご注意

### お手入れ方法

- 本品は洗うことはできません。本品のオーバーカバーは水洗いすると縮みます。
- 汚れた場合は必要に応じ新しいものと交換してください。

### 保管方法

- 本品を保管する際は、車中など高温になる場所や低温になる場所、暖房器具の熱などが直接あたる場所などには置かないでください。
- 水濡れに注意し、直射日光を避けて、室温保管してください。

### 組成・成分

- 本体(カバー) : 綿
- 本体(芯材) : ポリエチレン、ポリウレタン
- オーバーカバー: 綿、ナイロン、天然ゴム
- 面ファスナー : ポリエステル

### 廃棄方法

- 本品を廃棄する場合は、各自治体の廃棄区分に従ってください。