

## SDS 採血台 組立・昇降説明書

この度は当社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

誤った組立て・操作によって障害や物的損害を負わない為、次の通り正しく作業を行ってください。

部品リスト	数量	用途
六角ボルト + ワッシャー	4 set	補強棒を取付けます
トラス 6×40	4 本	天板を取付けます

### 準備して頂く工具


- ・インパクト式電動ドライバー【推奨】※ 組立が容易となります  
または、
- ・プラスドライバー ※ 先の尖っていないタイプ・頭サイズ3

### 組立方法

※ SDS-6045Nは組立完成品にて出荷となります(組立不要)

- ①. 六角ボルト+ワッシャーにて、補強棒を立脚に取付し、脚部を完成させます。
  - ②. 天板の裏面を上に向け、①の脚部を天板裏のナット位置に合わせて置きます。  
ナットと脚部のトラス取付位置(穴)を確認し、**4箇所共 仮締めをしてから、本締めをします。**
- △ **仮締めをしないで、最初から本締めをしてしまうと取付位置がずれたり、片寄りが生じ、天板に脚部が取付けられなくなる可能性があります。**

天板表面にキズや汚れが付かないよう注意し、平らで清潔な場所での作業をお願いします。

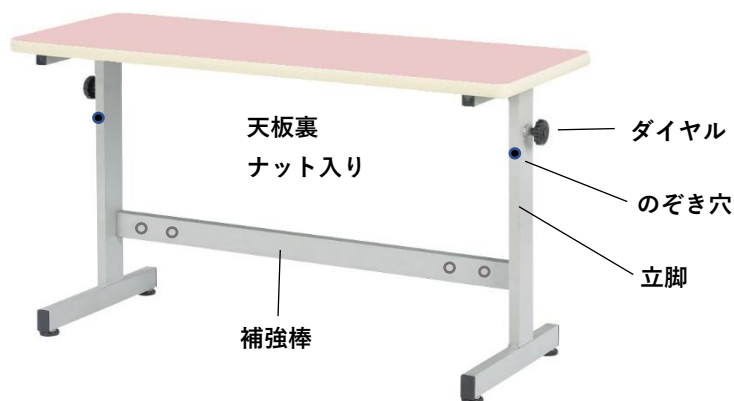

SDS-1245N



### 昇降方法

立脚側面の黒いダイヤルを緩めます。(両側)

側面にあるくぼみを参考にしながらダイヤルを回してロックして下さい。

※【のぞき穴】からもくぼみとダイヤルの高さが一致したことが確認できます。

オプションの引出【TU-380】を取付けの際は、引出に同梱の説明書に従って作業を行ってください。