



ソフト母子ネームバンドは新生児の取り違い防止用のバンドです。新生児用部分と母用部分それぞれに同じ番号が表示されていますので、臍帯切断前に取り付けて下さい。

1箱は同色100本入で、1～120の番号順に入っています。(4、9等の欠番があります。)

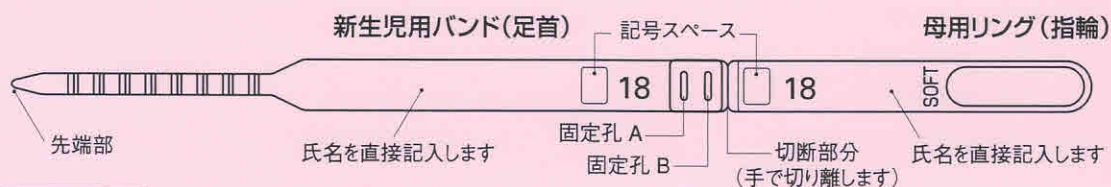

使用法

1. 本品を袋から取り出し、新生児用、母用それぞれに付属の油性ペンで名前等を記入します。
2. 本品を児の足首に巻き、先端部を図の固定孔Aに通します。このとき小指1本入る程度の余裕をもって締めて下さい。
3. 先端部を固定孔Aに通した後で、さらに折り曲げて先端部を固定孔Bに通します。(2ヶ所の穴に通すことで二重にロックできます。)
4. 児に固定後、母用部分は手で引っ張って切り離し、照合番号を確認して直ちに母親の指にはめて渡します。

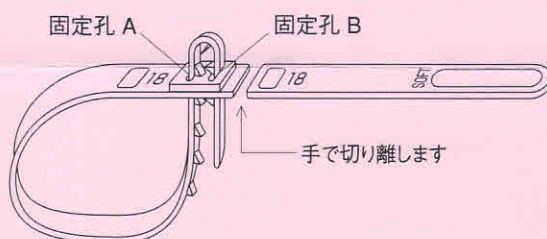

記号スペースの利用法

使用数の多い施設では、表示番号の前にある□の中にA・B等の記号や産まれた月等を記入することで連続100人以上に使用することもできます。

A 18, **B** 18 … **1** 18, **2** 18 … (18番を使い分ける場合の記入例)

警告

1. 本品を児の足首に固定する際にきつく締めると血行不良を引き起こしますので、必ず小指1本が入る程度の余裕を持って締めて下さい。装着中は児の足首を圧迫していないか、ゆるすぎて抜け落ちるおそれがないか等を確認して下さい。
2. 本品を児の手首に装着すると、手を動かした際に顔などに擦れて傷をつけるおそれがありますので、足首に装着して下さい。
3. 本品使用中は皮膚の状態を十分確認して下さい。万一、発疹・発赤・かゆみ等の症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止して下さい。特にアレルギー体質の方への使用は十分ご注意下さい。

使用上の注意

1. 本品は取り違い防止を目的としていますので、必ず臍帯切断前に装着して下さい。
2. 本品は箱毎に番号順に揃えてあり、1箱中に同じ番号はありませんが、同時に2箱以上を開封すると同一番号による混同を招くことがあるため、開封中の箱を使い終わってから次の箱を開封して下さい。
万一、母児同定を必要とすることが生じた場合は、手で切り離した後の切断面を精査し、判定して下さい。
3. 光線療法を行う場合は通常的环境と異なるため、装着部の皮膚の状態等を十分確認しながらご使用下さい。
4. 本品を消毒液等に浸けないで下さい。変色や劣化を起こすおそれがあります。
5. 氏名等は水性ペンやボールペン等で記入すると沐浴の際に消える場合がありますので、油性ペンをご使用下さい。
6. 本品の使用は1回限りです。再使用しないで下さい。

仕様

全長 209mm (新生児用バンド 136mm、母用リング 73mm)

主原料 合成ゴム(NBR) ※天然ゴムは使用していません