

「ゾーリングペンペディー」取扱注意事項



刃物ですので取扱いには十分ご注意ください。

- ・ 子供の手の届かない場所に保管して下さい。
- ・ 使用済の刃は正しく処分して下さい。
- ・ 刃は両刃タイプですので、取扱いには十分ご注意ください。
- ・ 本商品は、本体(ハンドル部)・刃、刃の留め具で構成されております。



【刃の交換方法】

- ① 刃の出ている側を平らな場所に置き、ハンドル部と突起部を持ち、ゆっくり手前に引いて外します。
- ② 刃の向きを変える、または刃を新しいものに取り換えます。
- ③ 留め具・刃の上に本体をのせ、突起部を留め具の穴にすべり込ませ、本体を手前に引いて組み立てます。



①



③

発売元 松吉医科器械株式会社 TEL: 03-5816-8819