

オカモト 浴槽「ニュー湯つくん」

取扱説明書


■品番 1111A

この度は、“オカモト浴槽「ニュー湯つくん」”をお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。

安全にお使い頂くためにご使用前には

必ずこの説明書をお読みください。

また、この説明書は大切に保管され、必要に応じお読みください。

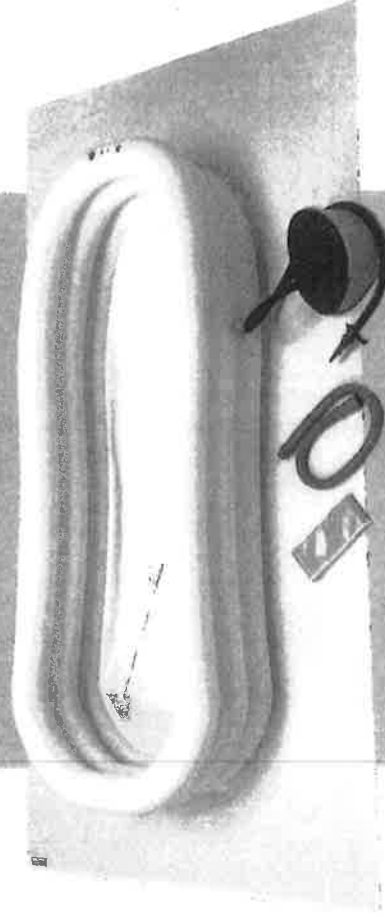

保証

納入時に直ちに点検いただくようお願いいたします。製品の欠陥に基づく返品・交換などは、納入日より5日以内にお願いたします。尚、納入日より6カ月を保証期間とし、その間の製品上の欠陥による破損等に関しては保証いたします。その他の原因による場合には実費を申し受ける場合もありますのでご了承ください。詳細は品質保証書をご覧ください。



注意

誤った取扱をしたときに、使用者が傷害や物的損害のこうむる可能性があるものを示しています。


用途と特徴

「ニュー湯っくん」は自宅の部屋の中で、手軽にそして安全に入浴できる簡易浴槽です。軽くて丈夫なポリウレタン素材を使用し、防臭・抗菌加工を施しております。また簡単に組み立てることができ、収納にも便利です。

各部の名称

内容キット ご使用前に以下の部品が揃っているか確認してください。


- ニュー湯っくん本体×1
- 排水ホース×1
- ステップポンプ+充気ホース+ノズル×1
- 洗髪ベルト
- 防水シート

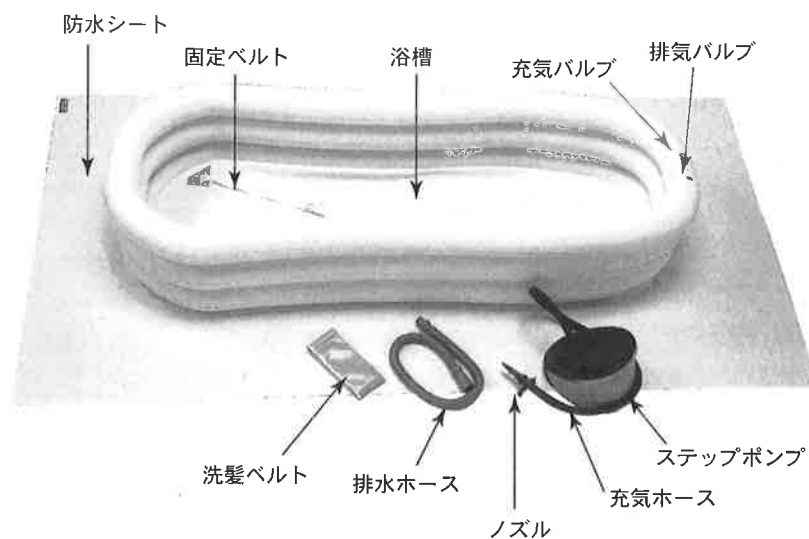

お客様で用意していただくもの

- 電動バスポンプ又はバケツ等
お風呂のお湯を汲み上げます。
- 給湯用ホース（電動バスポンプ使用の場合）
お風呂から浴槽本体までをつなぐ必要な長さの家庭用水道ホース。
- 排水用ホース
セットには、1mのホースが付いていますが、足りない場合は、延長用のホースを用意してください。ホースは、洗濯機用ジャバラホースです。

使用上の注意

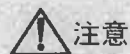

注意

（取扱いの注意）

- 過度に空気を入れ過ぎないでください。破裂する恐れがありますので、エアー（空気）の入れ過ぎにご注意ください。
※特に市販の電動エアーポンプを使用するときは注意してください。
- 鋭利なもので傷を付けないでください。
- 火気・高温に近づけないでください。
- 電動バスポンプ（市販品）、電動エアーポンプ（市販品）の取扱いについては、それぞれの取扱説明書をよくお読みください。
- シャワーホルダーを浴槽に取り付けしないでください。破れの原因になります。
- ご使用後は、よく洗って、水気をふき取ってから冷暗な場所に保管してください。
（お手入れは、浴槽をふくらませてなさると楽です。）
- 干すときは、必ず陰干しをしてください。
- お手入れには、薄めた中性洗剤を使用し、シンナーなどの有機溶剤や漂白剤は使わないでください。洗浄には水又はお湯、中性洗剤等をご使用ください。他の薬品類もご使用にならないでください。
- 浴槽内にお湯や人を入れたまま、浴槽を移動させないでください。
- 子供用のプールとしての遊び道具の使用はしないでください。
- 水気を残したまま長期保管するとカビることがあります。


（入浴にあたっての注意）

- 入浴にあたっては、健康状態に十分気をつけ、医師とよく相談をしてください。
- ご使用前には浴槽本体に異常がないか確認してください。
- 入浴する部屋は、十分に暖かくしておいてください。
- 家庭用湯沸器より直接給湯しないでください。
- お湯の温度には、十分注意してください。
- 入浴中は、入浴者から絶対に目を離さないでください。
- 長湯は、入浴者を疲れさせます。手早く入浴させてあげましょう。
- 固定ベルトは、しっかりと締めてください。
- 入浴者の頭以外に浴槽には体を掛けないでください。

使用方法

STEP 1 浴槽をセットします。


1 防水シートを敷き、浴槽を置きます。給湯しやすい平らな所に防水シートを敷いてください。この時点では、お湯を入れないでください。浴槽に異常がないか確認してください。

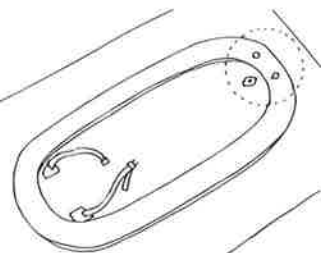


2 浴槽の充気バルブの栓を開けます。この時、排気バルブの栓を閉じてください。



3 充気ホースの大径の口をステップポンプにねじ込み、小径の口にノズルの根元を差し込み、しっかりと抜けない様に固定してください。

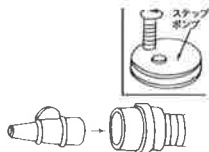


4 中ノズルの差込口を、浴槽の充気バルブにしっかりと差し込み接続します。

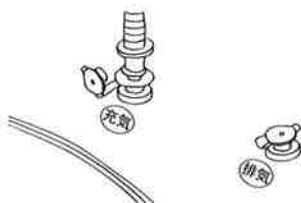

5 排水ホースを浴槽の裏から排水口にしっかりと差し込みます。


浴槽内の排水口のバルブがしっかり閉じていることを確認してください。

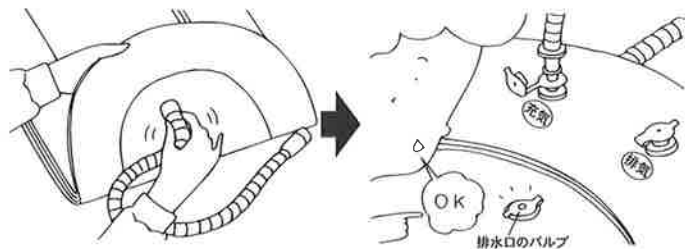

STEP 2 入浴者を入れ、浴槽をふくらませます。

6 洗髪をする場合は、洗髪ベルトを浴槽の下にセットしておきます。

浴槽の上部から、30~40cmくらいのところに敷きます。

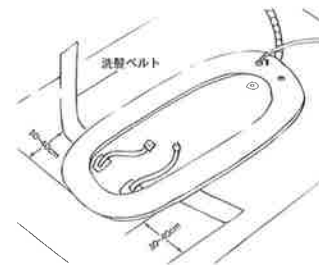

1 入浴者を浴槽に入れます。入れるときは、入浴者の頭を浴槽のヘリ（固定ベルトの付いている方）にのせます。


室温には十分ご注意ください。



2 ステップポンプをふみ、浴槽をふくらませます。

エア（空気）を入れ過ぎないようにご注意ください。

市販の電動エアポンプで充気するときは、電動エアポンプの取扱説明書をよく読んでお使いください。

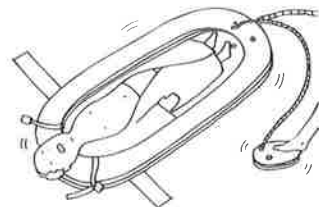


3 適度にふくらんだら、充気ホースをはずし、すばやく充気バルブの栓を閉じます。

4 入浴者の頭の位置、体の位置を調整し、固定ベルトをしめます。

固定ベルトは、カチンと音がするまで、しっかり差込んでください。はずすときは、止め具の外側を指で挟んで押し、はずれます。

※浴槽をふくらませてから、入浴者を入れてあげる方法でも結構です。

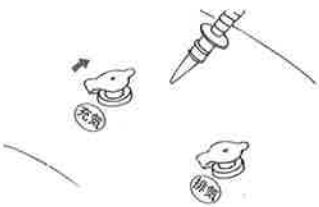

固定ベルトの締め方

固定ベルトのはずし方

STEP


3

給湯の方法。

1バケツ等を使いお湯を入れてください。お湯は入浴者が入ってもこぼれない程度に入れてください。目安としてお湯を浴槽の下から2段目まで入れてください。

市販品の電動バスポンプを使用する場合は、電動バスポンプの取扱説明書をよくお読みください。

直接熱湯は入れないでください。
(浴槽を傷めますし、入浴者が熱傷をする原因となります。)

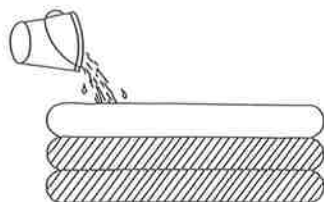

STEP

4

洗髪の方法。

●洗髪をするときは固定ベルトをはずします。そのとき入浴者の体を起こしておきます。


1洗髪ベルトを浴槽の上部から30cm～40cmくらいのところに巻き付けマジックテープでしっかりと止めます。

2洗髪ベルトの上に入浴者の頭をのせます。

マジックテープの上に入浴者の頭がこないようにしてください。

3やかん、洗面器等をつかい洗髪します。お湯はあふれさせないように注意してください。

市販品の電動バスポンプのシャワーで洗髪する場合は電動バスポンプの取扱説明書をよくお読みください。

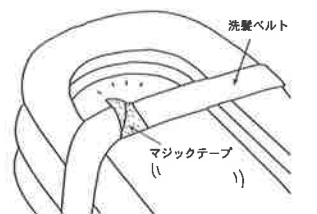

STEP

5


排水します。

1浴槽の排水口のバルブを開け、排水します。

ご使用後は、よく洗い、水気をふき取ってください。



2排水が終了したら、排気バルブの栓を開け、浴槽の空気を抜きます。

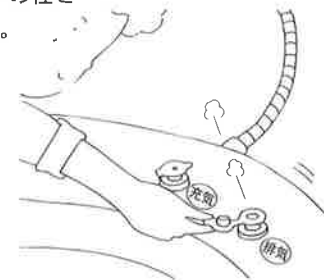

後片付けとお手入れ

〈後片付け〉

- 使用後は、本体のエア注入口の栓を開けて空気を抜きます。ステップポンプのホースをポンプの赤い口（排気口）と本体のエア注入口につなぎ、エア注入口の排気バルブを軽くつまんでポンプをゆっくり踏んで、空気を十分に抜いてください。
- ニュー湯つくん本体、排水ホースとも、よく洗って水気をふき取り、収納バッグにしまってください。

〈お手入れ〉

- 特に排水ホースの中はよく洗って、その後よく乾かして収納してください。汚れや水分を残したまま保管すると、目詰まりがしたりカビたりする恐れがあります。
- ニュー湯つくんの洗浄には、水洗いやうすめた中性洗剤を使用しベンジン・シンナーなどの有機溶剤は使わないでください。クレゾール等、他の薬品や漂白剤も製品を傷めることがありますので、ご使用にならないでください。
- 消毒はヒビテン[®]の0.02～0.04%溶液でふいてください。
- オートクレーブは使用しないでください。
- 干すときは必ず陰干しし、乾いたら冷暗所に保管してください。

仕様

- 本体サイズ：全長1800mm×最大幅720mm×全高300mm
- 本体重量：2.1kg
- 素 材：本体/ポリウレタン、抗菌防臭加工
付属品/塩化ビニル（耐カビ、耐温水加工）
- 耐熱温度：70℃
- 実効容量：140リットル

※掲載の写真、イラストおよび記事の無断転載を禁じます。

保証書

〈保証期間〉

1.保証期間はご購入日から6ヶ月です。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、ご購入の販売店にお申しつけください。
- (ロ) お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、弊社のご相談窓口にご連絡ください。
- (ハ) この商品は持ち込み修理をさせていただきますので修理に際し本書をご提示下さい。
- 2.ご転居の場合の修理後依頼先などは、お買上げの販売店または弊社のご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品などで本保証書にご記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、弊社のご相談窓口へご連絡ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及びび不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買上げ後の取り付け場所の移送、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及びび公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及びび損傷
 - (ニ) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及びび損傷

- (木) 本来の使用目的以外で使用された場合の故障及びび損傷
 - (へ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合
 - (チ) 離島または離島に準ずる遠隔地からの修理を行う場合の運賃に要する実費
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
 - 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
 - 7.弊社のご相談窓口は次の通りです。



オカモト株式会社

東京都文京区本郷3丁目27番12号 〒113-8710
メデイカル課 電話 03-3817-4172

※この保証書は、本書に明示した期間、条件の下において無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様が法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社のご相談窓口にお問合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

ご住所〒	電話 ()	局	番
販売店	住所	店名	電話 () 局 番
お名前	様	年	月
お買上げ日	平成	年	月



ご使用にあたり、ご不明な点や、製品の異常を感じましたら直ちに使用を中止し、ご購入頂いた販売店または弊社にご連絡ください。



オカモト株式会社

東京都文京区本郷3丁目27番12号 〒113-8710
メデイカル課 電話 03-3817-4172

- お客様へ
- お買上げ日、販売店名を記入されずと修理などの依頼のときに便利です。

お買上げ日	年	月	日
販売店名	電話 ()	局	番