



＊ セット内容 ＊

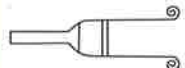

太さ 直径32mm

ユリドーム

ソフトな肌ざわりで、使用感なくお使いいただけます。サイズは種類のみです。(天然ゴムラテックス製)

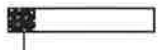

面ファスナー

固定用バンド  
(脱落防止バンド)

伸縮性のあるバンドで、ユリドームの脱落を防止します。




採尿タンク

1500cc入りですので、毎回尿を捨てる必要はありません。また、タンクのみで排尿器として使用できます。



ホース  
(長さ2m)

弾性ホースを使用しています。長すぎる場合は切ってお使いください。

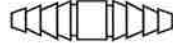

ジョイント

ユリドームからタンクへの送尿をスムーズにします。接続しやすく、とれにくいように工夫してあります。

＊ ユリドームを使い切った際には ユリドームお取り替え用をお買い求めください ＊



デラックス安楽排尿器  
**ユリドーム**  
お取り替え用 男性用

固定用バンド付  
30個入(1箱10個×3箱)  
希望小売価格 ¥7,200 (税抜き)

※ユリドームセットを購入した店舗・業者様へお問い合わせください。



男性専用安楽排尿器  
**ユリドーム** セット

※ご使用前に必ずお読みください。  
※この取扱説明書は大切に保管してください。

# 男性専用安楽排尿器 ユリドーム セット

とくに、こんな方々におすすめします。

- 脊髄損傷・脳卒中などによる尿失禁の方
- 手術後の方
- 安静療養をしている方
- 寝たきりの方
- おからの不自由な方
- お年寄りの夜間使用

## 特徴

### ① 寝たまま排尿できます

ユリドームはコンドーム・タイプの排尿器です。固定用バンドでとめることで外に漏らすことなく、衛生的に排尿できます。

### ② 利用者様の負担を軽減します

タンクの容量は1500ccですので、一回の排尿ごとに尿を捨てる必要はありません。タンクは、床や畳の上に置くことができます。利用者様に大きな負担は掛からず、また排尿した後はタンクに溜まった尿を処理するだけです。

### ③ ふとんでもベッドでも利用できます

ユリドームは和洋兼用式の排尿器。洋式のベッドの上からでも、日本式のふとんに寝たままでも利用できます。(ベッド、ふとんと床、畳の高低差を利用します)

### ④ 手軽に使える手軽に運べます

ユリドームセットの各部品は「装着」と「取りはずし」がしやすく、しかも軽いため、「交換」と「持ち運び」が便利です。

### ⑤ 水洗いできます

ユリドームセットの各部品は、取りはずして水洗いできますので衛生的です。(ユリドームを除く)

## 使用上の注意

- ・ユリドームの使用は、1個につき1回限りです。毎回新しいユリドームをお使いください。
- ・ユリドームをペニスに装着したまま長くご使用される場合は、皮膚表面に増殖した細菌によってペニスにかゆみ、かぶれなどが生じることがありますので必ず1日に数回取り外しペニスをふき清潔にしてください。
- ・高濃度の薬品、溶剤(ガソリン、ベンジン等)、油類が付かないようにしてください。
- ・ホースは折り曲げたり、足等で踏まないでください。折り目がつくと尿が通らずにお使いいただけなくなる場合があります。
- ・高温や湿度の高い場所、直射日光にあたる場所を避けて保管してください。
- ・ユリドームは天然ゴムラテックスを素材にしております。天然ゴムラテックスは体質によって、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- ・寝返り等でホースが曲がり、尿が流れにくくなる場合があります。
- ・ユリドームを適切に装着している場合でも、寝返り等でユリドームが外れることがあります。
- ・採尿タンクの蓋はツメの部分をタンクの口の溝にしっかりとめ込んでください。(何度も回して締めるタイプの蓋ではございません。)
- ・ユリドームは1サイズのみになります。(ユリドームが大きすぎる場合には濡らしたガーゼや脱脂綿をペニスに巻いて径を大きくしてから装着してください。)

## ご使用方法

図1



図1. ホースの垂直カット側にジョイントの一端を差し込み、ジョイントの他端をユリドームのコネクター部に完全に差し込みます。

図2



ユリドーム

図3



図4



固定用バンド

図2. 図3. 図4. ユリドームの先端にペニスを入れ、根元まで巻き伸ばし、根元を固定用バンドで止めてずれないようにします。固定用バンドは面ファスナーの部分でとめ、きつく締めるすぎないでください。

図5



採尿タンク

図6

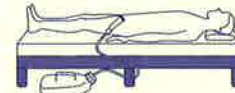


図5. 図6. タンクの蓋のツメをタンクの口の溝にはめこんで締めます。ホースの斜めカット部分を採尿タンクの採尿口へ差し込み、ベッドやふとんの外側にタンクを出しておきます。排尿するとホースを通してタンクへ流れ落ちます。