

# マツヨシ コンパクトオムツ交換車

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
本説明書を組み立ての前に必ずお読みの上、正しくお取り扱い下さいますようお願いいたします。  
また、本書を大切に保管して下さい。

## 使用時のご注意！


- 本製品に乗ったり、重いものを引っ掛けたり、耐荷重以上のものを載せたりしないで下さい。転倒したり、壊れてケガをする恐れがあります。
- 平らな場所でご使用下さい。不安定な場所で使用すると、転倒しケガをする恐れがあります。
- エレベーター等の乗り降りの際に、キャスターが隙間に落ちないようにご注意下さい。
- キャスターに強い衝撃を与えないで下さい。事故や故障の原因になります。
- ご使用前に各部の点検をし、破損・変形・グラつき等の異常がある場合はご使用しないで下さい。
- 高温のものを直接当てたりしないで下さい。塗装面が変色したり、剥がれることがあります。
- 直射日光や冷暖房器具の風を直接当てないで下さい。歪んだり変色したりすることがあります。
- 分解や改造をしないで下さい。破損したりケガをする恐れがあります。
- 異常を見つけたらそのまま使用せず、製造元へご連絡下さい。

※ 改善のため、予告無く仕様を変更することがあります。

以下、キャスターをご使用時の注意

- ★ 運搬目的など、目的以外では使用しないで下さい。転倒したり、キャスターが破損して、倒れてケガをする恐れがあります。
- ★ 段差等は、本製品を引っ張り上げるようにして越えて下さい。無理に段差等を越えようと、転倒したり、キャスターが破損して、倒れてケガをする恐れがあります。
- ★ カーペット上で移動させる場合は、必ずゆっくりと行って下さい。転倒したり、キャスターが破損して、倒れてケガをする恐れがあります。
- ★ キャスターのストッパーをロックした状態で、無理に移動させないで下さい。破損の原因になります。
- ★ キャスターは消耗品です。破損したり、異常が発生した場合は、すぐに使用を止め、新しいキャスターに交換して下さい。
- ★ キャスターのネジは、定期的に締め直して下さい。緩んだままで使用しますと、転倒したり、キャスターが破損して、倒れてケガをする恐れがあります。




製品仕様	外形寸法：幅400mm×奥行840mm×高1040mm		キャスターサイズ：φ75mm	 PE
	重　　量：15.68kg		耐荷重：20kg	
	主要材料：スチール、パーティクルボード			
	表面処理：スチール＝粉体塗装、パーティクルボード＝メラミン化粧紙貼り			
				Made in Taiwan
				K1323

## ご使用方法


### 1) ストッパーの操作


- レバーを下げると、回転が止まります。
- レバーを上げると、ストッパーが解除されます。

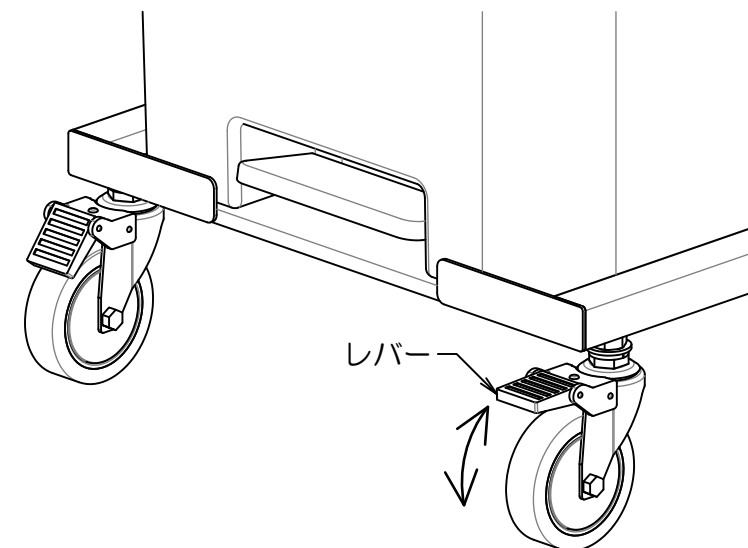

### 2) 収納ケースの使用方法

- 2段とも引き出し式で、前後にケースを引き出すことができます。
- 引き出し式になっていますが、操作はゆっくり丁寧をお願いします。
- ケースを取り出すときは、フレーム枠から持ち上げて取り出します。

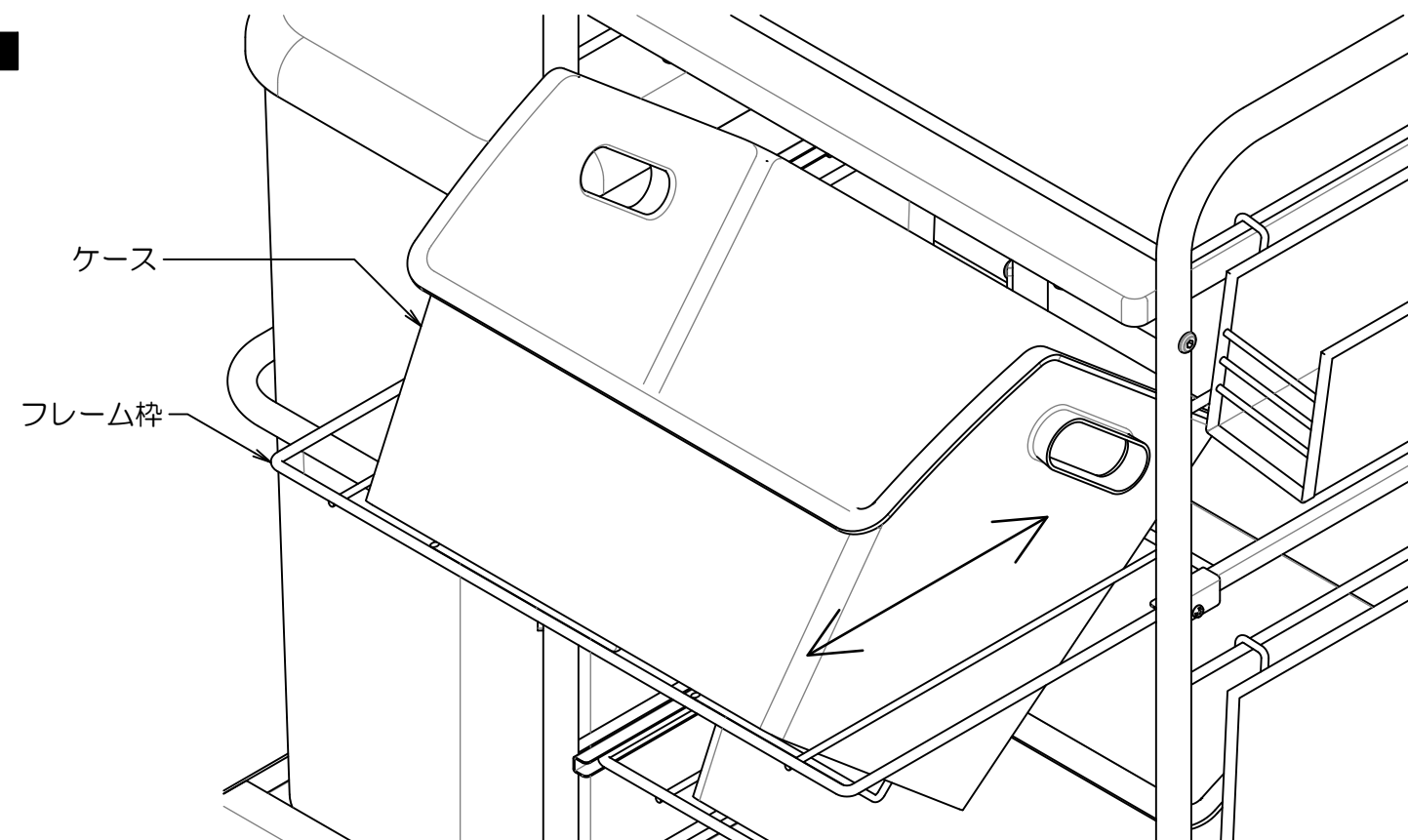

お問い合わせ先  
 松吉医科器械株式会社  
URL : <https://www.matsuyoshi.co.jp>

MY-WC0030