

靴ベラ付きソックスエイド


■品番：DA-5115

■カタログコード：25-4038-00

■サイズ：靴ベラ伸縮部=320~580mm

■材質：靴ベラ=POM、靴下かぶせ部=ABS

■特徴：靴と靴下が履きにくい方のための便利アイテムです。靴ベラは伸縮できます。

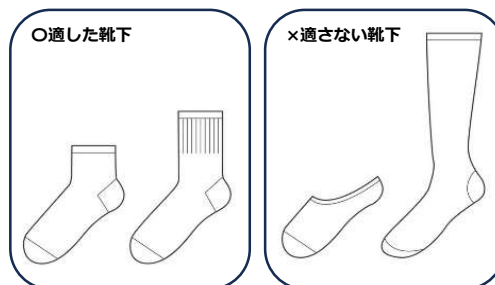

使い方1 ～靴ベラとして～

【靴ベラの長さの調整方法】※靴ベラは全長320mm, 450mm, 580mmの長さに調整ができます。




- ①320mm：写真のグレーボタンとホワイトボタン両方を押し、ハンドルを押し込んだ状態にします。
- ②450mm：①の状態からグレーボタンを押し、グレーのハンドルを全て伸ばします。
- ③580mm：②の状態からホワイトボタンを押し、ホワイトのハンドルを全て伸ばします。



使い方2 ～靴下履き補助具として～


【靴下の履き方】

- ①靴下履き補助具を靴ベラに取り付けます。※取付方法は裏面に記載
- ②靴下履き補助具のグレー部分に靴下を**下図A**のように、靴下の中心が真ん中にくるよう、靴下を矢印の方向へ引っ張り、かかと部分が靴下履き補助具に達するまで被せていきます。
- ③座った姿勢で靴下の中に足先を入れ、本体を身体側に引くように上げ、靴下を上げていきます(**下図B**)。
- ④靴を履くときは、反対側にある靴ベラ側をお使いいただけます(**下図C**)。

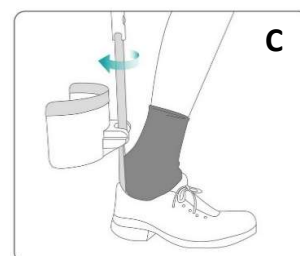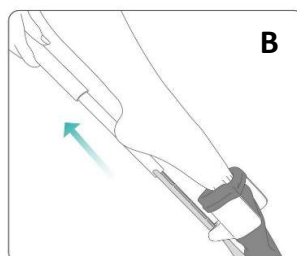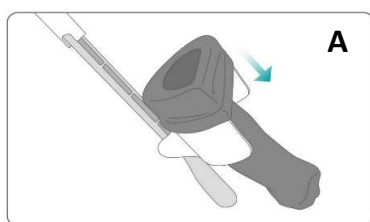


靴下履き補助具と靴べらの取り付け方


①右図のように、靴下履き補助具のグレーの滑り止め面を下にして(A)のパーツを矢印の方向に押しします。

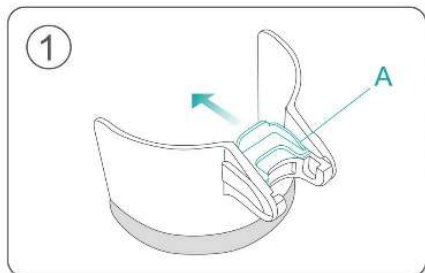


②右図のように、靴べらの突起部分(C)を靴下履き補助具の溝に差し込みます。

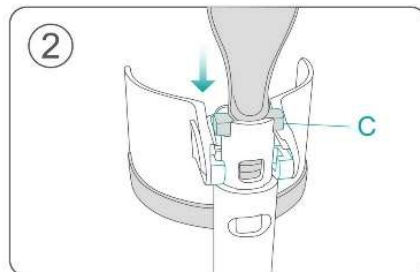

③右図のように、(A)を矢印の方向へ押し戻します。

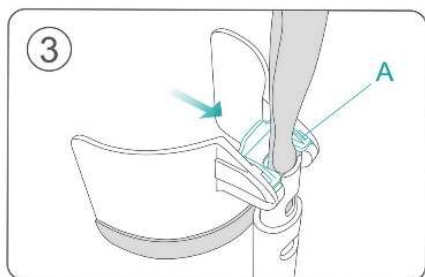

※もし(A)のパーツが外れてしまった場合、右図のように(A)と(B)の切り込みを同じ方向にして、(A)を(B)に押し込みます。

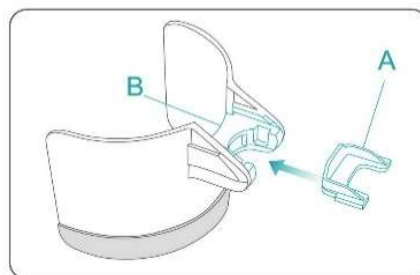

【使用上の注意】

- 靴べらを取り付ける際は方向に気を付け、正しく取り付けてください。
- 本体に無理な力を加えないでください。ケガや破損の原因となります。
- 直射日光および熱器具のある場所では保管しないでください。変形の原因となります。
- 製品に異常が見られた場合は使用しないでください。ケガの原因となります。
- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 改造はケガの原因となりますのでおやめください。

【お手入れ方法】

汚れがついた場合は柔らかい布で拭いてください。

【発売元】

 松吉医科器械株式会社
<https://www.matsuyoshi.co.jp>

本社：〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3階

TEL：03-5816-8819

E-Mail：info@matsuyoshi.co.jp



パッケージ

梱包

台湾製