

4in1マルチオープナー

■品番：HA-4287

■カタログコード：25-7410-00



■サイズ：W205×L50×H42mm

■材質：ABS


■特徴：ペットボトルの蓋や缶詰めのタブ、ビン入り飲み物の蓋の開閉を補助する道具です。

ジャム瓶等の蓋も開きやすくすることができます。

«使い方»


【ジャム瓶等の蓋】

右図①のように、オープナーを蓋の端にあて、ハンドルを矢印の方向に軽く引き上げます。軽く蓋が持ち上がりましたら、手で蓋をひねって開けてください。

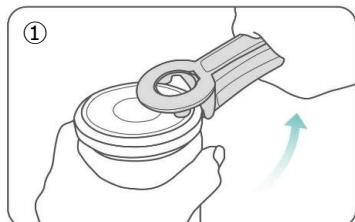


【栓抜き】

右図②のように、オープナーを栓の端にあて、ハンドルを矢印の方向に引き上げます。

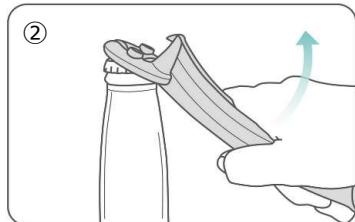

【缶や缶詰のプルタブ】


右図③のように、オープナーの尖っている部分をプルタブに引っ掛け、矢印の方向にゆっくり倒します。

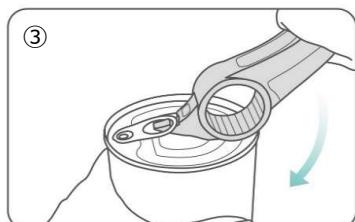

【ペットボトルのキャップ】

右図④のように、オープナーをペットボトルのキャップにはめ、矢印の方向に回すとキャップが開きます。反対方向に回すとキャップが閉まります。

※キャップを開ける部分の穴は円錐状になっており、キャップのサイズに応じて適切な面をお使いください。

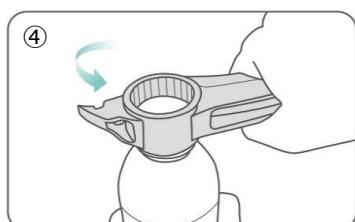

【使用上の注意】

- 本体の穴が開いている部分に指を入れる等しないでください。ケガの原因となります。
 - 食器洗浄機や食器乾燥機へは入れないでください。高熱により変形する場合があります。
 - 熱を持った蓋や缶には使用しないでください。変形・破損の原因となります。
 - ストーブなどの熱器具付近等の高温になる場所や、直射日光が当たる場所での保管はしないでください。
変形・劣化の原因となります。
 - 本体に異常が見られる際は使用しないでください。ケガの原因となります。
 - 本来の用途以外に使用しないでください。ケガや破損の原因となります。
 - お子様の手の届かない場所へ保管してください。
- ※一部対応していない種類の蓋等ございます。ご了承ください。

【お手入れ方法】

- 汚れた場合は、水または中性洗剤をつけた布で拭き取ってください。

【発売元】

 松吉医科器械株式会社
<https://www.matsuyoshi.co.jp>

本社：〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3階

TEL : 03-5816-8819

E-Mail : info@matsuyoshi.co.jp



台湾製