

介護施設向け 救急カート／与薬カート

弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、良好な状態でご使用いただくため、使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、大切に保管して下さい。
製品を譲渡、または貸与される時には、新しく使用者となられる方が安全で正しい使い方を知るために、本説明書を製品本体に添付して下さい。



救急カート

(MY-WC0060)



与薬カート

(MY-WC0070)

(発売元)



松吉医科器械株式会社


TEL : 03-5816-8819 (音声ガイダンス)

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更する事がありますのでご了承ください。

★ オプション




服薬ボックス セット
(深型トレー専用)

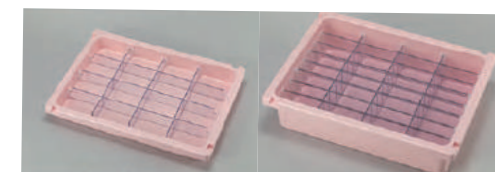




仕切板 セット

安全上のご注意

各警告表示の定義








 危険	取扱を誤ると、死亡または重傷を負う恐れがあります。	 注意	取扱を誤ると、軽度の人身事故、製品の破損の原因となる恐れがあります。
 警告	取扱を誤ると、重度の人身事故、製品の破損の原因となる恐れがあります。	 お願い	安全を確保するために注意が必要な事項。

安全確保の図記

	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの障害が起こる恐れがある場合の禁止
	特定しない、一般的な使用者の行為		


【使用上の安全に関する注意】

安全にお使いいただくために下記事項を必ずお守りください。

 危険	
	・本製品の上に乗らないでください。転倒して怪我をしたり、製品が破損する恐れがあります。
 警告	
	・改造及び分解はしないでください。改造及び分解した製品を使用して発生した事故については、当社は一切の責任を負いかねます。
 注意	
	・本体や他の部分に強い衝撃や無理な力を加えると、ひずみが生じたり、転倒して怪我をする恐れがありますので、丁寧に扱ってください。
	・本製品から離れる際は、必ずキャスターのストッパーをロックしてください。 ※本製品は、屋外で使用することはできません。

【お手入れについて】

清掃は、お湯又は水を強く絞った柔らかい布で拭いてください。
取れにくい汚れは中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

	・クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸など及びそれらに類するものは絶対に使用しないでください。
--	---

（製品仕様）

品 名	救急カート 浅型2段+深型5段	与薬カート 深型6段
品 番	MY-WC0060	MY-WC0070
本体外寸(mm)	W:475×D:416×H:1034	
トレー内寸(mm)	(浅型)W:375×D:265×H:47	(深型)W:375×D:265×H:97
	(深型)W:375×D:265×H:97	
材 質	本体:スチール トレー:帯電防止ABS	
トレー色	ピンク	ライトパープル
キャスター	φ100(mm) 対角ストッパー付	
本体質量(kg)	26.7	26.4
付 属 品	SUSフック×1 スペアキー×1	ラベルプレート×6 スペアキー×1

（オプション）

品名	仕様	品番	
引出仕切板 深型 セット	32分割	MY-WC0061	
引出仕切板 浅型 セット	16分割	MY-WC0071	
服薬ボックス セット	4色×9個	MY-WC0072	