

## 取扱説明書

製品を安全に末永くご使用いただくために、この取扱説明書必ずよくお読みになり、お読みいただいた後は必ずお手元に保管してください。

### ⚠ 注意

取り扱いを誤った場合に、人が怪我をおったり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

なお、⚠で記載した事項でも、状況により重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

### ⚠ 安全上のご注意

#### ⚠ 注意

- 本製品を目的以外の用途では使用しないでください。
- 本製品を組立・使用する前に破損や異常が発生していないか、組立・使用前に必ず点検してください。
- 本製品を加工・改造など行わないでください。
- 組立時、無理な力をくわえないで下さい。部品が壊れ怪我の原因となります。
- 床以外に本製品を設置しないでください。破損の原因となります。
- 生産には注意を払っておりますが、稀にバリ（生産の際に製品の端などにはみ出している削り残し）等が表れている場合がございます。組立・使用される際に怪我をしないように十分ご注意ください。

### ■商品仕様・付属品

#### ●仕様

- ・20L：■外形寸法：W315×D260×H400mm ■容量：20L ■材質：プラスチック(PP)
- ・50L：■外形寸法：W390×D360×H625mm ■容量：50L ■材質：プラスチック(PP)

#### ●付属品

- 取扱説明書 ■本体 ■蓋 ■ペダル ■背板 ■バイオハザードシール(黄・橙・赤 各1枚) ■ゴミ袋パーツ(50Lのみ)

#### ●推奨組立人数

- 1名ですが、力の弱い方が組み立てる場合2名が推奨です。

### ⚠ 使用時・後のご注意

#### ⚠ 注意

- 医療廃棄物を処理する際は、環境省が規定している処理法で処理してください。
- 容器の中に廃棄物を詰め過ぎないように（容器の8割程度）注意してください。怪我の原因となります。
- 感染の原因となりますので、使用後は容器表面の血液等の汚れをアルコール又は弱次亜塩素酸で拭き取り、確実に蓋を閉めてください。

### ⚠ 組立上のご注意

#### ⚠ 注意

- 本製品の組立・設置は、手指の挟み等に十分注意して部品同士をしっかりと組立をし、平坦な床に設置してください。部品の破損や怪我の原因となります。
- 破損・ケガの原因となりますので、本製品を組立後、解体をしないでください。

### ■各部の名称(写真は20Lの物を使用しております。)



(発売元)

松吉医科器械株式会社  
<https://www.matsuyoshi.co.jp>  
 TEL: (03) 5816-8819 (音声ガイダンス)

■組立方法(写真は20Lの物を使用しておりますが、50Lも同様に組み立ててください。)

### 1. 蓋と本体の取付を行います。

《手順》

①本体を逆さにして①本体の背面にある穴と②蓋の背面にある穴を取り付けください。

①本体背面



②蓋背面



⑥



### 3. 背板とペダルの取付を行います。


《手順》

⑧で取り付けした背板と③ペダルを取り付けます。  
※③ペダルは表と裏に注意してください。

⑧



⑩

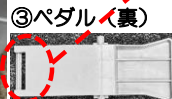

### 2. 背板と蓋の取付を行います。

《手順》

⑥で取り付けした⑦蓋の穴と、④背板を取り付けてください。  
※⑦蓋の穴は固いので力の加減に注意して取り付けてください。  
④背板は裏と表に気を付けて取り付けしてください。  
⑨の様に少しずらして④背板を斜めに入ると取り付けやすくなっています。

⑥




④背板(表)




⑦蓋の穴



⑧

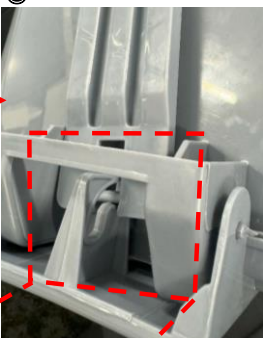

⑨

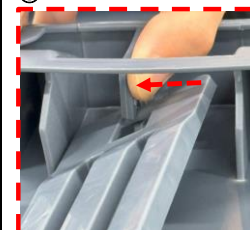

### 4. 本体とペダルの取付を行います。

《手順》

⑩で取り付けしたペダルを①本体の底面にある穴に取り付けます。  
取付後再度裏返せば完成です。

⑩



### ■動作確認

ペダルを踏むと蓋が開き、もう一度踏むと蓋が閉じることを確認してください。  
・ペダルを踏むと蓋が90度まで開きます。  
・もう一度ペダルを踏むと蓋が閉まります。

### ■バイオハザードシールについて

バイオハザードシールは、廃棄物の種類に応じたシールを使用者が見やすい位置に張ることが推奨されています。

#### 環境省で推奨されているシールの分類



赤：液状又は泥状のもの（血液等）



橙：固形状のもの（血液等が付着したガーゼ等）



黄：鋭利なもの（注射針等）分別排出が困難なもの

### ■ゴミ袋パーツについて（50Lのみ）

50Lは袋を掛けることができるゴミ袋パーツ(図1)が付属しております。組立完了後、蓋を開き蓋と本体の取付部(図2)に下図3-5の通りに取り付けることで袋を固定することができます。

図1 ゴミ袋パーツ 図2



図3 袋を取り付ける

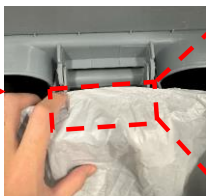


図4 図1の部品を取り付ける

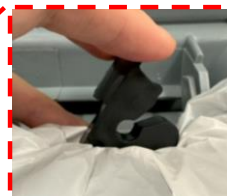


図5 矢印の方向に動かす

