

## 取扱説明書

製品を安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、お読みいただいた後はお手元に必ず保管してください。




### 注意

取り扱いを誤った場合に、人が怪我を負ったり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

- 本製品は、本来の目的以外に使用しないでください。また、加工や改造など行わないでください。
- ご使用前に破損や変形などの異常が無いか必ず点検してください。異常が見られる場合は使用を中止してください。
- 本製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないでください。転倒や破損の原因になります。
- 天板やトレーに物を載せすぎたり、偏った積載はしないでください。転倒や積載物落下による事故の原因になります。
- 耐荷重(20kg)以上の重さがかからないようにしてください。転倒や破損の原因になります。
- 屋外、傾斜や不安定な場所での使用はお控えください。転倒や破損の原因になります。
- 天板をたたく等、強い衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
- キャスターや可動部などに異常音が発生した場合は直ちに使用を中止し、ご購入された販売店にご相談ください。

### ■使用方法

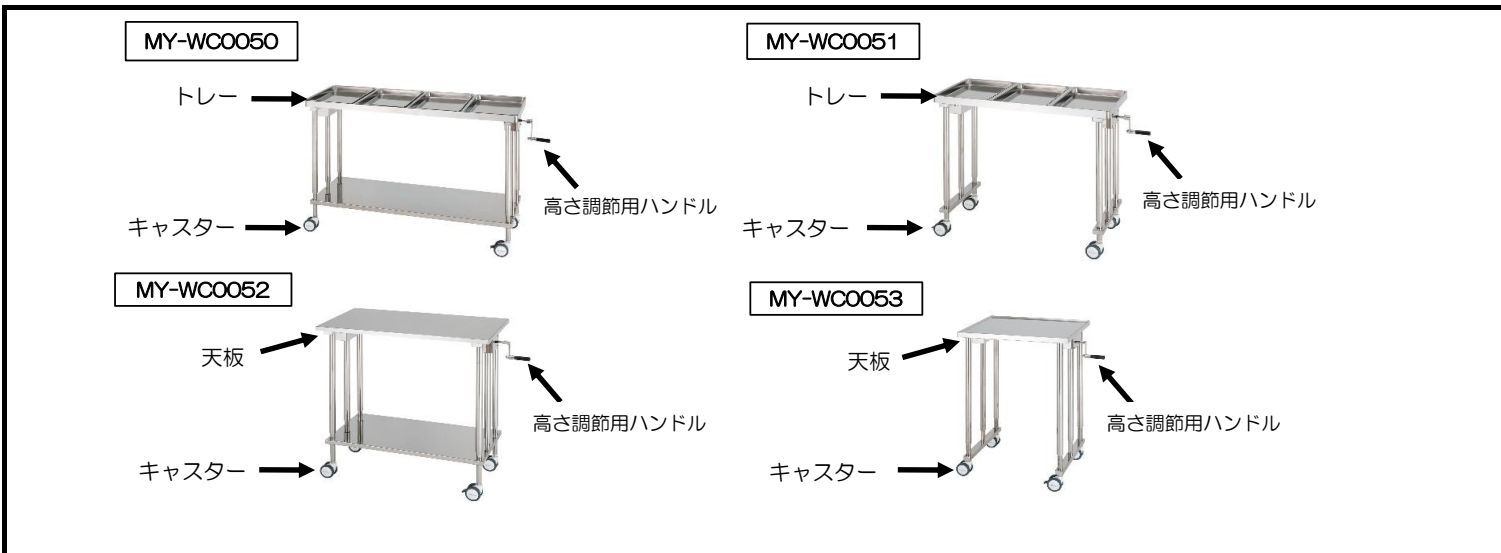

### ■製品仕様

品 番	MY-WC0050	MY-WC0051
サイズ	W1185×D410×H800~1200mm	W890×D410×H800~1200mm
トレー内寸	W390×D270×H40mm	W390×D270×H40mm
材 質	ステンレス	
耐荷重	20kg	
キャスター	Φ75mm(静音・対角ストッパー)	

品 番	MY-WC0052	MY-WC0053
サイズ	W860×D460×H800~1200mm	W600×D450×H800~1200mm
天板サイズ	W860×D460mm	W600×D450mm
材 質	ステンレス	
耐荷重	20kg	
キャスター	Φ75mm(静音・対角ストッパー)	

### ■お手入れ・保管方法

- 汚れが付いてしまった場合、アルコールを含んだやわらかい布等で汚れを落としてください。その後、水拭きをしアルコールを拭き取り、乾いた布で水気を取ってください。
- 酸性や塩素系の洗剤は、使用しないでください。破損等の原因となります。
- 風通しのいい直射日光が当たらない場所で保管してください。過度な高温多湿の環境で保管しないでください。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。

【発売元】

 松吉医科器械株式会社  
<https://www.matsuyoshi.co.jp>