








取扱説明書

製品を安全に末永くご使用いただくために、この取扱説明書よくお読みになり、お読みいただいた後はお手元に保管してください。

 危険	取り扱いを誤った場合に、危険な状況が起こり得る、あるいは死亡または重症の可能性が想定される内容を示しています。
 注意	取り扱いを誤った場合に、人が怪我をおったり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

なお、・で記載した事項でも、状況により重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

 **安全上のご注意**

 危険
<ul style="list-style-type: none"> ●配線コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張る等のボックス内部の配線コードを破損する様なことはしないでください。芯線が傷み加熱し、感電、火災の原因となります。 ●本体の上に、水気のある物を近づけないでください。水分が中に入った場合、故障するだけでなく、感電、火災の原因となります。 ●濡れた手で電池交換や配線を触らないでください。感電や故障、サビの原因になることがあります。 ●本製品の設置は、平坦な床の上に確実に設置してください。平坦でない場合本製品が倒れ、機器の故障や破損、ケガの原因となります。 ●警報ブザーは大音量が鳴ります。絶対に耳のそばに近づけないでください。聴覚が低下する恐れがあります。
 注意
<ul style="list-style-type: none"> ●マツヨシAED収納ボックス（スタンド型）はAED（自動体外式除細動器）や救急・非常用備品を収納する製品です。本製品を目的以外の用途では使用しないでください。 ●本製品を組立・使用する前に破損や異常が発生していないか、ご使用前に必ず点検してください。 ●本製品を加工・改造など行わないでください。 ●設置にあたりましては、通行などの妨げにならないように、周囲の状況に十分配慮して設置してください。 ●破損の原因となりますので、床以外に本製品を設置しないでください。 ●本製品は屋内用です。屋外など湿気の多い場所や直射日光の当たる場所への設置はお控えください。

■商品仕様・付属品

●仕様

<ul style="list-style-type: none"> ■外形寸法：W400×D180×H1445mm ■AED収納部内寸：上部=W390×D160×H330mm、下部=W390×D160×H105mm ■下収納部内寸：上部=W390×D160×H375mm、下部=W390×D160×H605mm ■重量：約25kg ■材質：本体=スチール（粉体塗装）、窓=PVC ■電源：9V角型乾電池×1コ（付属） ■警報ブザー動作：・開扉→鳴動 ・閉扉→停止
--

●付属品

<ul style="list-style-type: none"> ■取扱説明書 ■小ネジ×4コ ■中ネジ×6コ（1コ予備） ■ボルト×4コ ■中板×2枚

●ご自身でご準備していただく物

<ul style="list-style-type: none"> ■プラスドライバー、六角レンチ 

●推奨組立人数

<ul style="list-style-type: none"> ■1名でも組立が可能ですが、2名が推奨です。
--

■各部の名称

①全体外観
正面 側面



下収納部

AED収納部 床固定板

②AED収納部外観



警告ブザースイッチ

③AED収納部内部



下部取付穴

④下収納部外観



取手 ロック解除ボタン

部品



小ネジ 中ネジ ボルト

⑤下収納部内部



- ⑦小ネジ×4コ
- ⑧中ネジ×6コ (1コ予備)
- ⑨ボルト×4コ

⑥床固定板外観



⑩中板×2枚

■設置方法

●次の順に進めてください

- (1) ボックスの組立・設置 (2) 警報ブザーの動作確認 (3) AED機器ならび付属品の収納
- (4) ドア締めにて運用開始

●本製品を設置する際、通行の妨げにならないような適切な場所、強度のある平坦な床に設置してください。

《手順》

- (1) 設置場所を決めてください。
- (2) 組立方法に従ってAED収納部と下収納部と床固定板それぞれをネジでしっかりと止めて設置してください。








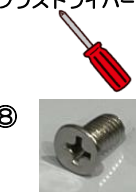









※組立の際はご自身でプラスドライバーと六角レンチをご準備ください。



危険

本製品の組立は、ネジ止めを確実にしっかりと止め、十分な強度のある平坦な床に設置してください。
十分でない場合、機器の故障やケガの原因となります。

■組立方法

<p>床固定板と下部収納の固定を行います。 <<手順>> (1) ⑥床固定板の下部固定ネジと ⑤下収納部の床固定板取付穴を合わせて六角レンチで⑨ボルトを4箇所しっかりと止めてください。</p>    	<p>下収納部とAED収納部の取付を行います。 <<手順>> (2) ④下収納部の上部取付穴と③AED収納部の下部取付穴を合わせて、プラスドライバーで⑧中ネジを5箇所しっかりと止めてください。</p>      	<p>中板の取付を行います。 <<手順>> (3) ③AED収納部内部と⑤下収納部内部の中板取付部に⑩中板と、プラスドライバーで⑦小ネジを2箇所ずつしっかりと止めてください。</p>       
---	---	--

■警報ブザーの動作確認

 <p>警報ブザーON/OFFスイッチ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●出荷の段階にて9V角型乾電池が電池ボックスに収納されています。 ●電池ボックスにある「警報ブザーON/OFFスイッチ」のON(I)を押すと警報ブザーが鳴ります。ブザーの鳴動を確認後、直ちにスイッチをOFF(O)にしてください。 <p style="text-align: center;">⚠ 危険</p> <p style="text-align: center;">警報ブザーは大音量の音が鳴ります。 絶対に耳のそばに近づけないでください。 聴覚が低下する恐れがあります。</p> <p><<電池交換>> 電池交換は電池ボックスのフタを開けて、中にある電池を取り出して交換してください。フタを閉める際は、配線コードを挟まないように注意してください。</p>  <p>9V角型乾電池</p>
---	--

■運用開始

- AED機器ならび付属品（消耗品など）を収納後、警報ブザーON/OFFスイッチをONにし、扉を閉めてください。

■通常運転時のお願い

- AED機器や警報ブザーのバッテリー消耗を防ぐために、**必要時以外は開けないでください。**
- AED機器ならび付属品等はお客様ご自身で補充してください。