

マツヨシ 2Way さく乳器
らくらく CoCo

取扱説明書



このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ございます。

本製品をご使用になる前に、本取扱説明書をよくお読みください。
お読みになったあとは、大切に保管してください。

目次

1. ご使用の前に 「安全上のご注意」	3
2. 製品説明	7
2.1 製品説明	7
2.2 各部品名称 さく乳器 2Way タイプ	7
3. 充電	10
3.1 準備	10
3.2 充電	11
4. 分解の方法	12
4.1 ハンディカップ	12
4.2 ハンズフリーカップ	14
5. 洗浄と消毒について	15
5.1 洗浄	16
5.2 消毒	17
5.3 電動部のクリーニングについて	18
5.4 部品の乾燥・保管	19
6. 組み立てかた	20
6.1 ハンディカップの組み立てかた	20
6.2 ハンズフリーカップの組み立てかた	24
7. 電動部の説明	29
7.1 さく乳の吸引モードの説明	29
7.2 電動部の操作ボタンおよびディスプレイ表示	29
8. さく乳のしかた	30
8.1 電動部の操作説明	30
8.2 ハンズフリータイプのさく乳についてのポイント	33
9. 母乳の保存について	34
9.1 母乳の保存の期限（目安）	34
9.2 保存した母乳の温め方	34
10. 授乳について	36
11. 日常のメンテナンスとお手入れについて	39
12. 故障とお考えの前に	40
13. 廃棄	41
14. 部品仕様	42
15. 定格仕様	43
16. 保証規定	45

1. ご使用の前に 「安全上のご注意」

ご使用前にこの「安全上のご注意」を必ずよくお読みいただき、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、安全のために重要な内容を記載しています。これらの指示に従わないと、けがや製品の損傷につながる可能性がありますので必ずお守りください。

本器を使用する場合、特に子供がいる際は、基本的な安全上の注意を常を守る必要があります。

この取扱説明書は必ず保管してください。

誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負うおそれのある」内容を示します。



注意

この表示の欄は「誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり物的損害の発生」が想定される内容を示します。

お守りいただく内容の種類を、次の表示で説明しています。



指示

製品使用上の必ず実行していただきたい内容を示します。



禁止

製品使用上、禁止行為を示します。



警告



本器を電源に接続したまま、絶対に放置しないでください。
火災、発熱、発火の原因となります。



水やその他の液体に入れたり、かけ流したりした状態で本器を使用しないでください。



入浴中やシャワー中は使用しないでください。



落としたりしないでください。



電動部が水やその他の液体にさらされた場合は、機器に触れず、可能であればコンセントからプラグを抜き、電源を切り、販売元に連絡してください。



USBケーブル、電源アダプターを傷つけたり、加工したりしないでください。
火災、感電、故障の原因となります。



プラグ、コネクタ部が曲がってしまったUSBケーブルは使用しないでください。
ショート、発熱、発火のおそれがあります。



さく乳以外の目的で使わないでください。



乳幼児の手の届くところに置かないでください。
誤って部品を飲み込んだりケガのおそれがあります。



不要になった本器の電動部を一般ゴミとして廃棄しないでください。リチウムイオンポリマー電池内蔵品のため、**40**ページ(第13項)の廃棄の方法に従ってください。



本器を他の機器と隣接したり、積み重ねたりして使用しないでください。無線通信機器を使用する場合は、機器から30cm以上離してください。



注意



本器は一人用です。複数の人が使用すると、健康上のリスク等が生じる可能性があり、保証対象外となります。



車の運転中はさく乳器を使用しないでください。



出産後までさく乳器を使用しないでください。さく乳は陣痛を誘発する可能性があります。

授乳中またはさく乳期間中に妊娠した場合は、使用をただちに中止し、専門の医療機関に相談してください。



初回使用時と使用後は、母乳と皮膚が接触するすべての部品を洗浄、消毒してください。



さく乳器や付属品を子供の近くで使用する場合は、大人がしっかり監視してください。



身体的、感覚的、精神的能力が低下している方、または知識と経験が不足している方(14歳までの子供を含む)は、使用に関する監督または指示を受けていない限り、本器を使用しないでください。



充電完了後はすぐに本器から充電ケーブルを抜いてください。目安の充電時間を超えても(約3.0時間)充電が完了しない場合は、充電を中止してください。火災、発熱、破裂等の原因になります。



水に落ちる可能性のある場所に本器を置いたり保管したりしないでください。



本器を可燃物の近くで使用しないでください。



本器を直火やストーブ、その他熱源のそばに近づけないでください。



毎回使用前に、個々の部品に亀裂、欠け、裂け目、変色、劣化等がないか必ず確認してください。異常があった場合は絶対に使用しないでください。



自分で修理しないでください。また、本器を改造しないでください。



睡眠中や過度に眠気のあるときは本器を使用しないでください。



部品の変形・破損につながるため、電子レンジで加熱、煮沸消毒をしないでください。



乳房が痛むときは、使用を控えてください。また、さく乳により不快感や痛みを引き起こした場合は、本器の電源を切り、乳房からさく乳口を取り外してください。



部品が正しく組み立てられているか、確認してから使用してください。

正しく組み立てられていないとさく乳ができず、故障の原因になります。

2. 製品説明


2.1 製品説明

本器は、授乳中の女性の乳房から母乳をさく乳して収集するための電動式さく乳器です。本器は一人用です。ハンディカップとハンズフリーカップ、2Wayの動作モード（快速吸引モードと優しい吸引モード）でご使用いただけます。


本器は、家庭、オフィス、ホテル等、様々な環境での使用を目的としています。

2.2 各部品名称 さく乳器 2Way タイプ

電動部

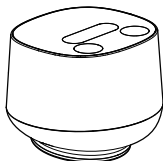

電動部

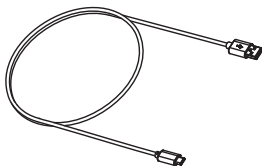

USBケーブル (Type-C)

ハンディカップ・哺乳セット




シリコン
ダイヤフラム①




フランジ

取り出し用の
ベロが付
いています

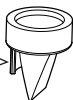


ダックビル弁

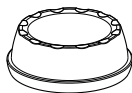

フタ

哺乳セット

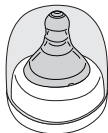

哺乳キャップ



乳首



乳首土台

- ※ 付属の乳首は1サイズで全月齢対応（新生児から卒乳まで）
- ※ 注 乳首は消耗品です。1ヶ月を目安にお取替をお願いします。



お手入れ用スティック
(ニップルケア)



母乳ボトル

ハンズフリーカップ



薄めです

シリコンダイヤフラム②



ブラジャー調整
バックル

トンネル部分 (φ24mm)



さく乳口




フランジリンカー




弁

注ぎ口

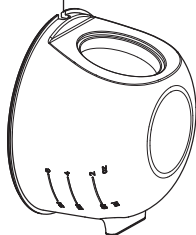

母乳容器

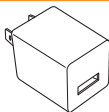

電源アダプター
(別売り)

これらの部品の画像は、パーツの説明用ですので実際と若干異なる場合があります。

3. 充電


3.1 準備

! まず準備として、本器を初めて使用する前に次のことを行ってください。

(1) 電源アダプターを準備してください。(別売り)

⚠ 警告 下記仕様の電源アダプターのみを使用してください。(別売り)

<入力電力AC 100~240V 50/60Hz、出力電力DC 5V 1.0A>

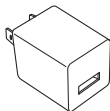

電源アダプター (別売り)

(2) 電源アダプターを使用してUSBケーブルを接続して充電します。本器の電動部にはリチウム電池が内蔵されています。

※11ページ (第3.2項) を参照してください。


(3) 洗淨する前に、母乳および皮膚が触れるすべての部分を分解します。

※12ページ (第4項) を参照してください。

(4) 各部品を洗淨して消毒します。

※15ページ (第5項) を参照してください。

3.2 充電

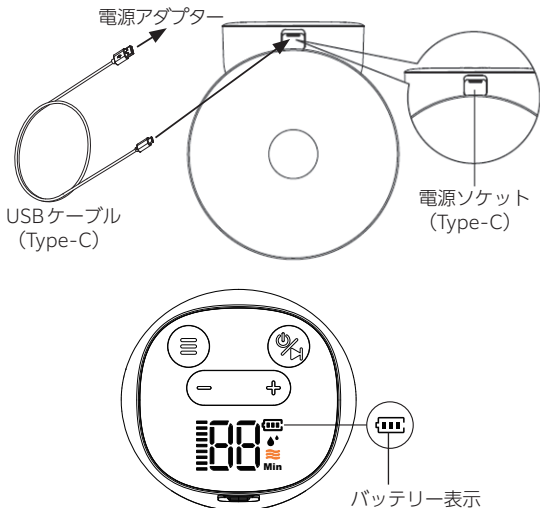

本器を使用する前にUSBケーブルを電動部上部の電源ソケットに差し込み、約2.5時間充電してください。充電中はバッテリー表示が点滅します。充電が完了になりますとバッテリー表示が消えます。


⚠ 警告

本器を過度の温度にさらさないでください。
許容周囲温度の範囲内で充電してください。

4. 分解の方法

4.1 ハンディカップ

- (1) フランジに付いているシリコンダイヤフラム①から電動部を取り外します。

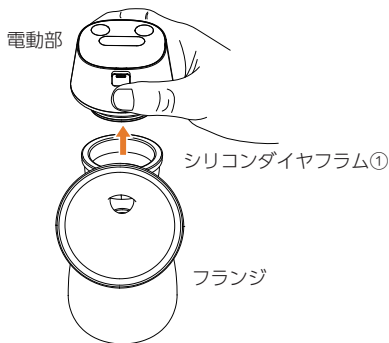

- (2) シリコンダイヤフラム①をフランジから取り外します。

(3) 母乳ボトルからフランジを回転させ取り外します。



(4) フランジの底についているダックビル弁のベロを持ちながら取り外します。

(5) これですべての部品の分解が完了です。



哺乳セット



哺乳
キャップ



乳首土台




乳首




お手入れ用
スティック
(ニップルケア)

4.2 ハンズフリーカップ

- (1) さく乳口のフチのタブ部分を持ち母乳容器から取り外します。

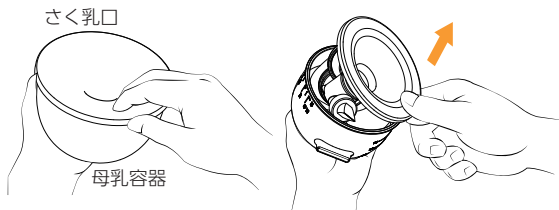

- (2) タブを持ちながらさく乳口からフランジリンカーを取り外します。
- (3) シリコンダイヤフラム②と弁を取り外して分解完了です。

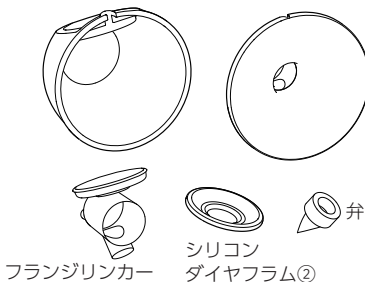


5. 洗浄と消毒について

! 初回使用時と使用後は十分に洗浄したのち、必ず消毒をしてください。



注意 洗えないもの・消毒できないもの

! 電動部、USBケーブルは洗浄できません。
濡らしたり、消毒しないでください。

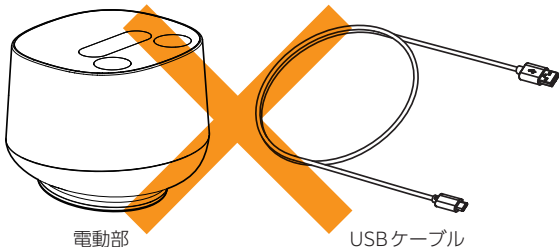

洗えるもの・消毒できるもの

! 上記以外のパーツはブラジャー調整バックルを除き100℃までの高温消毒が可能です。

5.1 洗浄

- ❗ 初回使用時と使用後は、すぐに全ての部品を分解し、菌の繁殖を防ぐため、洗浄可能な部品を全て洗浄してください。
- ❗ 洗浄には専用の哺乳びん洗い洗剤や食器用洗剤をご使用ください。研磨剤の入った洗剤は、傷がつく原因となりますので、使用しないでください。
- ❗ 洗浄の際、硬めのブラシで磨くと損傷するおそれがありますので、やわらかくきれいなブラシをご使用ください。つまようじなどの先の尖ったものは使用しないでください。
- ❗ 特にシリコン製の部品の取り扱いには十分注意してください。破れや傷がつくおそれがありますので洗浄の際には、ブラシを使わずに手で洗うなど、丁寧に取り扱ってください。※キズによる吸引力低下のおそれがあります。
- ❗ 洗浄は、飲料水やミネラルウォーターなど、きれいな水をご使用ください。
- ❗ 洗浄は清潔な場所や容器で行ってください。

乳首の洗浄について

- ❗ 乳首の先端はデリケートです。ブラシなどで洗うときは、乳首専用のブラシを使用し、乳首の先端を指のはらで押さえながら洗ってください。
- ❗ 乳首の吸い穴は特に両手でやさしくもみ洗いをしてください。強く洗ったり引っ張ったりすると、乳首が裂けてモレの原因になります。
- ❗ 乳首には、保護のために食品添加物の安全なオイル状の保護剤を塗布しています。
必ず、洗浄・消毒の上ご使用ください。


5.2 消毒

❗ 部品の洗浄が終了しましたら、消毒を行ってください。

(1) 煮沸消毒の場合

大きく清潔な鍋に水をたっぷり入れ、よく洗浄した部品を入れて、火にかけ沸騰させます。(図参照)

※部品が鍋のフチについて変形するおそれがありますので、大きな鍋にたっぷり水を入れて消毒してください。

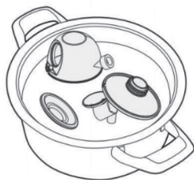

※消毒時間は沸騰したお湯に入れて3～5分です。過度な煮沸は部品を早くいためるおそれがあります。

(2) 薬液消毒の場合

哺乳びんや乳首専用の消毒液を使います。詳しくは、消毒液の取扱説明書に従ってください。

※薬液消毒の場合、部品の色が変わることがあります。

(3) 電子レンジ消毒の場合



不可

電子レンジでの消毒は不可です。


各部品の変形、破損のおそれがありますので、電子レンジでの消毒はしないでください。

5.3 電動部のクリーニングについて



下記に従ってクリーニングをしてください。

- ・ 清潔で湿らせたタオルで拭いてください。(図参照)
- ・ クリーナーや研磨布を使用すると、ディスプレイ表示が見にくくなる可能性があります。

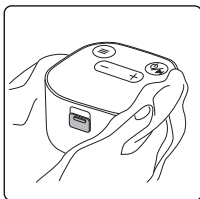

注意

- ・ 電動部を水に浸したり、水をかけたりしないでください。(図参照)



5.4 部品の乾燥・保管

- ❗ 清潔で乾いた布またはペーパータオルで水気を拭き取ってください。もしくは自然乾燥させてください。
- ❗ 乾燥した部品は、次回使用するまで清潔な袋または容器に保管してください。カビや菌の繁殖のおそれがありますので、湿った状態で、密閉容器や袋に部品を保管しないでください。
- ❗ 煮沸後、白い残留物が残る場合があります。水分中のミネラル等ですので、きれいな布で拭き取り、自然乾燥してください。

6. 組み立てかた

! お使いになる前には分解、洗浄、消毒、乾燥、充電をしてください。

⇒7～19ページ（参照第2～5項）

※分解・洗浄・消毒したのち順番に沿って正しく組み立ててください。

※シリコン製の部品は取扱いに十分注意してください。破損や傷がつくおそれがありますので丁寧に取り扱いってください。

※組み立てる前に必ず手をよく洗ってください。

6.1 ハンディカップの組み立てかた

必要な部品：7ページ（2.2項）参照

- ・ フランジ
- ・ 母乳ボトル
- ・ シリコンダイヤフラム①
- ・ 電動部
- ・ ダックビル弁




次の点に注意してください。

! さく乳器の一部の部品は非常に小さいです。洗浄後の部品を組み立てる際は、部品の不足がないか確認してください。


(1) フランジにシリコンダイヤフラム①を取り付けます。

手でしっかり押して端を固定させ、完全に密着させます。

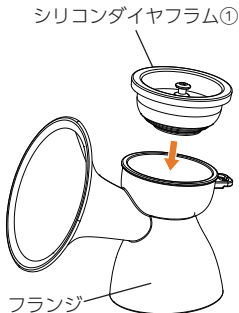

(2) ダックビル弁を取り付けます。

ダックビル弁をフランジの底部までしっかり押します。

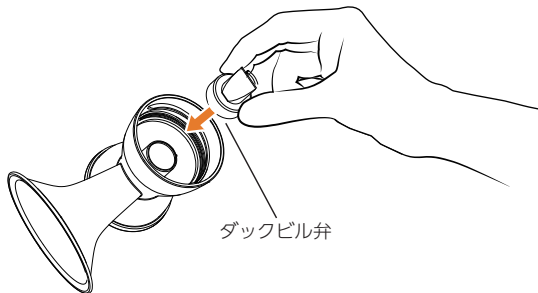

(3) 本体をボトルに取り付けます。

ボトルをフランジの底にねじ込みます。



(4) 電動部を取り付けます。


電動部の電源を切り、本体のシリコンダイヤフラム①に取り付け、完全に密着させます。



(5) さく乳の準備をします。

図のように本体のフランジを乳房にしっかりと押し付け、乳首がさく乳口の中心にあることを確認してください。

さく乳の吸引力を高めるため、本器と胸の位置が歪まないように注意してください。

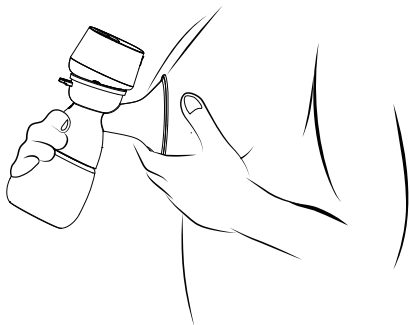

哺乳びんとして使用する場合
36ページを参照ください。

6.2 ハンズフリーカップの組み立てかた

必要な部品：

- ・ さく乳口
- ・ 弁
- ・ シリコンダイヤフラム②
- ・ 母乳ボトル
- ・ フランジリンカー
- ・ 電動部（モーターユニット）

(1) フランジリンカーにシリコンダイヤフラム②を取り付けます。

手で押してフチにしっかりはめ込み、密着させます。


シリコンダイヤフラム②

※①に比べ薄めです。




(2) 弁を取り付けます。

弁を本体のフランジリンカー底部へ正しい方向に取り付けます。

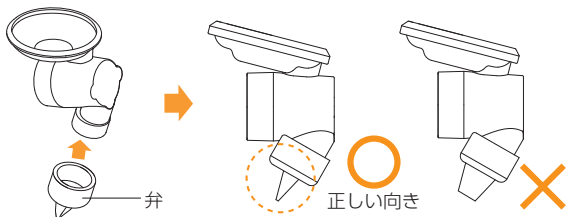

(3) 母乳容器を取り付けます。


組み立てた本体を母乳容器に入れ、シリコンダイヤフラム②取り付け部分を両手で押して端を完全に密着させてください。フランジリンカーの「耳」部分を母乳容器の内部リブに合わせ完全に密閉させます。

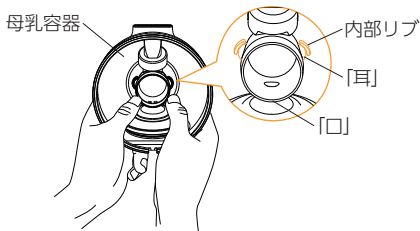

(4) さく乳口を取り付けます。


さく乳口のトンネル部分(φ24mm)をフランジリンカーの口部分にしっかりとめ込み取り付けます。

さく乳口、母乳容器のそれぞれの注ぎ口(切りかき)に、両手で端を押してしっかり密着させます。(図参照)

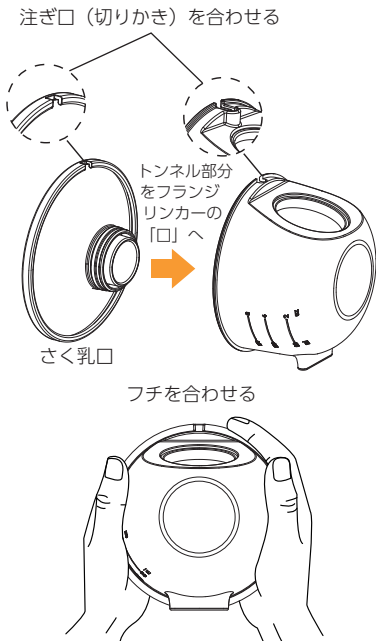


(5) 電動部を取り付けます。

電動部の電源を切り、カップ本体に装着して、完全に密着させます。

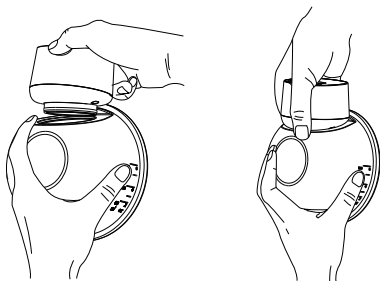


(6) さく乳の準備をします。

さく乳口を胸にしっかりと押し付けます。乳首がさく乳口の中央にあることを確認してください。さく乳の吸引力を高めるため、本器と胸の位置が歪まないように注意してください。状態を確認したら本器をブラジャー内に入れます。

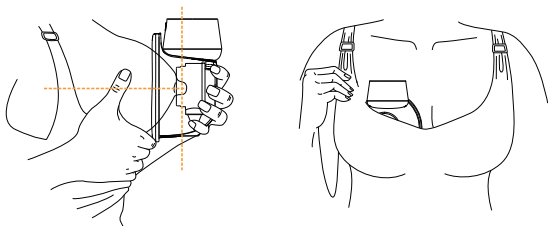

(7) ブラジャーの調整をします。

本器は、ハンズフリータイプなので通常の授乳用ブラジャーの下に着用できます。着用して使用中に不快感や痛みを感じる場合は、ゆったりとした伸縮性のある授乳用ブラジャーを着用するか、ブラジャーの両端にある調整用のバックルを使用して、ブラジャーベルトの長さを調整してください。

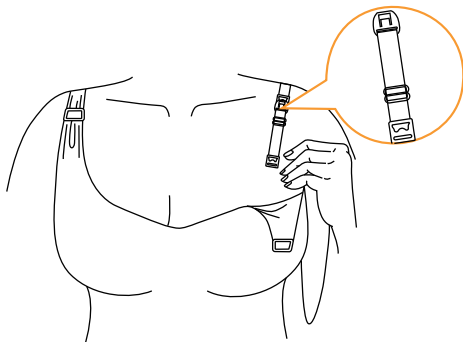

7. 電動部の説明

7.1 さく乳の吸引モードの説明

(1) 快速吸引モード

こちよい速さで、母乳をさく乳

(2) 優しい吸引モード

優しく効率的に母乳をさく乳

7.2 電動部の操作ボタンおよびディスプレイ表示


【操作ボタン】

- ① モード切換ボタン
- ② 電源スタート/ストップボタン
- ③ 吸引力を上げるボタン (+)
- ④ 吸引力を下げるボタン (-)



【ディスプレイ表示】

- ① 吸引の強さ表示
- ② 使用時間 (数字)
- ③ バッテリー表示
- ④ 快速吸引モード表示
- ⑤ 優しい吸引モード表示
- ⑥ 使用時間の単位 (Min 分)

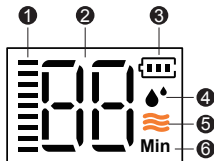

8. さく乳のしかた




注意

- ❗ 身体の状態に合わせて吸引力を適正なレベルに調節してからご使用ください。
強すぎて不快感または痛みを伴うレベルでの使用はしないでください。痛みは、乳房や乳首の外傷の可能性とともに、母乳量を低下させる可能性があります。
- ❗ さく乳するときは手を清潔にしてから行ってください。
- ❗ 片胸あたり10分程度を目安にして左右交互にさく乳してください。ただし、乳房の状態によって、母乳の量には個人差がありますので、様子を見ながら行ってください。
- ❗ さく乳による母乳の量が少ない、できない、または苦痛を感じた場合は専門の医療機関または育児の専門家にご相談ください。

8.1 電動部の操作説明


- (1) カップ本体の部品がそれぞれ正しく組み立てられ、電動部ときちんと接続し密着されていることを確認します。


(参照6.1項、6.2項)

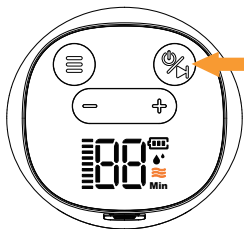


(2) まず側面の電源スタート/ストップボタン「」を1回押し（1秒以上長押し）、電源を入れます。



(3) モード切換ボタン「」を押してから、好みの快適な吸引を選択します。

産後早期には、乳管が機能しにくいいため、最初は快速吸引モード「」を使用することで母乳の分泌を効果的に促進できます。

(4) 吸引モードの選択ができたら、再度、電源スタート/ストップボタン「」を軽く1回押し、吸引を開始します。

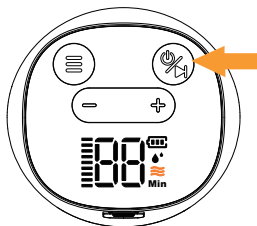
→吸引操作しない場合、5分後に自動的に停止します。



(5) 母乳が流れ始めたらすぐに、モード切換ボタン「」を押して、優しい吸引モード「」を選択することができます。

(6) 吸引力を上げる「+」ボタンと吸引力を下げる「-」ボタンで調整し、最適な吸引のレベルを見つけます。

→ 吸引動作が開始しましたら、痛みを感じない吸引のレベルまで、吸引力を上げるボタン「+」、吸引力を下げる「-」ボタンを調整して最適な吸引のレベルを見つけます。

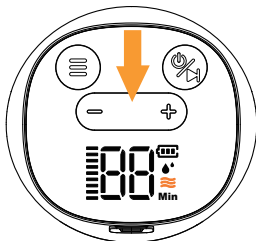

(7) さく乳をやめる場合は、スタート/ストップボタン「⏻」を押して吸引動作を停止します。

→ これにより、カップの位置を再調整することができます。


→ 5分以内にさく乳が再開されない場合、電動部は自動的に電源オフになります。

(8) さく乳器の電源をオフにする場合は、電源入/切スタートボタン「⏻」を長押しして、さく乳器の電源を切にします。

8.2 ハンズフリータイプのさく乳についてのポイント

(1) さく乳動作中

作動している間、少し前かがみになり、乳首からのすべての母乳が容器に入るようにしてください。

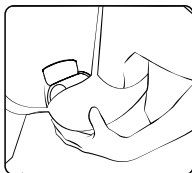

(2) さく乳終了

- ①母乳をこぼさないように、本器のカップをブラジャーから慎重に取り外します。
- ②カップの目盛りを使用して、さく乳した母乳の量を読み取ることができます。母乳容器の目盛りは、母乳のおおよその量を表します。
- ③母乳容器を下に向けて、注ぎ口から母乳を哺乳瓶または容器に注ぎ、保管します。カップのまま冷蔵庫に保管せず、必ず別の容器に移し替えてください。



9. 母乳の保存について

9.1 母乳の保存の期限（目安）

❗ 母乳は保存期限によらず早めにお使いください。

❗ 保存方法は3通りあります。
器具やボトルは必ず洗浄したものを使用してください。

	室温保存 (25℃以下)	冷蔵保存 (4℃以下)	冷凍保存 (約-18℃)
さく乳直後の母乳	2時間	24時間	3か月（推奨） / 6か月（使用可能）
解凍した母乳	2時間	24時間	不可

❗ 解凍は、湯せん、または流水で行ってください。

❗ 解凍した母乳を再度冷凍保存することはできません。

9.2 保存した母乳の温め方

(1) 室温保存・冷凍保存の母乳の場合

- ・ 容器ごと40℃前後のぬるま湯で、人肌まで温めます。

(2) 冷凍保存の母乳の場合

- ・ 冷蔵庫に移し、自然解凍させるか、流水かぬるめのお湯で徐々に解凍し、消毒した哺乳びんに移して人肌まで温めます。
- ・ 温めるときは、50℃以上の熱湯や電子レンジ、直火は決して使用しないでください。母乳の栄養成分の一部が失われます。

(3) その他、注意したいこと

- ・ 保存容器は密閉できるものを使用してください。冷凍の場合は母乳専用パックがおすすめです。
- ・ 保存の際、さく乳した母乳の日付がわかるようにしてください。
- ・ 冷凍/解凍サイクルを繰り返すと、母乳の構造が破壊されます。したがって、母乳は絶対に再冷凍しないでください。
- ・ 損傷の兆候が見られる哺乳びんや部品からの母乳は使用しないでください。



注意



母乳を赤ちゃんに与える前に、必ず母乳の温度を確認してください。



電子レンジや沸騰した鍋のお湯で母乳を解凍・温め等しないでください。これにより、母乳の栄養成分を保存し、火傷を防ぐことができます。



母乳の成分を保存するために、母乳は冷蔵庫で一晩解凍するかボトルまたはバッグを温水(最大37℃)で保持し、解凍したらすぐに使用してください。

10.授乳について

乳首と乳首土台のセットのしかた

- (1) 使用前に必ず乳首の空気弁と乳孔のお手入れを行ってください。

空気弁・乳孔がしっかり開いたことを確認できるまで、軽くまわしながらやさしく押し広げてください。
※空気弁が取れないようにご注意ください。お手入れ用スティック（ニップルケア）を使用してもミルクの出が悪い時は裏から見ていただき半球状のプックリしたところを清潔な指でやさしく両側に広げていただくと、よりスムーズに空気が入ります。

お手入れ用
スティック
(ニップルケア)


空気弁は
外側から

空気弁のお手入れ

乳孔は
内側から

乳孔のお手入れ

- (2) 乳首土台の下から乳首を通します。

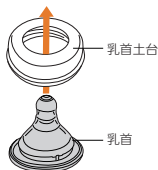

- (3) 乳首のふくらみがきれいに
出るよう、上下に数回引っ
張ってセットします。


(しっかりと数回くり返す)



(4) 乳首土台を裏側にして、乳首の台座部分がヨレ・たるみなく均一な円形になっているか、確認してください。




(5) 斜めにはまらないように注意しながら、母乳ボトルに確実にセットします。

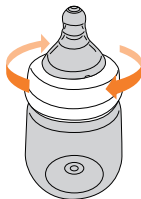

確認したら授乳してください。

(6) 使わないときは哺乳キャップをしておくと衛生的です。

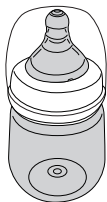

(7) 調乳温度の測り方

付属の乳首「スーパークロスカット」は、穴が開いているのではなく十字に切れ込みの入った乳首です。赤ちゃんが吸うまでミルクが出てこないため、逆さまにしてもミルクが漏れないのが特長です。

肌に当てる場合

市販のミルクの調乳の際の温度確認は、哺乳びんの底で円を描くように回してから、側面をお肌に当てて適温（約40℃）かを確認して下さい。

ニップルケアを使う場合

付属のお手入れ用スティック（ニップルケア）を使って乳首の先を挟むと、スーパークロスカット（乳首）は開きミルクが出てきますので、お肌に当てて適温（約40℃）かを確認してください。（図は一例です）ご都合の良い方法で確認してください。
※「スーパークロスカット」はジェクス株式会社の登録商標です。



注意


- ❗ 使用前に必ずニップルケアで2箇所お手入れを行い、セットしてください。
- ❗ 洗浄・消毒時に裏返った乳首は、元に戻してからセットしてください。
- ❗ 市販のミルクの調乳には一度沸騰させて冷ましたお湯（70℃以上）をご使用ください。沸騰直後の熱湯を入れると、ヤケドなどの原因となり危険です。
- ❗ 乳首を乳首土台に装着時は台座部分がヨレ・たるみなく均一な円形になっていることを確認してください。モレの原因になります。
- ⊘ キズのついた乳首は、使用しないでください。
- ❗ 赤ちゃんを必ず抱っこして授乳してください。
- ❗ 授乳は必ず保護者が行ってください。
- ❗ 歯の生えている赤ちゃんが、噛んで引っ張ると裂けることがありますので注意してください。
- ❗ 乳首は消耗品です。1ヶ月を目安にお取替をお願いします。

11. 日常のメンテナンスとお手入れについて

11.1 部品のお手入れ

⚠ 注意 洗えないもの・消毒できないもの

! 電動部、USBケーブルは洗浄できません。
濡らしたり、消毒しないでください。

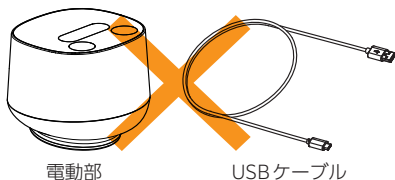

洗浄・消毒可能なもの



上記以外のパーツは100℃まで高温消毒可能です。(ブラジャー調整バックルを除く)

→15ページ(5項)を参照ください。

11.2 内蔵電池（バッテリー）の長持ちのために

- ・ 本器を涼しい場所に保管してください。
- ・ 内蔵電池（バッテリー）を長持ちさせるため完全に消耗する前に充電してください。
- ・ 本器を保管する前に、内蔵電池（バッテリー）を完全に充電してください。

12.故障とお考えの前に

問題	対応
<p>スタート/一時停止ボタン「」を押した後、タイマーがカウントアップしない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●充電完了になっているか、確認してください。なっていない場合は充電完了にしたうえで再度お試しください。 ●これらを行っても改善されない場合は、最寄りの販売店もしくはお問合せ窓口にご連絡してください。
<p>スタート/一時停止ボタン「」を押した後、吸引が作動しない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●電動部のスイッチが入っていることを確認してください。 ●これらを行っても改善されない場合は、最寄りの販売店もしくはお問合せ窓口にご連絡してください。
<p>吸引力が低い、または吸引力がない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●本器の全ての部品が正しい方向で正しい位置に取り付けられ、清潔を保たれ乾燥しているか確認してください。特に弁が正しく装着されていることを確認してください。 ●さく乳中は、さく乳口の乳房の周りが完全に密閉されていることを確認してください。 ●これらの手順を実行しても吸引力が改善されない場合は、最寄りの販売店もしくはお問合せ窓口にご連絡してください。

13. 廃棄

(1) 電動部（モーターユニット）の廃棄

電動部はリチウムイオンポリマー電池を内蔵しています。バッテリーの寿命が来ましたら本体から電動部を離して速やかに廃棄してください。

この電池は内蔵電池のため、交換不能です。廃棄のために電池を絶対に取り外さないでください。

廃棄の際は、下記に送付ください。送料はお客様負担となります。

松吉医科器械株式会社 お客様相談室・機器廃棄担当
〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3階
TEL 03-5816-8819（音声ガイダンス）

(2) カップ、調整バンドの廃棄

部品は、家庭ごみとして処分できるプラスチックでできています。

(3) その他（USBケーブル）





地域の規制に従って廃棄してください。

14. 部品仕様

No.	名称	材質	耐熱 温度	消毒方法		
				煮沸	電子 レンジ	薬液
1	シリコン ダイヤフラム①	シリコーンゴム	120℃	OK	NG	OK
2	ダックヒル弁	シリコーンゴム	120℃	OK	NG	OK
3	フランジ	ポリプロピレン	120℃	OK	NG	OK
4	母乳ボトル	ポリプロピレン	120℃	OK	NG	OK
5	フタ	ポリプロピレン	120℃	OK	NG	OK
6	さく乳口	シリコーンゴム	120℃	OK	NG	OK
7	シリコン ダイヤフラム②	シリコーンゴム	120℃	OK	NG	OK
8	フランジ リンカー	ポリプロピレン	120℃	OK	NG	OK
9	弁	シリコーンゴム	120℃	OK	NG	OK
10	母乳容器	ポリプロピレン	120℃	OK	NG	OK
11	乳首	シリコーンゴム	120℃	OK	NG	OK
12	哺乳キャップ	ポリプロピレン	120℃	OK	NG	OK
13	乳首土台	ポリプロピレン	120℃	OK	NG	OK
14	お手入れ用 スティック (ニップルケア)	ポリプロピレン	120℃	OK	NG	OK
15	電動部	ABS樹脂など リチウム電池	—	—		
16	USBケーブル	一般電気部品	—	—		
17	ブラジャー 調整バックル	ポリウレタン	—	—		

15. 定格仕様

(1) 電動部

機能	快速モード/優しいモード
吸引力レベル	9段階
自動オフ	操作なしで5分経過
外部電源	DC 5V 1A USBType-c charging
使用電池	リチウムイオンポリマー電池 DC3.7V /Li-ion Battery 1000mAh
吸引力	<p>ハンディカップ</p> <p>快速吸引モード「」 : < 285mm Hg</p> <p>優しい吸引モード「」 : < 150mm Hg</p> <p>ハンズフリーカップ</p> <p>快速吸引モード「」 : < 245mm Hg</p> <p>優しい吸引モード「」 : < 170mm Hg</p>
騒音値	50dBA以下
充電時間	約2.5時間
連続稼働時間	約2.0時間
寸法	<p>電動部のみ</p> <p>(W) 幅68mm× (D) 奥行64mm× (H) 高さ54mm</p> <p>ハンディカップ (電動部含む)</p> <p>(W) 幅85mm× (D) 奥行117mm× (H) 高さ185mm</p> <p>ハンズフリーカップ (電動部含む)</p> <p>(W) 幅113mm× (D) 奥行85mm× (H) 高さ145mm</p>

質量	電動部のみ	: 約116g
	ハンディカップ（電動部含む）	: 約194g
	ハンズフリーカップ（電動部含む）	: 約210g
保護等級	IP22	
使用環境	温度：5℃～35℃	
	湿度：15%～93%	
	気圧：70kpa～106kpa	
保管および 輸送環境	温度：-20℃～50℃	
	湿度：15%～93%	
	気圧：70kpa～106kpa	

(2) USB ケーブル

プラグ形状	Type-C
ケーブル長	1.0m

(3) 哺乳セット

乳首	吸い穴の形状：クロスカット サイズ：1サイズ全月齢対応 お手入れ用スティック（ニップルケア）付き
母乳ボトルの 容量	180ml（最大目盛り容量）

(4) 電源アダプター（別売り）

入力	AC 100～240V 50/60Hz
出力	DC 5V 1.0A

16.保証規定

1. 取扱説明書等の注意書にしたがった正常な状態で、お買い上げの日より1年以内に故障した場合に無償保証いたします。
2. 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ)お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
 - (ニ)本書の提示がない場合
 - (ホ)本書にお買い上げ日、ご使用者名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書替えられた場合
 - (ヘ)ご使用後の外装面の傷、破損、および外装部品、付属品の交換
 - (ト)故障の原因が本製品以外に起因する場合
 - (チ)複数人での利用
 - (リ)その他取扱説明書（本書）に記載されていない使用方法による故障および損傷
3. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
4. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきありがとうございました。末永くご愛用の程、お願い致します。下記のとおり製品保証をいたしておりますので、この保証書は大切に保管してください。

販 売 名	マツヨシ2Way さく乳器 らくらく CoCo
製 造 番 号	
お 買 上 日	年 月 日
保 証 期 間	お買上日より1年間
貴 院 名	
ご使用者名	
ご 住 所	
電 話 番 号	
販 売 店 名	
住 所	
TEL/FAX	



〔販売元〕 松吉医科器械株式会社

〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3階

TEL 03-5816-8819（音声ガイダンス）