


マツヨシ湯たんぽ

- 天然ゴム製定番タイプの湯たんぽです。
- 両面ジャバラ加工。

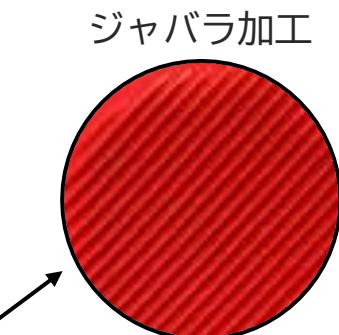

マツヨシ湯たんぽ
MY-HP0001RD



マツヨシ湯たんぽ

品番	MY-HP0001RD
カタログコード	25-4213-00
サイズ	200×360×40mm
容量	2000mL
材質	本体=天然ゴム、口栓=ポリプロピレン
適用温度	80℃まで
付属品	交換用口栓 1個

! 注意 取り扱いを誤った場合に、人が怪我を負ったり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

- 本製品は、本来の目的以外に使用しないでください。また、加工や改造など行わないでください。
- 天然ゴム製品のため、本体に劣化によるひび割れなどが無いか、また本体や口栓(キャップ)に破損や変形などの異常が無いか必ず点検してください。異常が見られる場合はご使用を中止してください。
- 本製品をストーブやヒーターなど火気に近づけないでください。劣化・破損・変形の原因となります。
- 本製品を電子レンジ・直火・IHヒーターなどで直接加熱しないでください。重大事故につながる恐れがあります。
- 本製品に入れるお湯は、約60℃～80℃程度でご用意ください。沸騰したお湯は絶対にご使用しないでください。重大事故につながる恐れがあります。
- お湯を入れる際は、やけどなどに十分注意してください。
- 注湯は必ず7～8分目までとしてください。満水は必ず避けてください。お湯が溢れて、やけどや思わぬ事故につながる恐れがあります。
- 口栓(キャップ)は確実に締めてください。お湯のモレや、やけどなど思わぬ事故につながる恐れがあります。
- 必ずタオルやカバーに包んで、直接肌に触れないようにご使用ください。低温やけどなど思わぬ事故につながる恐れがあります。
- ご使用の際は、長時間同じ部位に当つ続けると、低温やけどなど思わぬ事故につながる恐れがあります。
- 小さなお子様や高齢者がご使用する場合は、十分に注意してご使用ください。思わぬ事故につながる恐れがあります。
- 天然ゴム製品のため、ラテックスアレルギーの方は身体に影響が及ぶ恐れがございますので、ご使用をお控えください。

■ 使用方法

【使用前】

1. 約60℃～80℃にお湯を冷まして、ご用意ください。
2. 準備したお湯を本製品の7～8分目まで注湯します。
3. 空気を抜き、口栓(キャップ)を確実に締めてください。
4. タオルやカバーに包んで、布団や毛布に入れてご使用ください。

【使用後】

1. 布団や毛布から出し、栓を開けて中の水を完全に抜いてください。
2. 本製品を軽くゆすぎ、口を開けたまま十分に乾かしてください。

■ お手入れ・保管方法

- 毎使用後、必ず中の水を完全に抜き、口を開けた状態で十分に乾かしてください。
- 洗剤のご使用はおやめください。水洗いを推奨しています。
- 直射日光や高温多湿を避け、風通しのよい場所で保管してください。
- 口栓を開けた状態で保管してください。
完全に締めたまま長期保管すると、劣化を早める原因になります。

MADE IN CHINA

【発売元】



松吉医科器械株式会社
<https://www.matsuyoshi.co.jp>