

マツヨシ救急カート ベーシック3点セット

MY-ECO1

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただき、ありがとうございます。
 取扱説明書には、お客様が安全にご使用して頂くために必要な注意事項や、正しい使い方が記載されて
 おります。ご使用前には、必ずお読みください。
 なお、内容の確認がいつでもできるよう、取扱説明書は大切に保管してください。



目次

安全上の警告・注意

1. ご使用上の警告・注意
2. 各部の名称
3. 梱包内容
4. 各部取付方法
 - (1) 手すりの取付方法
 - (2) IVポールの取付方法
 - (3) CPRボードの取付方法
 - (4) 仕切板の取付方法
5. 使用方法
 - (1) 引出施錠時・解錠時の注意事項
 - (2) ストッパー付きキャスターの使用方法
 - (3) ポンベ架の使用方法
6. お手入れ・保管方法
7. 仕様

安全上の警告・注意

使用する前に、「安全上の警告・注意」を、よく読んで、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、本製品を安全かつ適正に使用して、使用者等への危害や損害を未然に防止するためのものです。



※危害や損害の大きさと切迫の程度を明確にするため、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の二つに区分して示しています。


図記号の例	
警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負うことが想定される内容を示します。
注意	誤った取り扱いをすると、人がケガを負うことや、物的損害の発生が想定される内容を示します。
	禁止（してはいけないこと）を示します。
	強制（必ず守ること）や指示を示します。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

1. ご使用上の警告・注意

警告

	<ol style="list-style-type: none">1.本製品は、救急時に使用する器具や薬品等を収納・運搬することを目的としております。歩行器や手すりの代わりにするなど、目的以外の用途には使用しないでください。転倒など、思わぬ事故に繋がる恐れがあります。2.改造や分解は絶対に行わないでください。ユーザー様ご自身での修理はお控えください。思わぬ事故や製品の破損・変形の原因となる恐れがあります。3.同梱されている部品および付属品以外の取り付けは行わないでください。意図しない隙間の発生や安定性の低下などにより、思わぬ事故や製品の破損・変形の原因となる恐れがあります。4.本製品に乗ったり、手をついたり、寄りかかったりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。5.滑りやすい材質の床では、本製品を使用しないでください。不意に動き、人にぶつかってケガをしたり、製品が破損する恐れがあります。6.天板上やカート内に耐荷重を超える量の物品を積載しないでください。天板や引き出し、補助天板はそれぞれ耐荷重が異なります。いずれも耐荷重を超えないようご注意ください。転倒や製品の破損・変形の原因となる恐れがあります。7.一方に荷重が偏るような積載の仕方は行わないでください。荷重が偏りすぎるとバランスを崩して転倒する恐れがあります。
	<ol style="list-style-type: none">1.使用前には必ず各部にがたつきや緩みなどがいないかを点検してください。2.本製品のご使用中にがたつきや異常な揺れなどが発生した場合は直ちに使用を中止し、販売店にご相談ください。3.キャスターは消耗品のため、劣化、破損などの不具合が生じた場合は直ちに使用を中止し、キャスターを交換してください。思わぬ事故に繋がる恐れがあります。4.本製品に液体(血液・薬液・水など)が付着した際は放置せず、すぐに拭き取って清潔にしてください。感染や、製品の変質・変色に繋がる恐れがあります。5.本製品を移動させる時以外は、必ずキャスターをロックしてください。不意に動き、人にぶつかってケガをしたり、製品が破損する恐れがあります。6.本製品を移動させる際は、周りに人がいないか、障害物が無いかを十分確認してください。ぶつかってケガを負わせたり、製品や周囲のものが破損する恐れがあります。7.本製品を移動させる際は必ず手すりを持ってください。手すり以外の部分(IVボールやサブテーブルなど)を持って移動させると転倒してケガをしたり、製品や積載物が破損・変形する恐れがあります。8.傾斜や段差のある場所を通過する際には十分注意し、速度を落として通過してください。転倒してケガをしたり、製品や積載物が破損・変形する恐れがあります。

 注意




- 1.本製品は、室内使用を前提に作られています。屋外や水に濡れる環境では使用しないでください。製品の劣化や破損に繋がる恐れがあります。
- 2.製品を倒したり、落下させるなど、強い衝撃を与えないでください。製品や積載物が破損する恐れがあります。
- 3.引出・サブテーブルを引き出した状態で本製品を移動させないでください。ぶつかってケガをしたり、製品や周囲のものが破損する恐れがあります。
- 4.手すりを持って本製品を持ちあげないでください。製品が破損・変形する恐れがあります。
- 5.手すりにもものを掛けたり載せたりしないでください。載せたものが落下してケガをしたり、製品が破損・変形する恐れがあります。
- 6.IVポールのフックにもものを掛けた状態での移動や高さ調節はしないでください。フックが不意に下がったり、掛けたものが落下してケガや破損に繋がる恐れがあります。
- 7.濡れた物品はそのままカートに入れず、しっかりと乾燥させてから収納してください。カビの発生など、製品の劣化に繋がる恐れがあります。
- 8.火気に近づけないでください。また、揮発性の物質など、本体や内容物と化学反応を起こす恐れのある薬品などの近くに設置しないでください。
- 9.内容物の盗難防止のため、使用後は必ずシリンダー錠をかけ、鍵を差し込んだままにしないでください。



- 1.重量物のため、製品の取り扱いには十分ご注意ください。
(本体重量：36.5kg)
特に開梱時や設置時、移動時には周囲の人やものに十分ご注意ください。思わぬケガや破損に繋がる恐れがあります。
- 2.本製品を移動させる際は、天板上のものが落下しないように注意してください。落下したもので思わぬケガをしたり、落下したものが破損・変形する恐れがあります。
- 3.引出やサブテーブルの出し入れは静かに行い、指などを挟まないように注意してください。勢いをつけて出し入れするとケガや内容物の破損に繋がる恐れがあります。
- 4.サブテーブルを使用しないときは本体に収めてください。ぶつかってケガをしたり、製品や周囲のものが破損する恐れがあります。
- 5.IVポールを使用する前に、しっかりと固定されているか確認してください。固定が不十分な場合、フックが不意にさがってケガをする恐れがあります。
- 6.IVポールの固定を緩める際は、ポールのステンレス部分をしっかりと握ってください。
- 7.引出を施錠する際は、すべての引出が奥まで確実に閉まっていることを確認してから施錠してください。1段でも開いていると正しく施錠できないほか、鍵やロック部分の破損に繋がる恐れがあります。
- 8.キャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがありますので、設置場所には十分ご注意ください。

2. 各部の名称

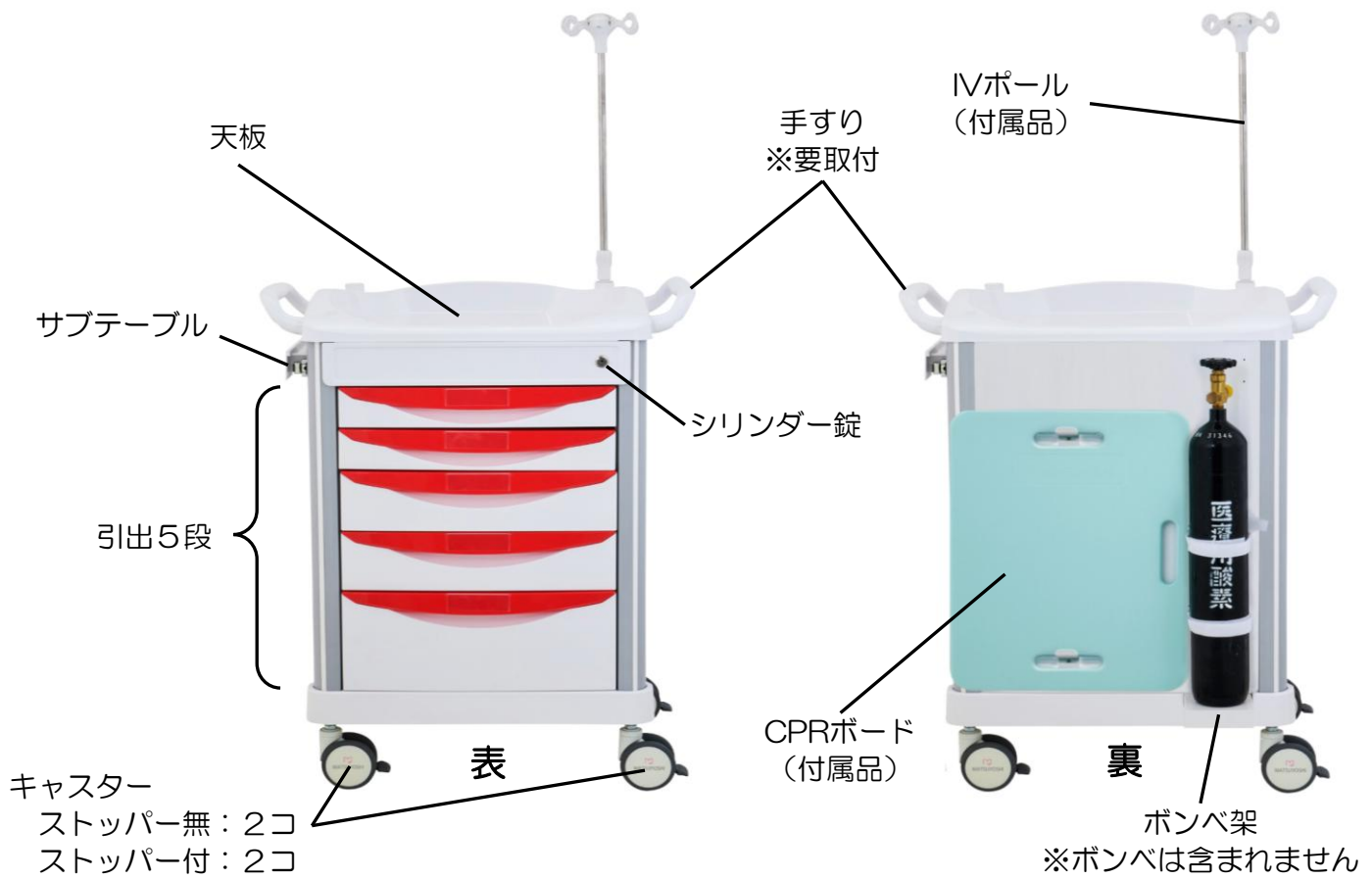

3. 梱包内容



4. 各部取付方法


(1) 手すりの取付方法

- ① 本体側面に装着されている2本のボルトをレンチで外してください。
- ② 2カ所ある手すりの穴にそれぞれボルトを差し込み、レンチでしっかりと固定してください。
ボルトを差し込む際は、「手すりの穴」「手すり内にあるワッシャー」「①でボルトを外した穴」の3カ所をボルトが通るようにしてください。
- ③ 反対側も同様に手すりを取り付けてください。






(2) IVポールの取付方法

- ① IVポールを IVポール用フックに差し込みます。
この際、それぞれに開いている穴の位置を合わせてください。
- ② ビスでポールとフックを固定してください。

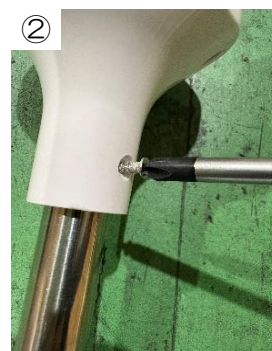

- ③ IVポール用ストッパーの上部分を回して緩め、IVポールを差し込んでください。
- ④ ストッパーの上部分を逆向きに回して、ポールにしっかりと固定してください。
- ⑤ 救急カート本体上部のIVポール差込口にストッパーの下部分をしっかりと差し込んでください。

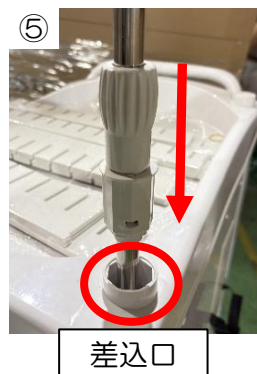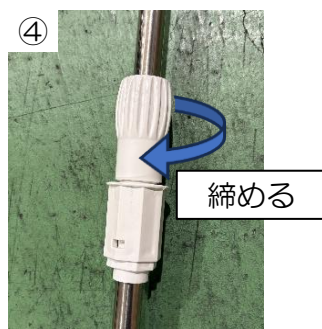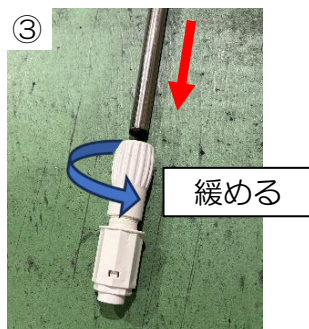

(3) CPRボードの取付方法

- ① 救急カート本体裏面にある上下2つのフックにCPRボードの持ち手を合わせ、下にスライドさせて取り付けてください。



(4) 仕切板の取付方法


仕切板の高さは低・中・高の3種類、仕切板の幅は長・短の2種類があります。それぞれ下表の枚数付属しています。

	低 (引出1・2段目用)	中 (引出3・4段目用)	高 (引出5段目用)
長 (横)	6枚	6枚	2枚
短 (縦)	6枚	6枚	3枚




- ① 使用する引出に対応した高さの仕切板を用意してください。
- ② 長い仕切板の切れ込みを上にして、用途に合わせた間隔で横向きにセットしてください。
- ③ 短い仕切板の切れ込みを下にして、②でセットした仕切板の切れ込みと噛み合わせるように縦向きにセットしてください。

※短い仕切板は引出内に入れられる向きが決まっています。
端と切れ込みの幅が狭い方を手前にしてセットしてください。

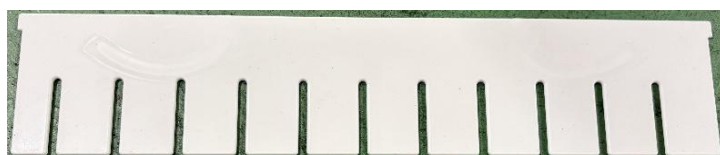

←引出手前

引出奥→

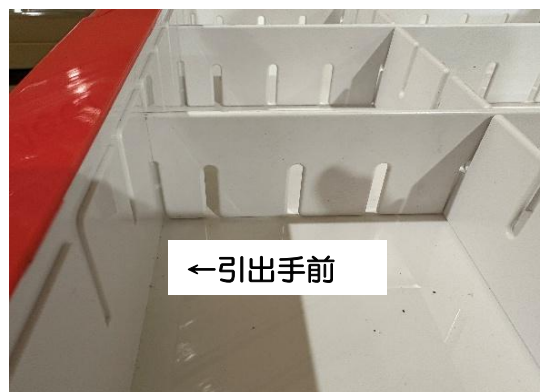

←引出手前


5. 使用方法

(1) 引出施錠時・解錠時の注意事項

引出の上部にあるシリンダー鍵で、全ての引出を施錠・解錠する事ができます。
左図のように引出が全段奥まで閉まっている事を確認してから、施錠・解錠してください。
右図のように、いずれかの引き出しが少しでも引き出された状態では正しく施錠できないほか、
鍵やロック部分の破損に繋がる恐れがあります。



(2) ストッパー付きキャスターの使用法

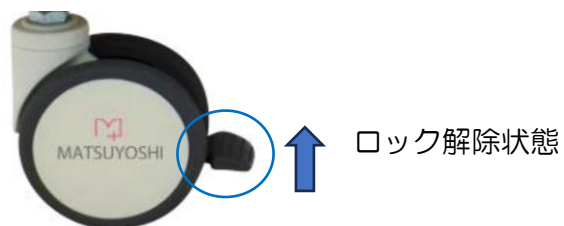

(3) ボンベ架の使用法

- ① 本体裏面のボンベ架を引き出し、ボンベを置いてください。
- ② ボンベに合わせてベルトの長さを調節し、バックルを差し込んでしっかりと固定してください。



6. お手入れ・保管方法

- 製品が汚れた場合は、水拭きあるいは薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で表面を拭きとってください。中性洗剤を使用した場合は水拭きして洗剤が表面に残らないよう、乾拭きをしてしっかり拭き取ってください。
- 天板(ABS製)も含め、75%アルコールでの除菌は可能です。
- 漂白剤やクレンザー、薬液等は製品の劣化に繋がるため、使用しないでください。
- 製品に傷がつくため、ブラシでこすらないでください。

7. 仕様

製品名	マツヨシ救急カート ベーシック3点セット
品番	MY-EC01
寸法	本体外寸=W850×D480×H975mm(手すり含む) 引出内寸(1・2段目)=W430×D380×H75mm 引出内寸(3・4段目)=W430×D380×H110mm 引出内寸(5段目)=W430×D380×H190mm 天板=W500×D410mm サブテーブル=W325×D380mm
耐荷重	天板：30kg、引出：12kg(全段合計)、サブテーブル：5kg
重量	36.5kg
材質	本体=ABS樹脂、スチール IVポール=ステンレス、ABS樹脂
付属品	CPRボード、IVポール、ポンベ架、仕切板

【発売元】

 松吉医科器械株式会社
<https://www.matsuyoshi.co.jp>