

マツヨシ救急カート ソフトクローズタイプ

MY-ECO2

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただき、ありがとうございます。
 取扱説明書には、お客様が安全にご使用して頂くために必要な注意事項や、正しい使い方が記載されております。ご使用前には、必ずお読みください。
 なお、内容の確認がいつでもできるよう、取扱説明書は大切に保管してください。



目次

1. ご使用上の警告・注意
2. 各部の名称
3. 手すりの取付方法
4. オプションの取付方法
 - ポンベ架台
 - CPRボード
 - IVポール
 - 仕切板について
5. キャスターについて
6. お手入れ・保管方法
7. 仕様

安全上の警告・注意

使用する前に、「安全上の警告・注意」を、よく読んで、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、本製品を安全かつ適正に使用して、使用者等への危害や損害を未然に防止するためのものです。



※危害や損害の大きさと切迫の程度を明確にするため、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の二つに区分して示しています。


図記号の例	
警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負うことが想定される内容を示します。
注意	誤った取り扱いをすると、人がケガを負うことや、物的損害の発生が想定される内容を示します。
	禁止（してはいけないこと）を示します。
	強制（必ず守ること）や指示を示します。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

1. ご使用上の警告・注意

警告

	<ol style="list-style-type: none">1.本製品は、救急時に使用する器具や薬品等を収納・運搬することを目的としております。歩行器や手すりの代わりにするなど、目的以外の用途には使用しないでください。転倒など、思わぬ事故に繋がる恐れがあります。2.改造や分解は絶対に行わないでください。ユーザー様ご自身での修理はお控えください。思わぬ事故や製品の破損・変形の原因となる恐れがあります。3.同梱されている部品および付属品以外の取り付けは行わないでください。意図しない隙間の発生や安定性の低下などにより、思わぬ事故や製品の破損・変形の原因となる恐れがあります。4.本製品に乗ったり、手をついたり、寄りかかったりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。5.滑りやすい材質の床では、本製品を使用しないでください。不意に動き、人にぶつかってケガをしたり、製品が破損する恐れがあります。6.天板上やカート内に耐荷重を超える量の物品を積載しないでください。天板や引き出し、補助天板はそれぞれ耐荷重が異なります。いずれも耐荷重を超えないようご注意ください。転倒や製品の破損・変形の原因となる恐れがあります。7.一方に荷重が偏るような積載の仕方は行わないでください。荷重が偏りすぎるとバランスを崩して転倒する恐れがあります。
	<ol style="list-style-type: none">1.本製品は、室内使用を前提に作られています。屋外や水に濡れる環境では使用しないでください。製品の劣化や破損に繋がる恐れがあります。2.製品を倒したり、落下させるなど、強い衝撃を与えないでください。製品や積載物が破損する恐れがあります。3.引出・サブテーブルを引き出した状態で本製品を移動させないでください。ぶつかってケガをしたり、製品や周囲のものが破損する恐れがあります。4.手すりを持って本製品を持ちあげないでください。製品が破損・変形する恐れがあります。5.手すりにもものを掛けたり載せたりしないでください。載せたものが落下してケガをしたり、製品が破損・変形する恐れがあります。6.IVポールのフックにもものを掛けた状態での移動や高さ調節はしないでください。フックが不意に下がったり、掛けたものが落下してケガや破損に繋がる恐れがあります。7.濡れた物品はそのままカートに入れず、しっかりと乾燥させてから収納してください。カビの発生など、製品の劣化に繋がる恐れがあります。8.火気に近づけないでください。また、揮発性の物質など、本体や内容物と化学反応を起こす恐れのある薬品などの近くに設置しないでください。9.内容物の盗難防止のため、使用後は必ずシリンダー錠をかけ、鍵を差し込んだままにしないでください。

 注意




- 1.本製品は、室内使用を前提に作られています。屋外や水に濡れる環境では使用しないでください。製品の劣化や破損に繋がる恐れがあります。
- 2.製品を倒したり、落下させるなど、強い衝撃を与えないでください。製品や積載物が破損する恐れがあります。
- 3.引出・サブテーブルを引き出した状態で本製品を移動させないでください。ぶつかってケガをしたり、製品や周囲のものが破損する恐れがあります。
- 4.手すりを持って本製品を持ちあげないでください。製品が破損・変形する恐れがあります。
- 5.手すりにもものを掛けたり載せたりしないでください。載せたものが落下してケガをしたり、製品が破損・変形する恐れがあります。
- 6.IVポールのフックにもものを掛けた状態での移動や高さ調節はしないでください。フックが不意に下がったり、掛けたものが落下してケガや破損に繋がる恐れがあります。
- 7.濡れた物品はそのままカートに入れず、しっかりと乾燥させてから収納してください。カビの発生など、製品の劣化に繋がる恐れがあります。
- 8.火気に近づけないでください。また、揮発性の物質など、本体や内容物と化学反応を起こす恐れのある薬品などの近くに設置しないでください。
- 9.内容物の盗難防止のため、使用後は必ずシリンダー錠をかけ、鍵を差し込んだままにしないでください。



- 1.重量物のため、製品の取り扱いには十分ご注意ください。
(本体重量：48kg)
特に開梱時や設置時、移動時には周囲の人やものに十分ご注意ください。思わぬケガや破損に繋がる恐れがあります。
- 2.本製品を移動させる際は、天板上のものが落下しないように注意してください。落下したもので思わぬケガをしたり、落下したものが破損・変形する恐れがあります。
- 3.引出やサブテーブルの出し入れは静かに行い、指などを挟まないように注意してください。勢いをつけて出し入れするとケガや内容物の破損に繋がる恐れがあります。
- 4.サブテーブルを使用しないときは本体に収めてください。ぶつかってケガをしたり、製品や周囲のものが破損する恐れがあります。
- 5.IVポールを使用する前に、レバーが下がっており、しっかりと固定されているか確認してください。固定が不十分な場合、フックが不意にさがってケガをする恐れがあります。
- 6.IVポールの固定を緩める際は、ポールのステンレス部分をしっかりと握ってください。
- 7.引出を施錠する際は、すべての引出が奥まで確実に閉まっていることを確認してから施錠してください。1段でも開いていると正しく施錠できないほか、鍵やロック部分の破損に繋がる恐れがあります。
- 8.キャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがありますので、設置場所には十分ご注意ください。

2. 各部の名称

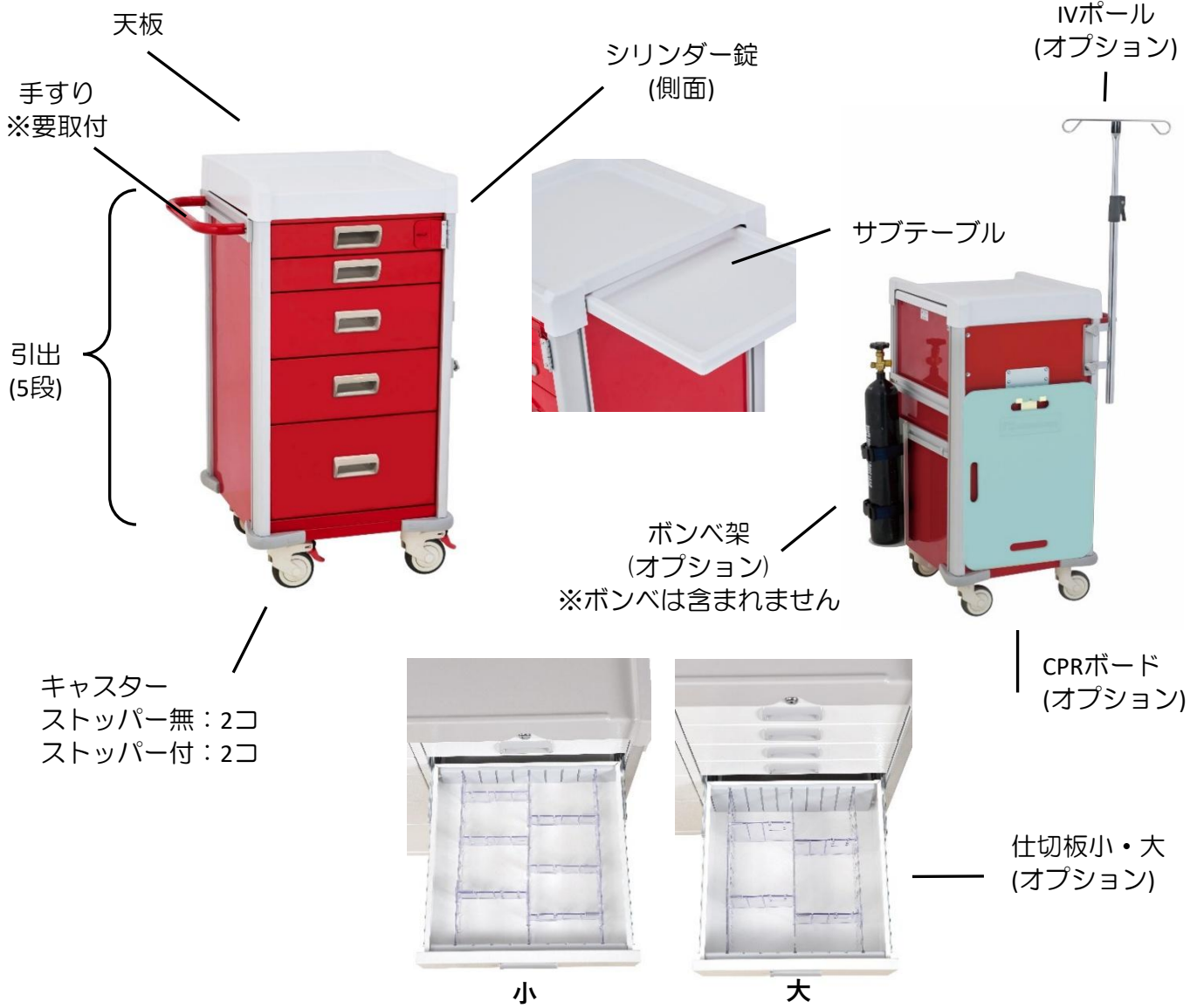

上記以外の梱包内容




穴ふさぎキャップ
×8個



引出用鍵
×2個


両面テープ2枚
天板固定用

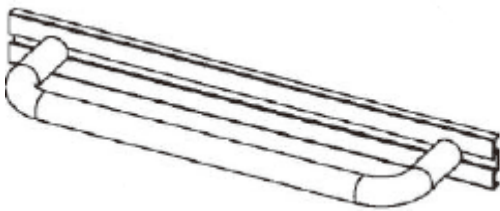


手すり ×1個



六角レンチ (4mm)
×1個

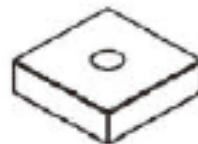

スライド固定ブロック
×2個

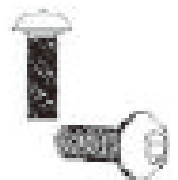


ネジ×2個

(3)手すりの取付方法



天板を外します

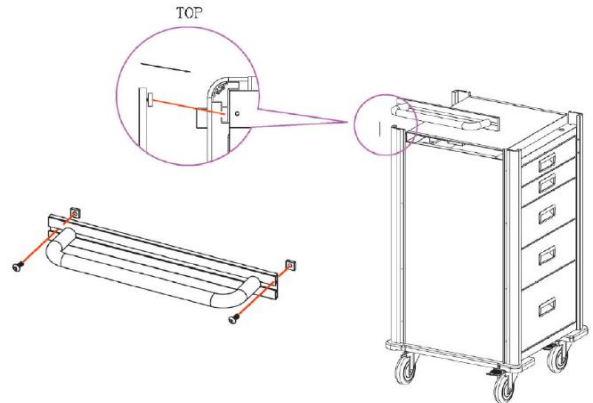


両側の溝にスライド固定ブロックを入れ、手すりを上段で仮止めします。適切な位置にスライドさせネジでしっかり固定します。


上から見た図

上から見た図


正面から見た図

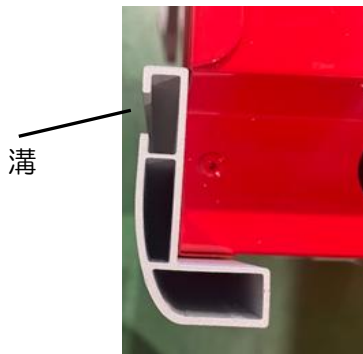

溝

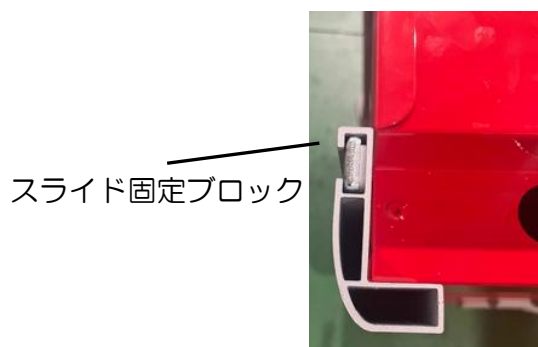

スライド固定ブロック

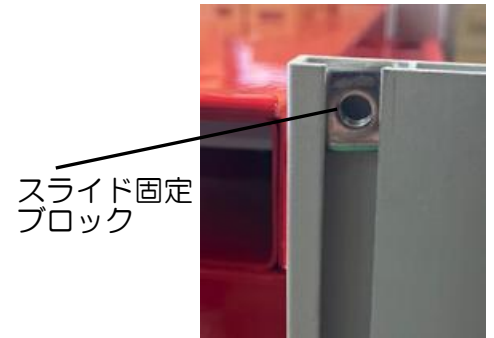

スライド固定ブロック


上から見た図

正面から見た図



キャップ取付

使わないオプション穴にキャップをはめ込みます。

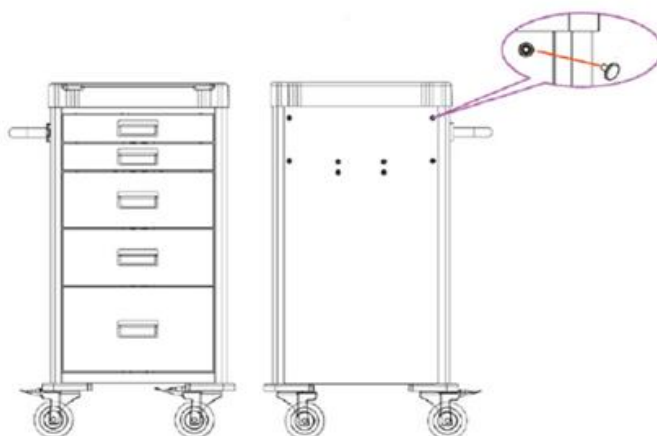

(4) オプションの取付方法


ボンベ架台の取付




ボンベ架台×1個



アクセサリバー
×1個


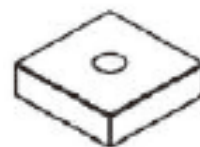


スライド固定ブロック
×4個

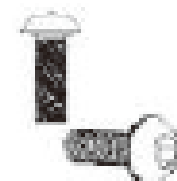

ネジ×4個



※取付には六角レンチ
(4mm) が必要です。

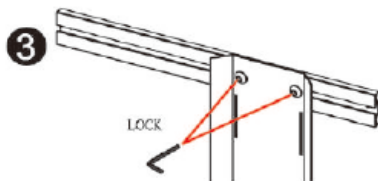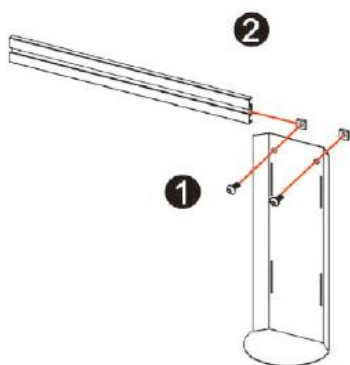


アクセサリバーのキャップを外し、スライド固定ブロックを入れ、3の画像の位置にボンベ架台をネジ止めします。その後、キャップを取り付けます。



天板を外します

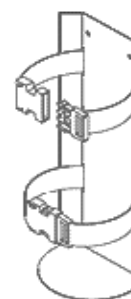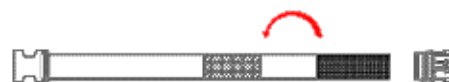


ベルトの長さを適切に調節して
バックルを固定して止めます

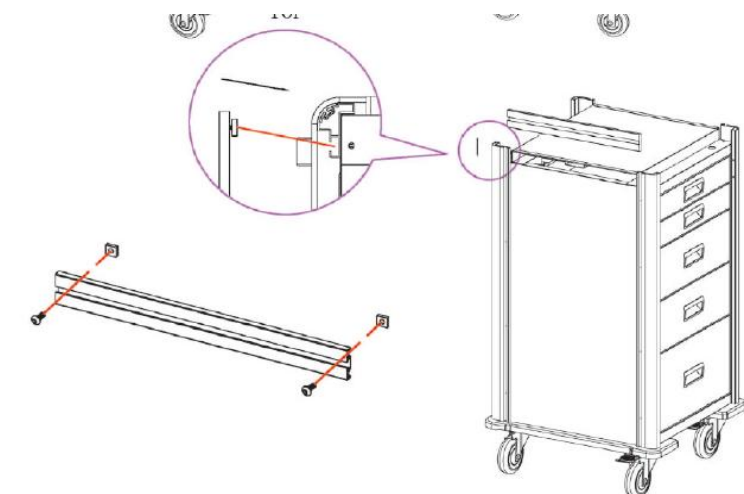

本体側の両サイドの溝にスライド固定ブロックを入れ、ボンベ架台を付けたアクセサリバーを上段で仮止めします。アクセサリバーを下にスライドさせボンベ架台背後の突起を本体下部のバンパーに乗る位置でしっかりネジ止めします。

CPRボードの取付

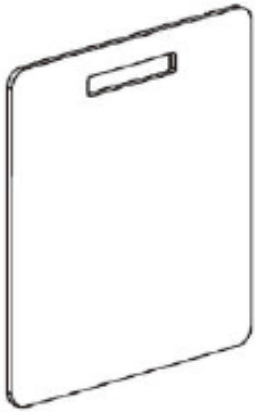

CPRボード×1個




本体付属の取付金具にCPRボードの持ち手を掛けます。

IVポールの取付



IVポール×1個


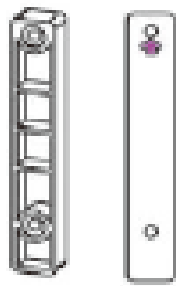


ABS樹脂
取付プレート
×1個




取付用ネジ
6×50mm
×2個


※取付には六角レンチ
(4mm)が必要です。

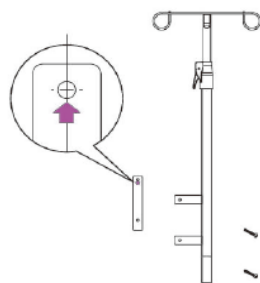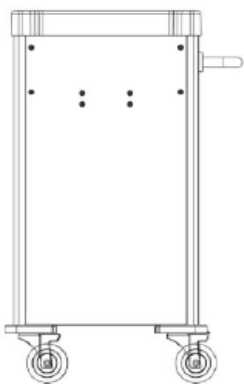

取付プレートにIVポールを
ネジで合わせて本体のネジ穴に固定します。

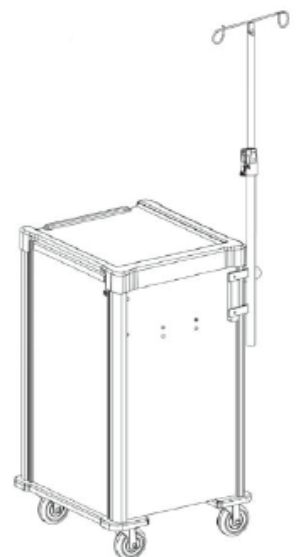

取付完了
IVポール 高さ調節範囲
345~860mm

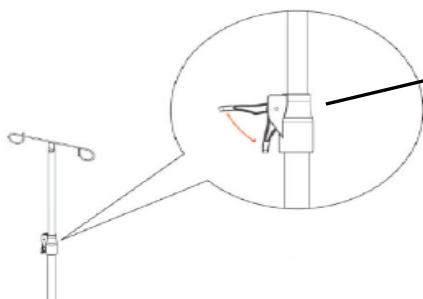


IVポールの昇降は
レバーを下に下げるとロック
上にあげるとロック解除になります

仕切板について


梱包内容

救急カート用仕切板（小）セット

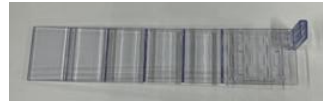


仕切板受け（小用）×2個 仕切板ロング（小用）×3個 仕切板クリップ付き（小用）×4個 クリップ×4個

救急カート用仕切板（大）セット

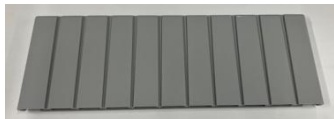


仕切板受け（大用）×2個 仕切板ロング（大用）×3個 仕切板クリップ付き（大用）×4個 クリップ×4個


救急カート用仕切板の取付

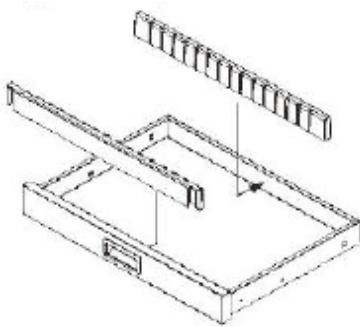


グレーの仕切板受けを引出し正面と並行に取り付けます。

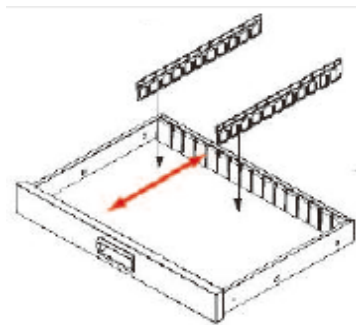


仕切板受けの間に仕切板ロングを取付けます。

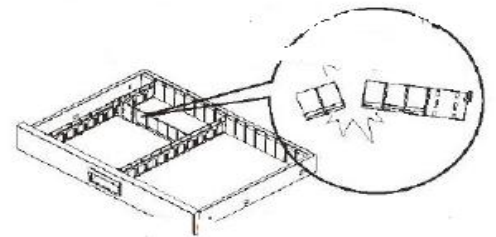

クリップ付きの調整タイプの仕切板は折ることにより長さ調節可能です。一度折ると元には戻らないので注意してください

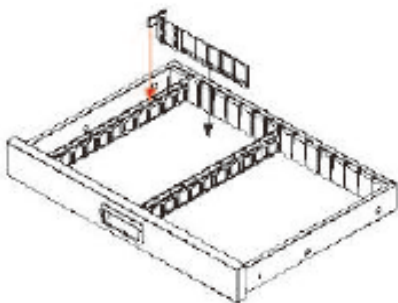

仕切板ロングに仕切板クリップ付きをはめ込み付属のクリップで固定します

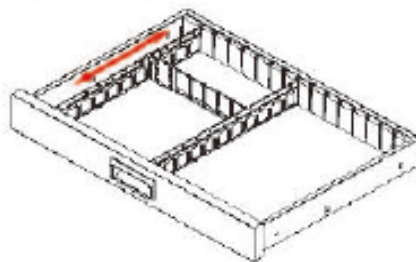


仕切板クリップ付きをスライドさせ位置を調整します。

5. キャスターについて


ブレーキ付きキャスターについて

on/off ペダルは赤色で表示されています。

レバーを下げれば
ブレーキロック

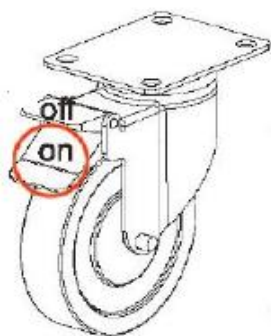

レバーを上げれば
ブレーキロック解除

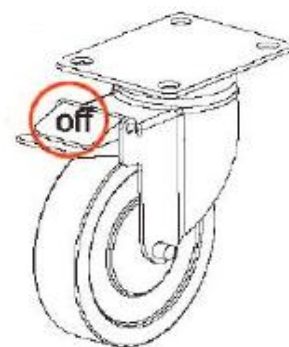

6. お手入れ・保管方法

- 製品が汚れた場合は、水拭きあるいは薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で表面を拭きとってください。中性洗剤を使用した場合は水拭きして洗剤が表面に残らないよう、乾拭きをしてしっかり拭き取ってください。
- 天板 (ABS製) も含め、75%アルコールでの除菌は可能です。
- 漂白剤やクレンザー、薬液等は製品の劣化に繋がるため、使用しないでください。
- 製品に傷がつくため、ブラシでこすらないでください。

7. 仕様

製品名	マツヨシ救急カート ソフトクローズタイプ
品番	MY-EC02
寸法	本体外寸=W591×D540×H1020mm 引出 (小) 内寸(1・2段目)=W360×D389×H57mm 引出 (中) 内寸(3・4段目)=W360×D389×H136mm 引出 (大) 内寸(5段目)=W360×D389×H215mm 天板=W266×D346mm サブテーブル=W325×D380mm
重量	48kg
材質	本体=スチール (粉体塗装) 天板・取っ手・サブテーブル=ABS樹脂