

マツヨシ 静注台・上肢台 MY-2200 MY-2210




取扱説明書



この度は、弊社製品をお買い求めいただき、ありがとうございます。
この取扱説明書には、お客様が安全にご使用して頂くために必要な注意事項や、正しい使い方が記載されております。
ご使用前には必ずお読み下さい。
なお、内容の確認がいつでもできるよう、取扱説明書は大切に保管してください。




安全上の注意

ご使用前に、「安全上の注意」をよく読んで、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、製品を安全かつ適正に使用して、使用者等への危害や損害を未然に防止するためのものです。


図記号の例	図記号の意味
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことや、物的損害の発生が想定される内容を示します。
	禁止（してはいけないこと）を示します。
	強制（必ず守ること）や指示を示します。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

1. ご使用上の注意

 注意	
	<div>1. 本来の目的以外に使用しないでください。</div> <div>2. 改造・分解は行わないでください。強度や耐久性が低下し、思わぬ事故につながる恐れがあります。</div> <div>3. 本製品に座ったり、寄りかかったりしないでください。思わぬ事故につながる恐れがあります。</div>
	<div>1. 調節用ノブネジの固定は、ノブネジのノブが右に回らなくなるまで回してください。調節用ノブネジの締めが緩い場合、思わぬ事故につながる恐れがあります。</div> <div>2. 本製品は、水平で安定したところに設置しご使用ください。転倒など思わぬ事故につながる恐れがあります。</div> <div>3. 枕部と中パイプの固定部がぐらつく際は、枕部の落下の恐れがあるため、ご使用を直ちに中止してください。</div> <div>4. 本製品を使用しない時は、安全な場所に保管してください。</div> <div>5. 本製品とトレー等の別売り商品を併用する際には、設置の安定性、枕部やパイプのグラツキの有無を確認して取り付けてください。安全性や性能に影響を及ぼす状態が見られましたら併用を中止してください。</div> <div>製品の転倒や破損により、思わぬ事故につながる恐れがあります。</div>

2. 各部の名称

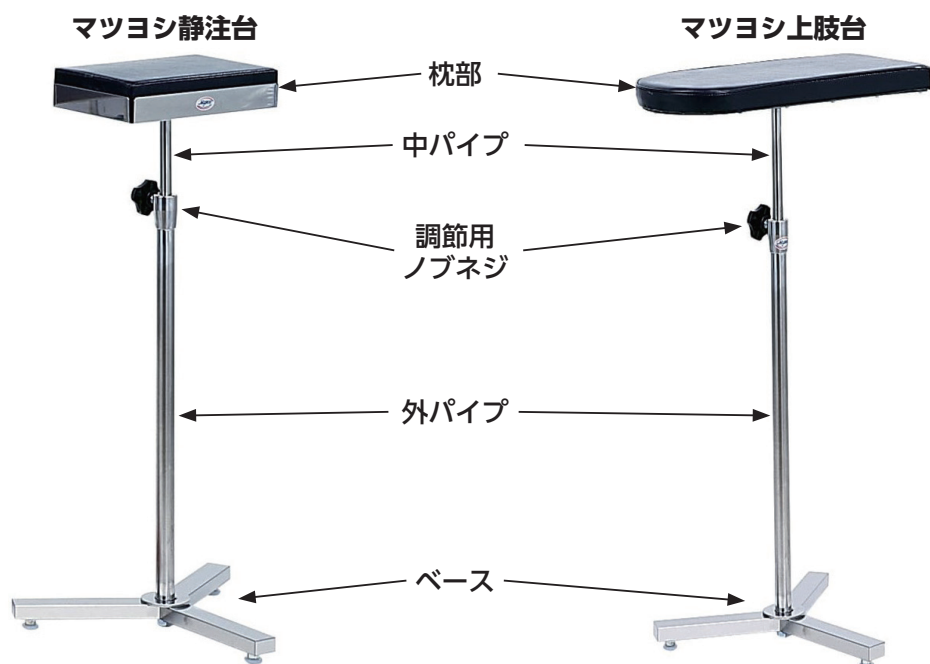

3. 組み立て方法


【準備】

- ・それぞれの部品を梱包から取り出してください。
※ベースに付いている保護フィルム（青いビニール）もはがしてください。

! 部品の不足、破損などを必ず確認してください。

部品一覧

- ① 枕部 1個
- ② ワッシャー（大）、調節用ノブネジ、ボルト（21mm） 各1個
- ③ パイプ 2本（中パイプ、外パイプ）
- ④ ベース 1脚

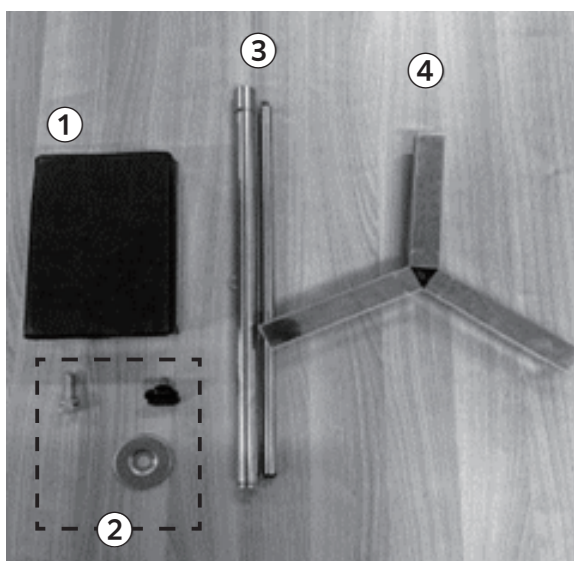

準備する工具



- ・ボルトを締めるための工具（スパナ、モンキーレンチなど）
※ボルト（21mm）を締めるために必要になります。

【組み立て手順】


1. 外パイプのボルトとワッシャーを外してください。




2. ベースの中心にワッシャー（大）を取り付け、その上から外パイプを差し込み、ベースの後側から1項で外したワッシャー、ボルトの順で差し込み、ボルトを工具（別途準備）でしっかりと締めてください。

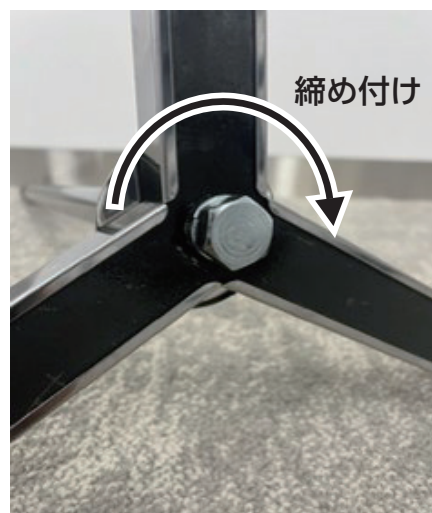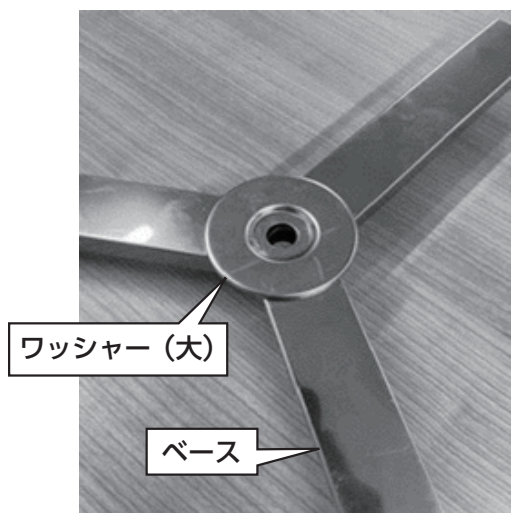

3. 外パイプに中パイプを差し込んでください。その際、中パイプはネジ山が外に出るように差し込んでください。外パイプの上部に調節用ノブネジを取り付ける穴がありますので、調節用ノブネジを時計回りに回してください。

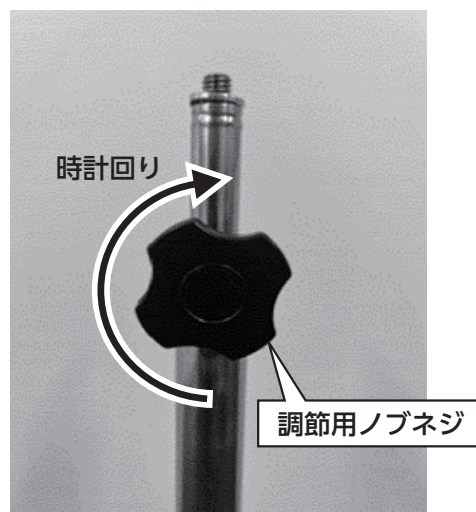

4. 枕部の裏に貼り付けてある袋に入ったワッシャーを取り出してください。中パイプの上部のネジ山に取り出したワッシャーを入れてください。枕部裏側の中心にあるナット部分に中パイプのネジ山部分を入れ、曲がらないように時計回りに回転してください。枕部が回らなくなり、しっかり固定されたら完成です。

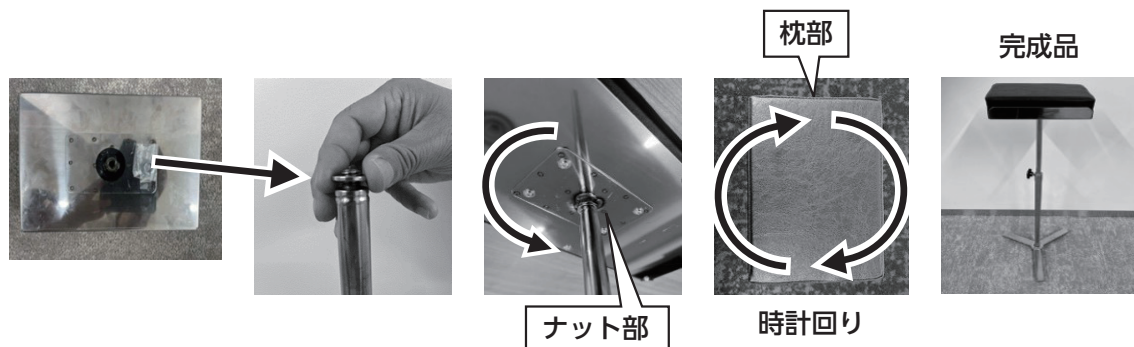


⚠ 注意

- ❗ 組み立て後、枕部と中パイプの固定、外パイプとベースの固定にぐらつきがないか確認してください。ぐらつきがある場合は必ずネジをしっかりと締め直してください。枕部が落下して思わぬ事故につながる恐れがあります。

4. 使用方法

1. 調節用ノブネジを左に回し、緩めてください。

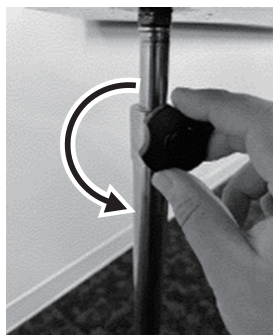

2. 高さを調節してください。

⚠ 注意


- ❗ 腕を乗せたまま高さ調整を絶対に行わないでください。
- ❗ 高さを調節する際は必ず、枕部を持ってから調整を行ってください。枕部が落下して思わぬ事故につながる恐れがあります。



3. 適性の高さになりましたら、調節用ノブネジを右に回して締めてください。

⚠ 注意

- ❗ 調節用ノブネジを固定の際は、ノブネジのノブが、右に最後まで回らなくなるまで回してください。調節用ノブネジの締めが緩いとご使用中に枕部が落下して思わぬ事故につながる恐れがあります。

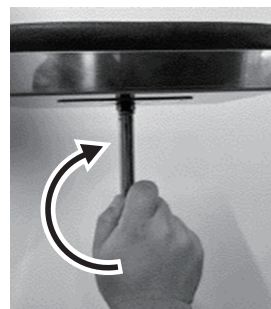

5. お手入れ方法

! 使用後に、お手入れ・部品の損傷の確認をしてください。

- 1. 枕部：汚れが酷い場合は、中性洗剤を含んだ布拭き後、水拭きし最後に乾拭きをしてください。
- 2. フレーム部：水拭き後、乾拭きしてください。

6. 仕様

商品名	マツヨシ静注台	マツヨシ上肢台
品番	MY-2200	MY-2210
本体寸法	全体寸法：W370×D370×H700～970mm 枕部：W240×D160×H50mm	全体寸法：W370×D370×H700～970mm 枕部：W455×D190×H30mm
質量	4.5kg	5kg
材質	フレーム部＝ステンレス 枕部＝ビニールレザー	フレーム部＝ステンレス 枕部＝ビニールレザー

※製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

MEMO

(発売元)



松吉医科器械株式会社

〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3階

TEL: (03) 5816-8819 (音声ガイダンス)