


マツヨシ採血テーブル 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。製品を末永くご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、お読みいただいた後はお手元に保管してください。

【各部の名称】

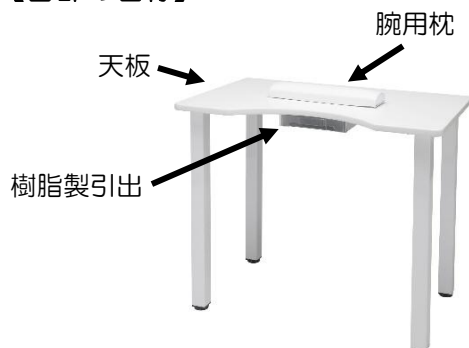

商品名	マツヨシ採血テーブル
品 番	SN-T002
サイズ	W900×D500×H700mm
重 量	13kg
耐荷重	約20kg
材 質	天板=メラミン化粧板、脚部=スチール
付属品	腕用枕(固定なし)

⚠️ 安全上のご注意

- 本製品は、本来の目的以外に使用しないでください。また、加工や改造など行わないでください。改造、分解したものを使用して、事故が発生した場合当方は一切責任を負いかねます。
- ご使用前に各部品が破損や変形などの異常が無いか必ず点検してください。異常が見られる場合はただちに使用を中止してください。
- 本製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないでください。転倒や破損の原因になります。
- 耐荷重(約20kg)以上の重さがかからないようにご使用ください。破損や事故の原因に繋がる恐れがあります。
- 屋外、傾斜や不安定な場所でのご使用はお控えください。転倒や破損の原因になります。
- 各部品より異常音が発生した場合は直ちに使用を中止し、ご購入された販売店にご相談ください。
- 天板をたたく等、強い衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
- 本製品を移動する際は、2人以上で周囲に十分注意してください。

お手入れ・保管方法

- 乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- アルコールなどでの清拭は推奨しておりません。清拭する場合は、必ず速やかにかから拭きをしてアルコールなどが付いたままの状態での放置をしないでください。材質の劣化や変色などの原因になります。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

【発売元】

 松吉医科器械株式会社
<https://www.matsuyoshi.co.jp>