

## マツヨシ アプリワゴン(ワイドタイプ) 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。製品を末永くご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、お読みいただいた後はお手元に保管してください。

### 【各部の名称】



商品名	マツヨシ アプリワゴン ワイドタイプ
品 番	SN-AP003
サイズ	W490×D400×H865(天板高795)mm
重 量	10kg
耐荷重	約25kg
材 質	フレーム=スチール、天板=メラミン化粧板、バスケット=ポリプロピレン
付属品	バスケット
キャスター	Φ50mm

### ⚠️ 安全上のご注意

- 本製品は、本来の目的以外に使用しないでください。また、加工や改造など行わないでください。
- ご使用前に破損や変形などの異常が無いか必ず点検してください。異常が見られる場合はただちに使用を中止してください。
- 本製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないでください。転倒や破損の原因になります。
- 天板やトレーに物を載せすぎたり、偏った積載はしないでください。転倒や積載物落下による事故の原因になります。
- 耐荷重(約25kg)以上の重さがかからないようにご使用ください。破損や事故の原因に繋がる恐れがあります。
- 屋外、傾斜や不安定な場所でのご使用はお控えください。転倒や破損の原因になります。
- キャスターや可動部などに異常音が発生した場合は直ちに使用を中止し、ご購入された販売店にご相談ください。

### お手入れ・保管方法

- 乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- アルコールなどでの清拭は推奨しておりません。清拭する場合は、必ず速やかにかから拭きをしてアルコールなどが付いたままの状態では放置をしないでください。材質の劣化や変色などの原因になります。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

### 【発売元】

 松吉医科器械株式会社  
<https://www.matsuyoshi.co.jp>