


マツヨシ フットケアチェア 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。製品を末永くご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、お読みいただいた後はお手元に保管してください。

【各部の名称】

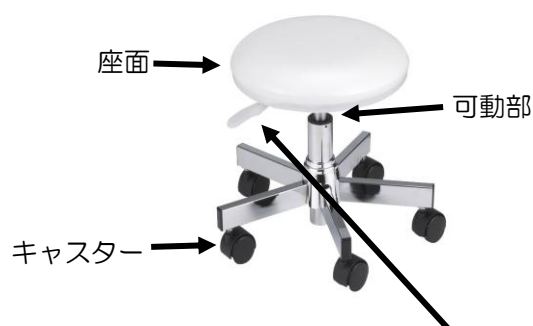

高さ調節レバー
※座面に荷重を掛けレバーを
上げると座面が下がります。
必ず人が座っている状態で
高さ調節してください。

商品名	マツヨシ フットケアチェア
品 番	SN-FC002
サイズ	W450×D450×H380～470mm
座面	Φ350mm
重 量	6kg
材 質	脚部=スチール、張地=ビニールレザー
耐荷重	約80kg
キャスター	Φ50mm

⚠安全上のご注意

- 本製品は、本来の目的以外に使用しないでください。また、加工や改造など行わないでください。
- ご使用前に各部品が破損や変形、緩みなどの異常が無いか必ず点検してください。異常が見られる場合はただちに使用を中止してください。
- 屋外、傾斜や不安定な場所でのご使用はお控えください。転倒や破損の原因になります。
- 耐荷重(約80kg)以上の重さがかからないようにご使用ください。破損や事故の原因に繋がる恐れがあります。
- 座面の一部に過度な荷重を掛けないようにしてください。転倒や破損の原因になります。
- 勢いよく座ったり、急に立ち上がったりしないでください。転倒や破損の原因になります。
- 乳幼児を一人で座らせないでください。思わぬ事故に繋がる恐れがあります。
- キャスターや可動部などに異常が発生した場合は直ちに使用を中止し、ご購入された販売店にご相談ください。
- ガススプリングは分解・注油を絶対に行わないでください。重大事故に繋がる恐れがあります。

お手入れ・保管方法

- 乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- アルコールなどでの清拭は推奨しておりません。清拭する場合は、必ず速やかにかから拭きをしてアルコールなどが付いたままの状態では放置をしないでください。材質の劣化や変色などの原因になります。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

【発売元】

 松吉医科器械株式会社
<https://www.matsuyoshi.co.jp>