

取扱説明書

製品を安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、お読みいただいた後はお手元に必ず保管してください。



注意

取り扱いを誤った場合に、人が怪我を負ったり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

- 本製品は、本来の目的以外に使用しないでください。（乳児のみに使用してください。）
思わぬ事故につながる恐れがあります。
- 加工や改造など行わないでください。製品の破損や思わぬ事故につながる恐れがあります。
- 使用前に破損や変形などの異常が無いか必ず点検してください。異常が見られる場合は使用を中止してください。
思わぬ事故につながる恐れがあります。
- 十分なスペースがあり、水平な場所でご使用ください。傾斜や不安定な場所、また屋外での使用はお控えください。
思わぬ事故につながる恐れがあります。
- 測定の際は、乳児を良く観察しながら、必ず2人以上で行ってください。乳児の体調に異常などがありましたら、使用を中止してください。思わぬ事故につながる恐れがあります。
- カーソル部分に乳児を乗せないでください。重大事故や製品の破損につながる恐れがあります。


【製品仕様】

品 番：	MZ10028-1
測定範囲：	20.0～100.0cm(0.2cm単位)
サイズ：	W340×L1110×H140mm
重 量：	約700g
材 質：	本体=アルミ カーソル=ABS

【お手入れ方法・保管方法】

- 毎回使用後に水拭きをし、乾かしてから保管してください。
- 汚れの酷い場合、中性洗剤を染み込ませた布で汚れを拭き取ってください。拭き取り後、必ず水拭きしてください。
アルコール消毒液、塩素系洗剤、フェノール系消毒剤などでの拭き取りはお控えください。
- 高温・多湿、乳児の手の届かない場所を避け、風通しの良い直射日光が当たらない場所で保管してください。

【各部の名称】

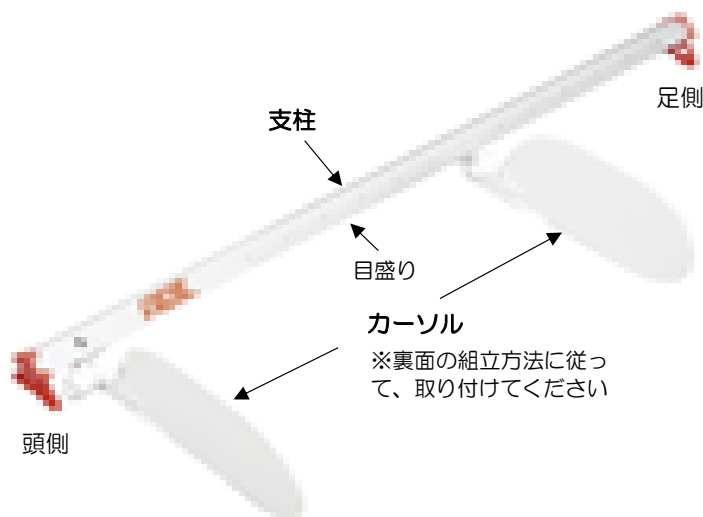


【使用方法】

- 1.頭側・足側のカーソルを可動部の最大まで伸ばしてください。
- 2.乳児の頭を本製品の目盛り0cmに合わせてください。
- 3.測定者の手で乳児の膝を伸ばしてください。
- 4.乳児の足裏にカーソルを合わせて目盛を読み取ってください。


【組立方法】

以下の手順で頭側、足側のカーソルを取り付けてください。

1. 〇部のパーツを分解します

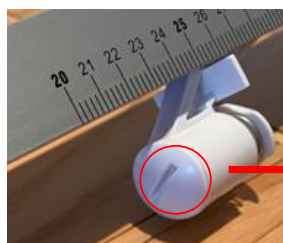


窪みをコインなどを使用して左に回す

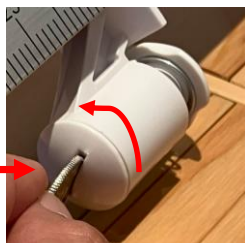


プラグ

ネジ(バネ付き)

2. 分解したプラグにカーソルを通し、ネジ（バネ付き）を押し付けながら回し入れ、再度取り付けます。

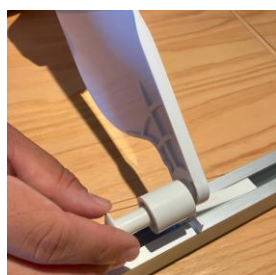

カーソルの穴にプラグを通す

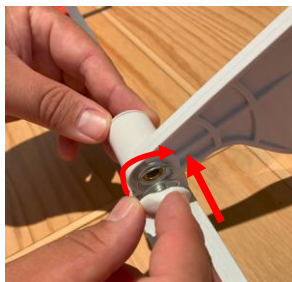

反対側からバネを押し付けながら、右に回す

【発売元】

 松吉医科器械株式会社
<https://www.matsuyoshi.co.jp>