



取扱説明書

- [ご使用前に] △ 製品の安全確認してから、ご使用ください。
 △ ご使用前に必ずこの説明書をお読み上、正しくお使いください。


[製品の特徴と用途]

この度はT.M.製品をお買上頂きまして有り難うございます。
 この製品は省スペースで低コスト、気軽に使用できる身長計付体重計を前提に製作されたものです。他の複合機は多機能であるがゆえにトラブルなどの際には全く使用不能になってしまう事がありますが、当機は“分離型”で身長計部と体重計部の付け外しが容易な為、体重計だけの利用やメンテナンスの際に便利です。また、国家検定付きですので、体重証明用等にもご使用いただけます。

[各部名称・組立て]


<身長計部>

1. ベース台に止めてある3本のボルトを外します。
2. 支柱をベース台の穴に合わせて立て、先程外したボルトで固定します。
3. カースルの取付は支柱後方溝側にカースル後方を向け、先端より差し込みます。
4. AHDは二段伸縮式ですので、中支柱を目一杯伸ばしてロックが掛かった事を確認して下さい。


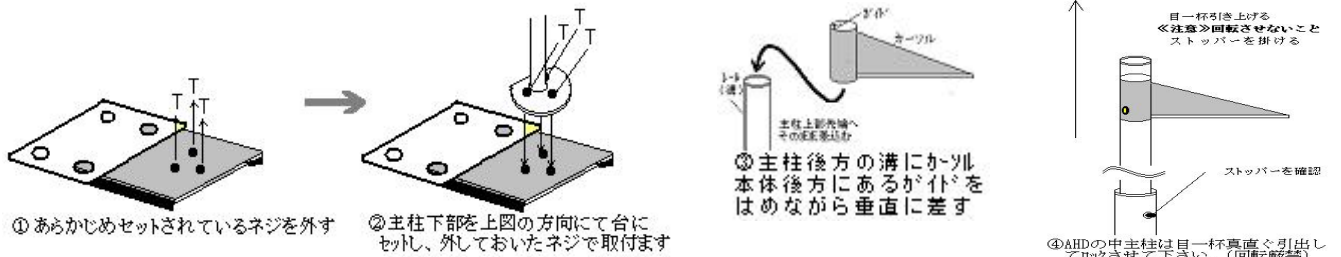


<体重計部>


- ① 本体裏側の脚部にリーチリングがセットされているか確認します
- ② 付属の乾電池又はACアダプターをセットします

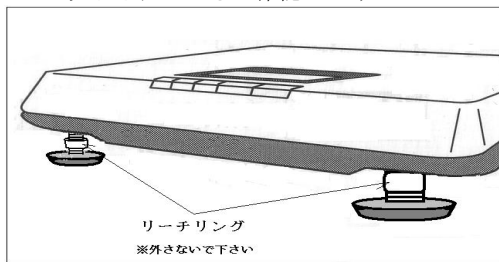

- △ リーチリングは絶対に外さないで下さい。

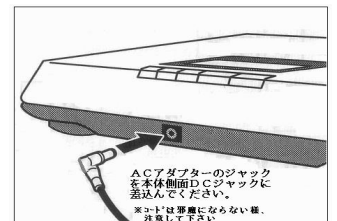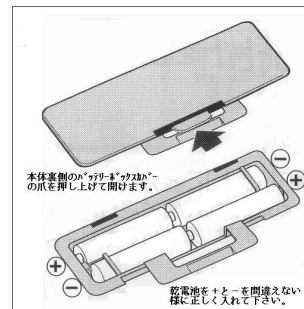

- ③ 身長計部へのセット (AHD・AHP・AHV 共通) は下図の様に、体重計の4つの脚を身長計ベース台の白板(ハーネス板)にそのまま真上からはめ込みます。

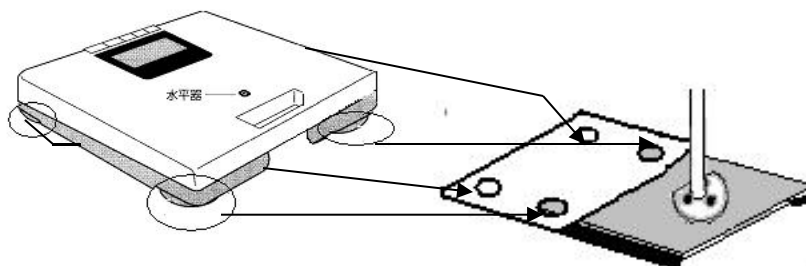

- △ 身長計支柱側に体重計トッテ部がくる様にセットすること
 △ 水平器の振子が枠の中心に来る様に設置すること

[使用方法]


<体重計>

1. **ON/ゼロ** スイッチを押します。
2. 記号が点滅した後、“0.0” kg を表示します。
3. 測定中央部に乗り測定を行います。→ 測定値が表示されます。
 - * 体重が確定すると表示が固定し『表示固定中』▼が点灯します。(▲を押すと解除)
 - * 連続使用される場合は“0.0” kg 表示を確認後、同様に測定を行なってください。
 - * その他、『バックライト』『プリセット風袋』『表示方向切替』等の機能は別冊 WB260A 取扱説明書をご参照下さい。
4. **OFF** スイッチを押して電源を切ります。オートパワー-OFF 機能有(別冊 WB260A 取扱説明参照)

<身長計>

注)AHD 型のみ中支柱を伸ばしロックされた状態を確認してから、測定を開始してください。

1. あらかじめカーソルを上方へ移動させます
2. 支柱を背に背筋を伸ばし真っ直ぐ立ち顎を引きます
(両足のカカトは上げない)
3. 静かにカーソルを降ろし被験者の頭にのせます
4. 右図のように読み取ります(左右両側から読み取れます)
* 正しい測定を行う為、必ず水平に見て読み取ってください

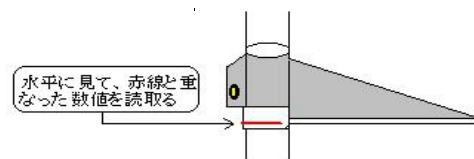

カーソルの透明部分にある赤色線と目盛が重なるところを読んで下さい

[⚠ 使用上の注意]

- ⚠ ケガをする恐れがありますので、本機に飛び乗ったり寄りかかたりしないでください。
- ⚠ 転倒する恐れがありますので、必ず平らな場所に設置し、各部取付も確実に行ってください。
- ⚠ 感電する恐れがありますので、ACアダプターをご利用の際は濡れた手で扱わないでください。
- ⚠ 故障の原因となりますので、移動の際に振り回したり落としたりぶついたりはしないでください。
- ⚠ 使用后、汚れた場合はベンジン、シンナー等で拭かず中性洗剤を水で薄めたものをご利用ください。

[アフターサービスについて]

1. 修理、その他お問合せは本機をお買い求め頂いた販売店にご連絡ください。
2. 分解および改造行為は絶対におやめください。*保証対象外および修理不能の恐れがあります
3. 本機を正常にご使用いただいた上での保証期間はご購入後1年間となります。

[仕様内容]

<体重計部> 秤量：200kg
(3機種共通) 感量：0～100kg=100g / 100～200kg=200g
積載面：309x301mm(積載面迄の高さ=80mm)
重さ：約9.4kg
電源：ACアダプター(付属)、又は単3電池x4本(付属)

<身長計部> **AHD20** 主 柱：ステンレス+軽金属異型パイプ製二段伸縮
カーソル：ABS樹脂成型品
目盛：アナログ 1000～2000mm 2色W目盛
重さ：約3kg
AHP20 主 柱：軽金属異型パイプ製(一本物)
カーソル：ABS樹脂成型品
目盛：アナログ 600～2000mm 2色W目盛
重さ：約1.3kg
AHV16 主 柱：軽金属異型パイプ製(一本物)
カーソル：ABS樹脂成型品
目盛：アナログ 600～1600mm 2色W目盛
重さ：約1.0kg