


このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。お読みになったあとも、すぐ取り出せるところに大切に保管して下さい。また、この製品を譲渡または貸し出しされる場合は、この取扱説明書も一緒にお渡し下さい。	もくじ
1.安全上のご注意……………	1, 2
2.未永くご使用いただくためのご注意……………	3
3.各部の名称……………	3
4.ご使用方法……………	4, 5
5.お手入れ方法……………	6
6.仕様……………	6

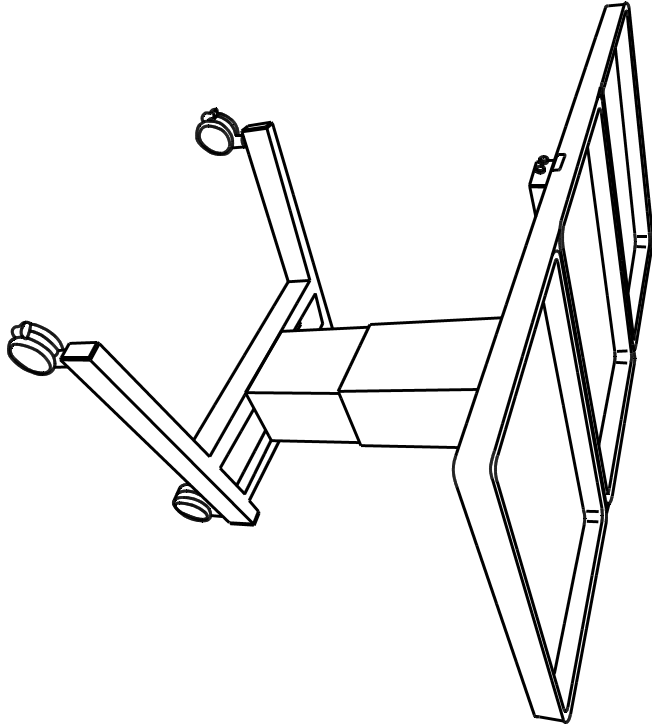

# 取扱説明書 電動昇降式消毒盤台 RIC-1000

YM-0097-R1

## 1. 安全上のご注意

本文中の注意事項の説明は、安全性や製品の品質に関して特に重要な内容ですので必ずお守り下さい。

### ⚠️警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

### ⚠️注意

取り扱いを誤ると、障害を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

### ⚠️警告

- ・直接、水をかけないで下さい。  
漏電し、感電するおそれがあります。
- ・充電コードをコンセントに差した状態で移動させないで下さい。  
プラグやケーブルが傷み、漏電し、感電するおそれがあります。
- ・24時間以上の充電はしないで下さい。  
（充電時間は約3時間です。）  
長時間の充電による過充電防止には対応していないので、バッテリー液漏れ・破裂により、けがや破損するおそれがあります。

### ⚠️注意

- ・乱暴な取り扱いはしないで下さい。  
けがや変形・破損の原因になります。
- ・床に傾斜や段差のある、不安定な場所に止めて作業しないで下さい。  
自走や転倒して、けがをすることがあります。
- ・商品の分解や改造はしないで下さい。  
けがや破損の原因になります。

- ・この商品を、運搬車がわりに使用しないで下さい。  
転倒によりけがをしたり、商品を破損する原因となります。
- ・運送具や乗物がわりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないで下さい。  
（特にお子様に注意して下さい。）  
転倒や破損により、けがをする原因になります。
- ・バット受け枠の上に腰をかけたたりしないで下さい。  
転倒や転落により、けがをすることがあります。
- ・この商品の昇降可能荷重は下記の通りです。昇降可能荷重を超えて、ものをせないで下さい。

昇降可能荷重	0～20kg
--------	--------

- バット受け枠・電動シンリンダンダーが破損したり、本体が倒れてけがをすることがあります。
- ・のせるものがバットからはみださないうにして下さい。  
落下などにより、けがをするおそれがあります。

- ・バット受け枠を昇降させるときは、のせているものが、落下しないように十分注意して行って下さい。  
けがや破損の原因になります。
- ・キヤスターズトッパーの解除時やロック時は、けがや靴の損傷に注意して下さい。
- ・移動させるときは、天板に置いているものが落下しないように十分に注意して行って下さい。  
ものが落下してけがや破損の原因になります。
- ・移動させるときはキヤスターズトッパーを必ず解除して動かして下さい。  
（④ページ「4. ご使用方法」①を参照）  
ロックしたまま動かすと、本体が倒れてけがをしたり、床を傷つけることがあります。また、キヤスターが破損することがあります。
- ・キヤスターのストッパーを操作するときには足で行って下さい。  
足以外で行うと、けがのおそれがあります。
- ・充電中は絶対に作動させないで下さい。  
充電コード、プラグが破損するおそれがあります。
- ・バット受け枠を昇降させるときは、周りにもものがないか確認して下さい。  
商品を破損する原因となります。
- ・ストープなど火気に近付けて使用しないで下さい。  
変色や変形の原因となり、やけどや火災の原因になります。

## 保証書

取扱説明書・本体添付のラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合、下記の事項をご記入の上、販売店へご連絡下さい。無償で修理いたします。


品名／品番 電動昇降式消毒盤台／RIC-1000		保証期間	お買上げ日      年      月      日より1年間	
お客様	お名前	〒      番（      ）	販売店	
	ご住所			

- ※上記の保証期間は取扱説明書などの注意書きにしたがった正常の状態での使用を想定して定めたものです。
- ※保証期間経過後の修理については原則として有償とさせていただきます。
- ※次のような場合には、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。
  - イ）誤った使用、不当な修理や改造による故障及び損傷
  - ロ）お買い上げ後の無理な取り扱い、輸送・落下などによる故障及び損傷
  - ハ）火災・塩害・ガス害・地震・風水害・落雷・その他の天災地変・異常電圧などによる故障及び損傷

## 2. 未永くご使用いただくためのご注意



- この商品は屋内用です。  
屋外での使用や水ぬれは、さびや変色、または故障の原因になります。
- 可動部に注油しないで下さい。  
油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
- キャスターの転がり状態が悪い場合は、キャスター部にごみや糸くずなどが絡まっていないか点検し、ある場合は取り除いて下さい。

## 3. 各部の名称

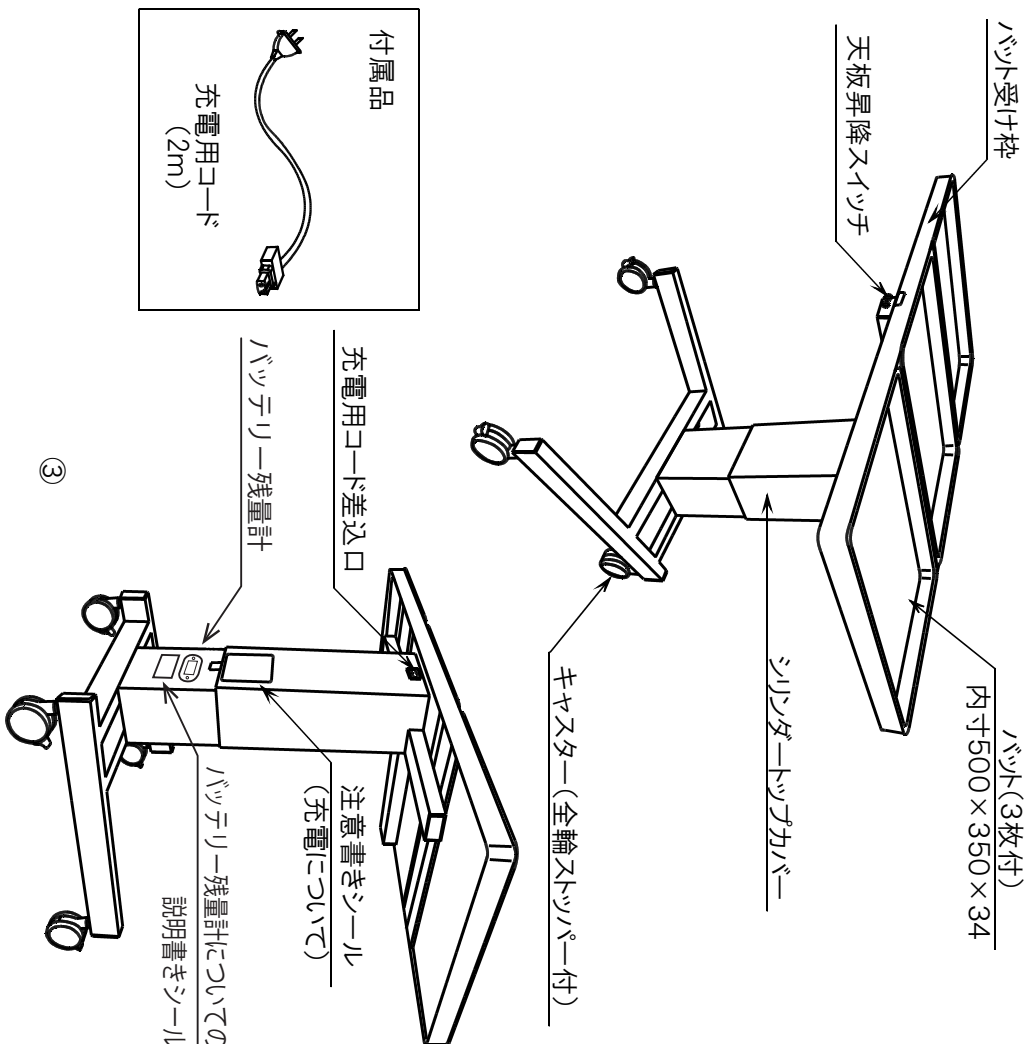


### ④ バッテリー交換方法

- シリンダートップカバーの前後にあるネジ(3本)をはずして下さい。  
この際、カバーが下へ落ちないように片方の手で押えておいて下さい。

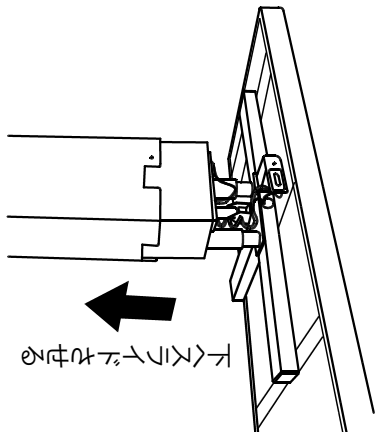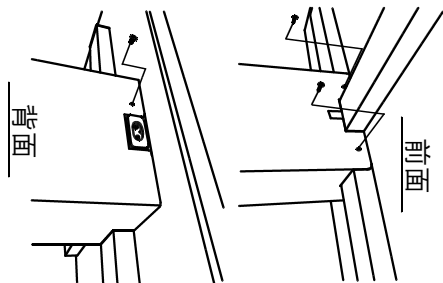

- バッテリーに接続されている端子をはずして下さい。  
注)接続時は ⊕、⊖ を間違えないようにして下さい。
- バッテリーを固定しているマジックテープをはがして下さい。
- バッテリーを交換して下さい

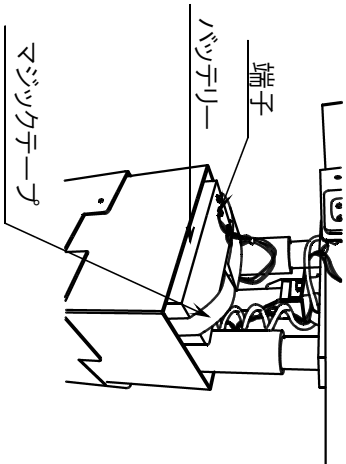

⑤

## 4. ご使用方法

### ① キャスターの操作方法

#### ⚠ 注意

キャスターのストッパーを操作するときは足で行って下さい。  
足以外で行うと、けがをするおそれがあります。

### ② バット受け枠の昇降について

電動シリンダーによって、バット受け枠の高さを815～1115mmまで任意の位置で調節できます。

上昇ボタンを押すとバット受け枠が上昇し、下降ボタンを押すと下降しますので、使い勝手のよい高さになったら手を離して下さい。

#### ⚠ 注意

- バット受け枠を昇降させるときは、のせているものが、落下しないように十分注意して行って下さい。

けがや破損の原因になります。  
・可動部のすきまに手や指を入れないで下さい。

- けがをするおそれがあります。
- 天板を昇降させるときは、周りにものがないか確認して下さい。
- 商品を破損する原因となります。

### ③ 充電について

- 付属の充電用コードを充電用コード差込口に差し込んで下さい。
- 充電用コードをAC100V電源に差し込んで下さい。

※機体背面にある注意書きシール(充電について)をよくお読みになり、正しく充電を行って下さい。

④

## 5. お手入れ方法

通常のお手入れ : 乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。  
汚れがひどい場合 : 以下の手順で汚れを落として下さい。



- うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭き取って下さい。
- 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないよう拭き取って下さい。
- 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※直接水をかけたり、またシンナー系溶剤は使用しないで下さい。

## 6. 仕様

バット受け枠サイズ	W1130×D515mm
昇降高さ	H815～1115mm
上昇スピード	15mm/秒(20kg搭載時)
ベースサイズ	前W700×後W500×D530mm
昇降方式	電動シリンダー(DC12Vバッテリー駆動)
満充電昇降回数	(昇降可能荷重20kgを乗せた状態で)昇降往復約200回
充電時間	約8時間
質量(kg)	41(バット3枚含む)
付属品	充電用コード
バット受け枠	ステンレス製
材質	本体 ステンレス製
材質	ベース ステンレス製
キャスター	φ75 双輪キャスター(ストッパー付)

※満充電昇降回数はバッテリーの状態・使用頻度によって異なります。  
※品質改善のため、予告無く仕様等の変更を行う場合がございます。予めご了承下さい。

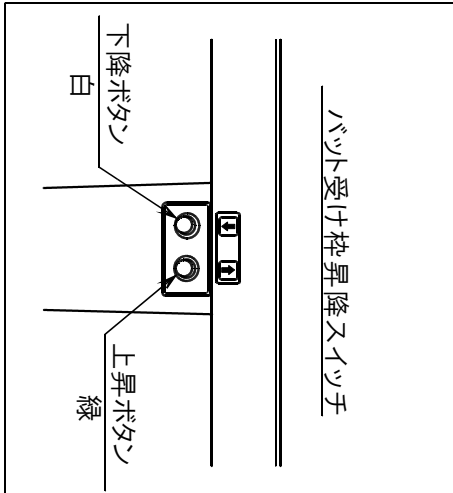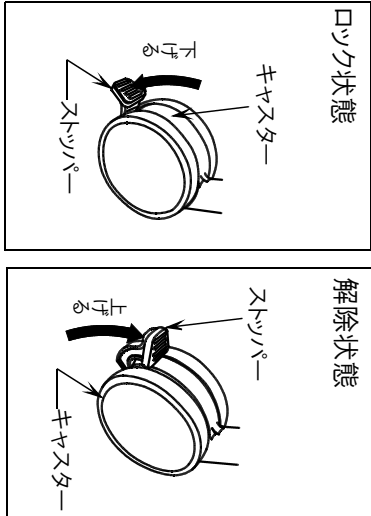

#### ⚠ 注意

・充電中は絶対に作動させないで下さい。  
充電コード、プラグが破損するおそれがあります。

⑥