


マツヨシ ベーシック診察台 取扱説明書

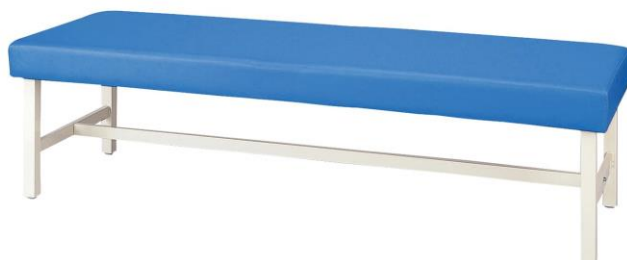

品名	マツヨシ ベーシック診察台
製品サイズ	W600~700×L1800×H500~600mm
重量	約25~29kg
材質	フレーム=スチール マット=ウレタンフォーム 張地=ビニールレザー
耐荷重	100kg

<取扱注意事項>

- ▲本製品は、組み立てのために、13mmのスパナが必要になります。
- 本製品は、診察以外の目的でご使用をお控えください。（1人用になります）
- マッサージ等、重量のかかる治療を行う場合は、他の機種をお選びください。
- 使用前に必ず点検し、異常がある場合は必要な処置を行い、万一の場合には、ただちにご使用をお控えください。
- ご使用は平らな安定した場所でお使い下さい。
- 診察台をゆすったり、脚に斜めの重みがかかるような行為はお控えください。

<組み立て方法>

- 1.診察台天板の裏側の角にH型の脚パイプの取り付け金具がありますので、受け金具のボルトを緩め、H型の脚パイプを差し込んでください。
 - 2.H型の脚パイプを奥まで十分に差し込み、天板裏側角の受け金具のボルトを締め、仮止め状態にします。
 - 3.補強用の長いパイプ端のボルトをはずし、H型の脚パイプの横棒に位置を合わせ、ボルトを通し、しっかりと締め固定し、その後仮止めの受け金具のボルトをしっかりと締め固定してください。
 - 4.脚パイプが取り付けられましたら診察台をゆっくりと起こし、ぐらつき等の異常がないことを確認してください。
- ❗必要に応じてアジャスターで段差の微調整をしてください。

【販売元】



松吉医科器械株式会社

〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3階
TEL:03-5816-8819（音声ガイダンス）