

4. 品質表示

■ 寸法

■ 構造部材

仕様	5本脚仕様	丸ベース脚仕様		患者用チェアシリーズ
幅	630mm	620mm	座部	ポリプロピレン<PP>+銅板、ウレタン、レザー（抗菌）
奥行	570mm	520mm	背もたれ部	ポリプロピレン<PP>、ウレタン、レザー（抗菌）
高さ	630～720mm	600～690mm	脚部	5本脚仕様：ポリアミド（PA）+ガラス30% φ80双輪キャスター 丸ベース仕様：スチールクロームメッキ
座面高	410～500mm	380～470mm	肘部	スチールパイプ+ポリプロピレン（PP）、ABS

5. お手入れについて

（背・座のシェル、肘部、脚部、レバー等）

- 柔らかな布で拭き拭きしてください。
- 汚れがひどい場合はうすめた中性洗剤をつけ、よくしぼった布で汚れを拭きとり、洗剤が残らないようによくしぼった布で水拭きをした後に、柔らかな布で拭き拭きしてください。

6. 故障かな？と思ったら

こんなときは	こう対処してください
座が下らない	・レバーを操作する時、座面の中央部に腰をかけてください。 ・座面が最低位置になっていないかご確認ください。
座が上がらない	・座面から腰をうかせてから、レバー操作してみてください。 ・座面が最高位置になっていないかご確認ください。
異常な音がする	・ロッキング部やキャスターから異常な音がした時は、 使用を控えお買い求め先の販売店にご連絡ください。

7. 保証について

ご使用のチェアが取扱説明書の注意書きによる正常なご使用状態のもとで故障した場合には、下記の保証期間をご参照のうえ、お買い上げ販売店までご連絡ください。

■保証項目

- 保証期間は、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

保証期間	部 位 等	備 考
1年	外観・表面仕上げ クッション等	塗装及び樹脂部品の変色・退色・クロスの磨耗 クッションの著しいへたり
2年	基本機能	座面の高さ調節・回転・ロッキング機構の故障
3年	構造部材	座部・背もたれ部・脚部・肘掛け部の構造部材の破損


- 保証期間経過後の修理については、原則として有償とさせていただきます。

■保証期間内であっても、次の場合は有料になります。


- イ. お買い上げ後の輸送、移動時の不適当な取扱いにより生じた故障・損傷。
- ロ. 改造 または 不当な修理による故障・損傷。
- ハ. 火災・地震・水害、その他天災による故障及び破損。
- ニ. ご使用者の誤った使用方法による故障及び破損。
- ホ. キャスター等消耗品のお取替え。

患者用チェア 取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
本製品をご使用になる前に、この説明書をよくお読みの上正しくお使いください。

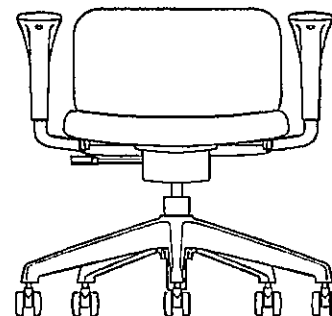

5本脚仕様

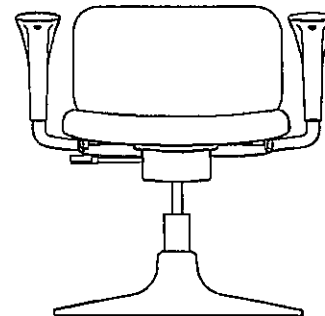

丸ベース脚仕様

- | | | |
|----------------|-------|---|
| ○安全にお使いいただくために | _____ | 1 |
| ○各部の名称 | _____ | 2 |
| ○ご使用方法 | _____ | 3 |
| ○品質表示 | _____ | 4 |
| ○お手入れについて | _____ | 5 |
| ○故障かな？と思ったら | _____ | 6 |
| ○保障について | _____ | 7 |

1.安全にお使いいただくために

製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。

⚠ 警告

この表示を守らずに、誤った取扱をすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を守らずに、誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定されるか、機能及び物的障害のみの発生が想定される内容を示しています。



⚠ 警告

- ガススプリングを火の中に入れてください。高圧ガスが爆発してけがの原因となります。
- ガススプリングは分解・注油しないでください。爆発してけがの原因となります。
- この製品を廃棄処分するときは、専門業者にご依頼ください。焼却すると有毒ガスが発生したり破裂したいしてけがの原因となります。

⚠ 注意

- 回転イスの用途以外には使用しないでください。けがの原因となる場合があります。
- 可動部のすき間にてや指を入れないでください。はさまれてけがの原因となる場合があります。
- 座面の先端やひじ掛けに座らないでください。イスが倒れてけがの原因となります。
- 座面に立上がつたり、逆向きに座らないでください。イスが倒れてけがの原因となります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、イスが倒れてけがの原因となります。
- 幼児を一人で座らせしないでください。イスから落ちたりしてけがの原因となります。
- 分解や改造をしないでください。破損したりして、けがの原因となります。
- ボルトやネジが、ゆるんだときは増し締めをしてください。そのまま使用すると、イス本体が壊れてけがの原因となることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。イスがもえて火災の原因になることがあります。
- 張地やクッションが破れたり、壊れたまま使用しないでください。けがの原因となることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。イス本体がこわれてけがの原因となることがあります。ただちに使用を中止し、販売店にご相談ください。
- 屋外や、水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やさびの原因になります。
- 直射日光、熱が当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。変色、変形、故障の原因となります。
- ベンジン、シンナーアルコール類や化学ぞうきんは絶対に使用しないでください。変色変形、故障の原因となります。

2.各部の名称

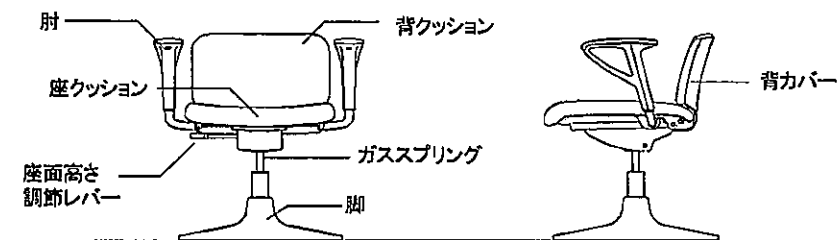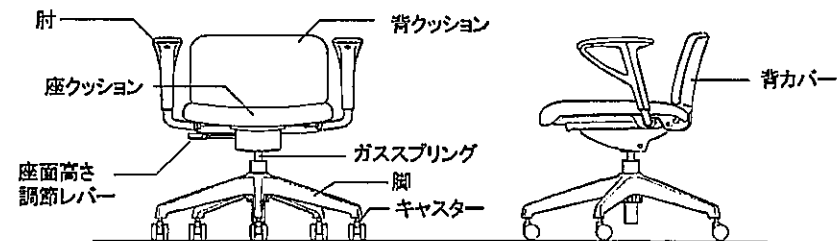

3.ご使用方法

1 座面高さ調節

座って右側の座下レバー①の操作により、座面の高さ調節が出来ます。

●座面を上げる時

着座した状態で腰を浮かせ、レバー①の手前部を右図の矢印の方向に引き上げてください。レバーを離すと座面の高さは固定されます。

●座面を下げる時

座の中央部に座り、レバー①の手前部を矢印の方向に引き上げてください。レバーを離すと座面の高さは固定されます。

