


マツヨシ採血・処置テーブル 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。製品を末永くご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、お読みいただいた後はお手元に保管してください。

【各部の名称】

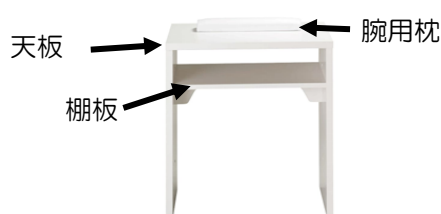

商品名	マツヨシ採血・処置テーブル(ユニットタイプ)
品 番	SN-UT001
サイズ	W600×D450×H760mm
重 量	13kg
耐荷重	約10kg
材 質	木
付属品	腕用枕(固定なし)、連結用ビス×2



商品名	マツヨシ サイドワゴン
品 番	SN-UT002
サイズ	W350×D450×H760mm
重 量	19kg
耐荷重	約10kg
材 質	木
付属品	連結用ビス×2
キャスター	Φ60mm(双輪・前輪ストッパー付)

ご使用方法

- 連結用ビスを用いることでマツヨシサイドワゴン(ユニットタイプ)SN-UT002と繋げることが可能になります。
- ▲連結作業を行う際は、十分な空間を確保し、周囲に注意して行ってください。

▲安全上のご注意

- 本製品は、本来の目的以外に使用しないでください。また、加工や改造など行わないでください。改造、分解したものを使用して、事故が起きた場合、当方は一切責任を負い兼ねます。
- ご使用前に破損や変形などの異常が無いか必ず点検してください。異常が見られる場合、ただちに使用を中止してください。
- 本製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないでください。転倒や破損の原因になります。
- 耐荷重(約10kg)以上の重さがかからないようにご使用ください。破損や事故の原因に繋がる恐れがあります。
- 屋外、傾斜や不安定な場所でのご使用はお控えください。転倒や破損の原因になります。
- 天板をたたく等、強い衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
- キャスターや可動部などに異常音が発生した場合は直ちに使用を中止し、ご購入された販売店にご相談ください。

お手入れ・保管方法

- 乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- アルコールなどでの清拭は推奨しておりません。清拭する場合は、必ず速やかにかから拭きをしてアルコールなどが付いたままの状態での放置をしないでください。材質の劣化や変色などの原因になります。
- 乳幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。

【発売元】

 松吉医科器械株式会社
<https://www.matsuyoshi.co.jp>