

折りたたみ式トイレチェア

TY524

取扱説明書


このたびは、弊社製品をご採用いただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読み下さい。お読みになったあとは、大切に保管して下さい。

万一ご使用中にわからないことや不具合が生じたとき、本説明書をご覧いただき、末永く安全にご愛用くださるようお願い申し上げます。

ご注意とお願いーけがや故障などを防ぐため、ご使用前に必ずお読み下さいー

- ・脚部のプッシュボタンが確実にセットされているか必ず確認して下さい。
- ・使用前に前部パイプの両側のコの字型の部分が、両側のフレームのパイプにきちんとはまっている事を確認して下さい。
- ・4本の脚部の長さは必ず同じにして使用して下さい。
- ・四本の脚部が全て床に着いている事を必ず確認してから使用して下さい。
- ・脚部の先端にすべり止め用の先ゴムが付いていますが、平らな場所で使用して下さい。
- ・上ぶた・便座の上に立ち上がらないで下さい。
- ・バケツを取り出すときは指づめ防止の為に、上ぶた・便座が倒れてこないように片手で抑えながら取り出して下さい。
- ・ご使用になるときは、必ずバケツをセットしてバケツのふたを外してから使用して下さい。
- ・ご使用中は、上ぶたに寄りかからないで下さい。
- ・ストーブ等の火気に近づけないようにして下さい
- ・1人で立ち上がる時・移動する時に片側に体重をかけるとバランスをくずして転ぶ危険があるのでしないで下さい。
- ・座面の両側にあるアームレストは、使用者の座位保持の為に使用して下さい。
- ・使用者が1人で歩行及び身体の安定が出来ない場合は、必ず介護者が付き添って下さい。
- ・使用する前に各部の点検をして下さい。
- ・先ゴムが破れたり、摩耗したり等の異状があるときは直ぐに交換して下さい。
- ・塩化ビニール系の素材を使用した床（クッションフロア等）に置いたままにすると、化学反応を起こし床に先ゴムの跡が付きますので注意して下さい。

各部の名称

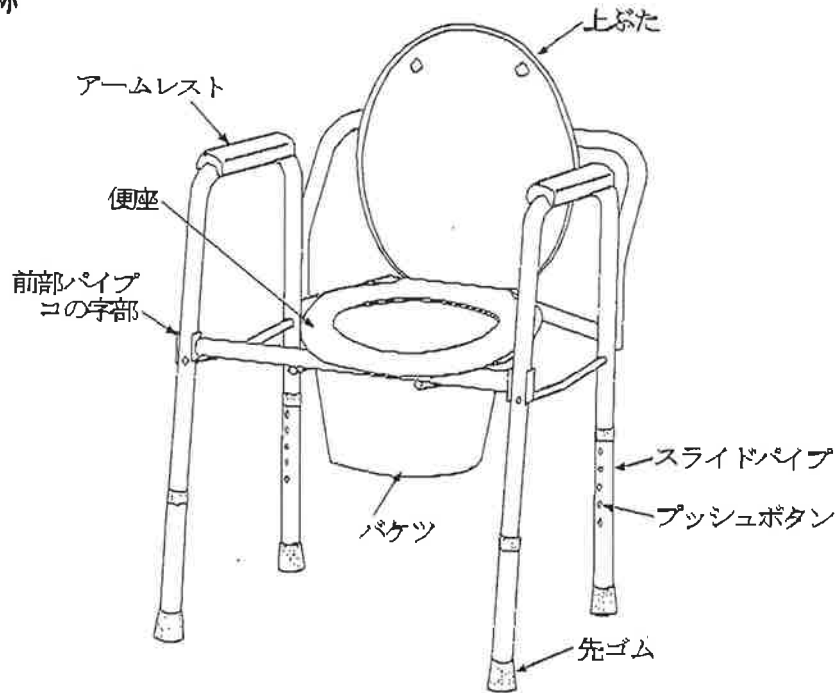


本製品の特徴

本製品は折りたたみができ、収納にも場所を取りません。

ご使用の手順

- ・便座の高さ調節は脚部についているプッシュボタンで調節して下さい。調節は脚部にあるプッシュボタンを押しながらスライドパイプを引いて下さい。プッシュボタンがカチッと音がしたら次にプッシュボタンの頭の部分がスライドパイプの穴から出ている事を必ず確認して下さい。
4本の脚部の長さは同じにして下さい。
座面の高さは、床に足の裏が完全に着くぐらいの高さが最適です。プッシュボタンを深く押し込みすぎると、中に入り込んでしまう場合があります。その場合、一度スライドパイプを引き抜いて、プッシュボタンを出してから再度セットして下さい。
- ・折りたたむ時は、上ぶた・便座を上げパケツを取り出してから前部のパイプを持ち上げて両側のコの字型の部分にはまっているフレームのパイプを片側ずつ外してから両側のフレームを内側に折りたたんで下さい。使用する時は、折りたたむ時の逆の順序で行って下さい。
- ・上ぶたを上げて使用して下さい。
- ・使用になるときは、必ずパケツをセットしてパケツのふたを外してから使用して下さい。
- ・パケツに水を少し入れて使用して下さい。
- ・上ぶたと便座を上げてパケツを取り出し、汚物を処理して下さい。

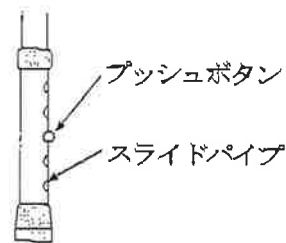

お手入れ・点検の方法

- ・汚れのひどい時は、中性洗剤の薄め液をスポンジに含ませ汚れを取った後、乾いた布で乾拭きして下さい。
- ・塩素系洗剤・シンナー・クレゾールなどは絶対に使用しないで下さい。
- ・たわしや磨き砂、研磨剤入りのスポンジなどは本体を傷つけますので使用しないで下さい。
- ・ネジ・ナット類の緩みがないか定期的に点検していただくようお願いします。緩んだままでのご使用は危険ですので、締め直すか販売店にご相談下さい。

仕様

材 質	： フレーム	： スチール製 クロームメッキ
	便座、アームレスト、バケツ	： プラスチック製
規格寸法	： 525 (W) × 505 (D) × 680～780 (H) mm (ピッチ25mm)	
	便座の高さ	： 440～540mm (ピッチ25mm)
	アームレスト内寸	： 425mm
	重量	： 約8.0kg

[サービスについて]

使用方法、故障などご不明な点はお買い上げになった販売店か弊社までご連絡下さい。
本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために一部予告なく変更することがあります。

発売元 日進医療器株式会社

本社 〒481-8681 愛知県北名古屋市沖村権現3番地の2
TEL 0568-21-0635 FAX 0568-23-2787
東京営業所 〒112-0011 東京都文京区千石2丁目2-1
TEL 03-3943-5200 FAX 03-3943-5222
大阪営業所 〒533-0013 大阪府大阪市東淀川区豊里6-16-10
TEL 06-6323-8265 FAX 06-6326-2554
九州営業所 〒812-0876 福岡県福岡市博多区昭南町2丁目3-8
TEL 092-513-5036 FAX 092-513-5038