

取扱説明書

製品を安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、お読みいただいた後はお手元に必ず保管してください。



注意

取り扱いを誤った場合に、人が怪我を負ったり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

- 本製品は、本来の目的以外に使用しないでください。また、加工や改造など行わないでください。
- ご使用前に破損や変形などの異常が無いか必ず点検してください。異常が見られる場合は使用を中止してください。
- 耐荷重(約3kg/フック1個あたり約1.5kg)以上の無理な力がかからないように使用してください。破損や事故の原因につながる恐れがあります。
- 屋外、傾斜や不安定な場所での使用はお控えください。転倒や破損の原因になります。
- 伸縮の際は、必ず両手で操作を行ってください。
- MRI室で絶対に使用しないでください。重大な事故につながる恐れがございます。

■使用方法


【使用前】

- 1.専用ケースより本製品を取り出し、破損や変形などがないか点検してください。
- 2.フック部とベースを取り付けてください。
- 3.左右のバランスを可能な限り均等にして、平らで安定した場所で使用してください。

【使用后】

- 1.汚れ等が付いていないか確認し、付いている場合は水拭きで拭き取ってください。
- 2.破損等がないか確認し、フック部とベースを取り外し、ベースを折りたたんでください。
- 3.専用ケースに入れて次回使用時まで保管してください。

《各部の名称》

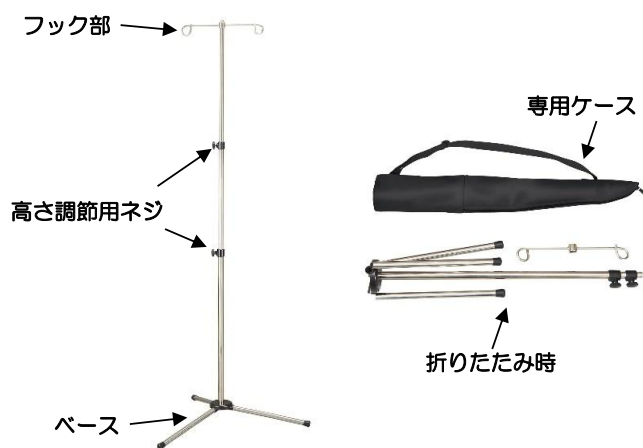

■製品仕様

品番	MY-HLST1
サイズ	ベース幅580mm、高さ780~1800mm 折りたたみ時W110×H720
重量	2.3kg
耐荷重	約3kg(フック1個あたり約1.5kg)
材質	パイプ=ステンレス ベース=スチール、ステンレス
付属品	専用ケース

■お手入れ・保管方法

- 薬液等が付着した場合は、直ちに拭き取りをしてください
- 拭き取りの際は、固く絞った柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際は必ず専用ケースに収納してください。
- 風通しのいい直射日光が当たらない場所で保管してください。過度な高温多湿の環境で保管しないでください。
- 幼児の手の届かない場所に保管して

【発売元】

 松吉医科器械株式会社
<https://www.matsuyoshi.co.jp>