

マイスコ ペンライト

各部のなまえと乾電池の入れかた



- 使用乾電池：単4形×2個
- 使用豆球：2.2V-0.25A ニッブル球
- 豆球の交換：ランプキャップから豆球の先端を押しキャップからはずして交換してください。豆球をお求めのときは、2.2V 0.25A ニッブル球とご指定ください。

注意

安全上のご注意

- 次のことを守ってください。
 - ①電池の使用表示に従って正しく使用する。
 - ②定期的に点検(点灯、電池の液もれ)する。

ご使用方法

- 電池の入れかた：ランプキャップを回してはずし、電池を2個ともランプキャップ側に(+)極がくるよう正しく入れてください。(入れる向きを誤ると点灯せず、電池の液もれの原因にもなります。)
- スイッチ：クリップの先端部(矢印)を押して下さい。
※仕様は予告なく変更します。

販売元：松吉医科器械株式会社