

保温・圧迫用サポーター

シームレス サポーター

SEAMLESS SUPPORTER

■はじめにお読みください

- 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 本品は使用状況によって、保温・圧迫できない場合があります。
- 本品は左右兼用です。
- 本品を使用する際には、ほつれや伝線に注意してください。
- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。

■装着方法

- サポーターを装着する部位に通して引き上げます。
- 関節に装着する場合は、サポーターの中心を関節の中心に合わせます。

■お手入れ方法

- 本品は手洗いで洗濯できます。押し洗いし、絞らずタオルなどで水気を取って、日陰で吊り干しにしてください。
- アイロン、塩素系漂白剤、乾燥機は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- 本品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。
- 洗濯後、縮むことがあります。

■サイズ表

品番	種類	適用範囲	計測位置
301401	手くび	15～20cm	手くび周囲
301402	手のひら	—	—
301403	ひじ	20～25cm	肘頭から10cm上の周囲
301404	ひざ	35～45cm	膝蓋骨中心から12cm上の周囲
301405	足くび	23～27cm	靴サイズ
301406	すね	25～35cm	すね最大周囲
301407	もも	45～55cm	もも最大周囲



警告

- 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は医師に相談してください。
 - ・アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
 - ・装着部に傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。
- 次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。
 - ・関節の保温、圧迫以外の用途で使用しないでください。
 - ・装着する部位に合った種類、サイズの製品を使用してください。
 - ・就寝時の使用については、必ず医師の指示に従ってください。
 - ・使用中にずれた場合は、正しく装着し直してください。また、長時間使用する場合は、過度の圧迫などに注意し、適宜装着し直してください。
 - ・本品が摩耗、損傷した場合は使用を中止し、医師に相談してください。
 - ・本品の加工、改造、修理を行わないでください。
- 本品の使用中に、怪我、骨折、痛み、しびれ、腫れ、湿疹などの異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。

※お願い 本品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。



2022.10(改版)
169496

日本シグマックス株式会社

本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)
受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く