

【呼吸の確認⇒胸骨圧迫 30 回⇒人工呼吸 2 回】を繰り返し行う

①




頭を後ろに反らしあごを上
にあげて気道を開ける。

②



フェイスシールドを顔に乗せ
内側のマウスピースを
口に入れる。
(印刷面が上にし、印刷面の
TOP を額の上に置く)

③

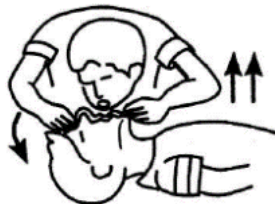

マウスピースより
息を 2 回吹き入れる。
(人工呼吸を 1 回 1 秒)

④



マウスピースを離して
呼吸の確認をする。

【人工呼吸は 2 回行う】

【1 人 1 回使用後は廃棄して下さい】

ユーメド貿易株式会社
東京都文京区本郷 3-39-9