

マツヨシリベルタオムツ交換車DX 取扱説明書 (LB-003,LB-003N)

<取扱注意事項>

- 移動時には、エレベーター等の使用の際、キャスターが隙間に落ちないようにご注意ください。
 - 平坦な床でご使用ください。
 - 改造、分解はしないでください。
- ※改造、分解をしたものを使用して、事故が起きた場合当方は一切責任を負いかねます。



<特 徴>

- 4輪が同時にロックする機構が付いています。
- 引き出し式収納ケース2段、収納に便利なラック大1個付きで収納力があります。

品名	マツヨシ リベルタオムツ交換車DX
品番	LB-003
製品サイズ	本体=W405×D800×H975(天板高830)mm
重量	本体=23.5kg
材質	フレーム=スチール、天板=メラミン化粧板、トレイ=PP
耐荷重	約20kg

<ご使用方法>

●ストッパーキャスターの使用方法

ストッパーキャスターの操作レバーを脚で上下させることにより、ストッパーを使用・解除を行うことができます。

●収納ケースの使用方法

2段とも引き出し式で前後にケースを引き出せます。ご使用の際は、ゆっくり丁寧にお願いします。
ケースを取り出すときは、フレーム枠から持ち上げて取り出すことができます。

●タオルウォーマーの使用方法

- ⚠天板上にタオルウォーマーを設置してご使用になる場合は、必ず付属のベルトで固定してから、使用してください。固定しないままの使用は、落下の危険がありますので絶対にしないでください。付属のベルトで天板の下を通して（前後）上部で締め込んで固定してください。



品名	マツヨシ リベルタオムツ交換車DX
品番	LB-003N
製品サイズ	本体=W405×D800×H975(天板高830)mm タオルウォーマー=W450×D297×H333mm
重量	本体=23.5kg、タオルウォーマー=6.0kg
材質	フレーム=スチール、天板=メラミン化粧板、トレイ=PP
耐荷重	約20kg

【販売元】



松吉医科器械株式会社

〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3階
TEL:03-5816-8819（音声ガイダンス）