



メガミトン S214 取扱説明書 使用前に必ずお読みください！

【使用目的・製品特徴】

- 医療法やその他の法令に従った上での指抑制具
- 透明ビニルで観察が容易
- 先端部が解放デザインで蒸れない

【使用方法】

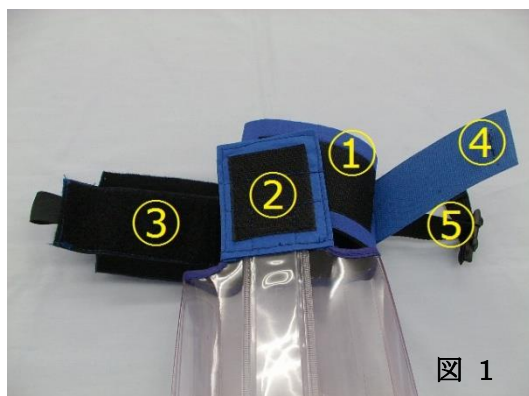


図 1



※締めすぎによる循環不良に注意してください。
指が1本入る程度にしてください。

<クリーニング方法>

- 中性洗剤を湿らせた布で拭く(推奨)
- 洗濯機使用の場合
- マジックテープは糸くずが付着しないように留めておく。
- 温度 40° C 以下 (ぬるま湯)
- 漂白剤使用可能。
- 乾燥機(低温)

【注意・警告事項全般】

- ◆ この製品は施設での安全対策補助を目的とするものであり生命救済・生命維持を目的とした商品ではありません。
- ◆ 医療法やその他の法令に従って使用してください。
- ◆ 各施設で使用上の基準やガイドラインを作成して使用してください。
- ◆ 使用目的以外の用途で使用しないでください。
- ◆ 使用前に必ず製品の点検・確認を行ってください。製品に生地痛みなど品質上の異常がみられる場合には直ちに使用を中止してください。
- ◆ 四肢に脱臼・骨折・創傷がある患者には使用しないでください。
- ◆ ミトン使用によるIVラインへの障害の可能性が考えられる場合には使用しないでください。
- ◆ 定期的に巡回チェックを行い固定状態、皮膚状態、製品の異常などに注意してください。
- ◆ 締めすぎによる循環障害に注意してください。
- ◆ 火気の近くで使用しないでください。
- ◆ 攻撃的・凶暴性の患者には使用しないでください。
- ◆ 本製品使用により患者の動揺・不適切な行動など異常がある場合は使用を中止し適切な方法に変更してください。
- ◆ この製品は基本的に病院・施設向けですが医療機関からの在宅使用の推奨がある場合は専門知識を有した看護・介護スタッフからの使用上のアドバイスを受け、取扱方法を十分習得した上で使用してください。

輸入発売元：
株式会社メディカルプロジェクト
Tel : 054-252-1141