

手首固定ホルダーソフトタイプ # KA085 取扱説明書 使用前に必ずお読みください！

【性能・使用目的】

手首固定シーネとして使用する

【使用方法】

- 固定ホルダーのストラップを外し手首にストラップがかからないように巻きつけ固定します。
- ◆ 強く締めすぎないように十分注意して下さい。血液循環不良の可能性があります。
- シーネの角度調節をする場合は内部アルミバーを抜き出し成型してから本体に挿し戻します。



【使用上の注意・警告事項】

- ◆ この商品は施設での安全対策補助を目的とするものであり生命救済・生命維持を目的とした商品ではありません。
- ◆ この商品は完全な抜針予防を目的とした商品ではありません。
- ◆ 施設のシーネ固定方法基準に従って使用してください。
- ◆ この商品は滅菌されておりません。
- ◆ 締め過ぎによる血流不全に注意してください。(本品に使用されている材質ネオプレンは合成ゴムの一種で伸縮性がありますのでストラップを引っ張りすぎると締め過ぎる場合があります。)
- ◆ 乾燥した涼しく暗い場所に保存すること。
- ◆ シーネ固定後も常に監視してください。
- ◆ シーネ、マジックテープ等による皮膚のかぶれ等がありましたら、使用を中止してください。
- ◆ MRI撮影をおこなう場合は施設の基準に従ってください。(製品内部にアルミバーが使用されています)
- ◆ 繰り返しの使用、成形により内部アルミバーに亀裂などの金属疲労が生じる場合があります。使用前に必ず確認し、破損を認めた場合には使用を中止してください。
- ◆ シーネの角度調節のための成型は内部アルミバーを抜き出してから成型してください。また成型時アルミバーの両端は若干鋭くなっているところがありますので十分気をつけて使用してください。

【洗濯方法】

洗濯機40℃以下(ネット使用)を推奨。

40℃以上では素材の劣化が早い。

※ アルミバーを必ず抜き出して下さい。

- 乾燥機不可
- 漂白剤はなるべく使用しないで下さい。素材の劣化が早い・色落ちの可能性有り。

サイズ／材質

32cmX9cm / ポリエステル・ネオプレン・アルミ

2022/3