

マイスコカテーテル用保護ベルト

取扱説明書

製品をご使用の前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただきから正しくご使用ください。

【注意事項】

- ◆「マイスコカテーテル用保護ベルト」は、カテーテル処置時に患者を保護するための製品です。患者の無意識の動きをベルトで保護することで、スムーズな処置を行えます。
- ◆医療施設におけるカテーテル処置時に、医療従事者の管理の下、正しくご使用ください。


- ◆カテーテル挿入部位や患者の状態に応じて、4種類の製品から組み合わせてご使用ください。
- ◆本製品を目的以外の用途では使用しないでください。
- ◆使用前には、必ず正常に機能するか確認してください。破れ・ほつれ・損傷が有る場合は、直ちに使用を中止してください。
- ◆お手入れの際は、各パーツごとに適切に行ってください。また、製品の状態に応じて、定期的な買い替えをおすすめします。

【使用方法・商品詳細】

◆ 手首処置用 MY-TK1130


- ① カテーテル処置台に患者が寝た状態から、腕を置く位置を決めます。
- ② 決めた位置にクッション部を置き、手を A ライン状に伸ばします。
- ③ 3ヶ所のベルトを面ファスナーで留めます。
- ④ 必要に応じて、腕を置いた場所とクッション部をベルトで留めます。

* 材質：生地=ナイロン100%、ベルト部=ポリエステル100%、
中材=ポリウレタン

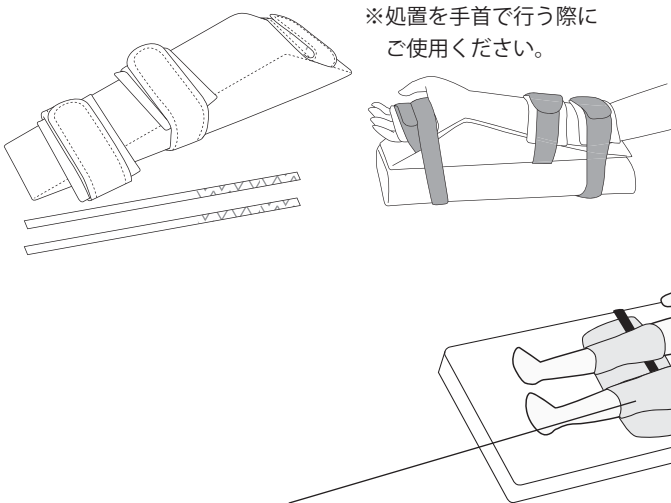

◆ 胸用 MY-TK1120


- ① 患者をカテーテル処置台に寝かせます。
 - ② カテーテル処置台の下にベルトを回し、胸部を面ファスナーで留めます。
- * 材質：生地=綿100%（カツラギ）、ベルト部=ポリエステル100%

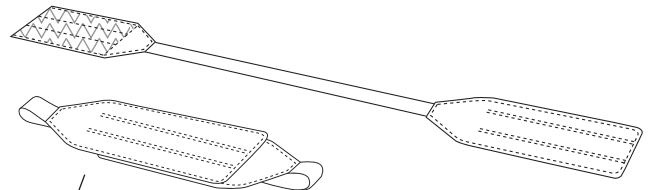

◆ 膝用 MY-TK1100

- ① カテーテル処置台に、バックル部が患者の頭側になるよう、置きます。
- ② カテーテル処置台の下にバックル付きのベルト部を回し、バックルで留め、ベルトの長さを調節します。
- ③ 患者を寝かせ、膝の関節がベルトの中央にくるよう調節します。
- ④ 膝にカツラギ生地のベルトを巻き、留め具と面ファスナーで留めます。


* 材質：生地=綿100%（カツラギ）、ベルト部=ポリエステル100%、
中材=ポリエステル綿（V-rap）

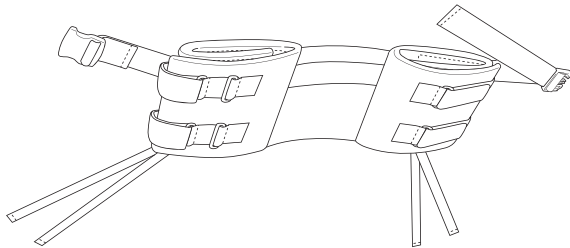

◆ 手用 MY-TK1110

- ① 患者をカテーテル処置台に寝かせます。
- ② バックルをはずし、右左それぞれの手首にカツラギ生地のベルトを巻き、留め具と面ファスナーで留めます。
- ③ カテーテル処置台の下に右左それぞれのバックル付きのベルト部を回し、バックルで留め、ベルトの長さを調節します。

* 材質：生地=綿100%（カツラギ）、ベルト部=ポリエステル100%、
中材=ポリエステル綿（V-rap）

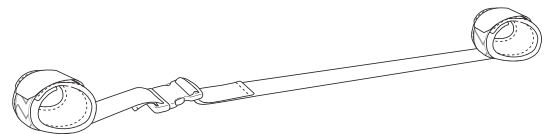

【洗濯方法】

洗濯：○ 乾燥機：○(80℃以下) オートクレーブ：×

- ※洗濯、及び乾燥時は面ファスナー部を留めて（重ねて）から、洗濯してください。
- ※膝用・手用は、バックル部を留めた状態で、洗濯してください。
- ※手首処置用は、洗濯、及び乾燥時は中材を取り出し、外側のみを洗濯してください。
- ※洗濯する際は、洗濯ネットをご使用ください。