

# マツヨシ錠剤クラッシャー

- 品番：MY-8110
- 規格：Φ55×H44mm
- 材質：ポリカーボネート、ポリアセタール
- 特徴：錠剤をセットし、蓋を回すことで薬を細かくすりつぶします。  
下部が透明なので薬のすりつぶし状態が確認できます。

## 【使用方法】

- 蓋を開けて錠剤を入れてください。
- 錠剤投入後に蓋を閉めることにより、錠剤を粉末状にすることができます。

## 【使用上の注意】

- ⚠ 形状を変えずに服薬するように指示を受けた薬には使用しないでください。
- ⚠ 本来の目的以外に使用しないでください。
- ⚠ 不具合が生じた場合、ただちにご使用をお控えください。
- ⚠ 小さいお子様の手の届かない場所に保管してください。

## 【発売元】

 松吉医科器械株式会社  
<https://www.matsuyoshi.co.jp>



外箱



本体・フタ



台湾製